

al dente
dentalprodukte

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ



Протягом останніх 20 років **al dente Dentalprodukte GmbH** був вашим надійним партнером щодо витратних матеріалів та приладів для стоматологів та зубних техніків.

Завдяки нашій тісній співпраці з провідними національними та закордонними зубними техніками ми постійно створюємо нові, інноваційні та високоякісні продукти, які представлені по всьому світу на всіх континентах.

Така співпраця з практикуючими фахівцями, які визначають тенденції ринку, щоденно в своїй лабораторії використовують наші продукти, об'єктивно та професійно їх оцінюють, дає нам абсолютну впевненість в тому, що ви отримуєте від нас першокласну продукцію.

Будь ласка, надсилайте ваші замовлення нашим партнерам у відповідних країнах.

Зв'яжіться з нами, і ми з радістю повідомимо вам контактні дані найближчого до вас дилера.

МОДЕЛЮВАЛЬНІ ВОСКИ

Ця таблиця дозволяє досягнути різноманітності наших восків, дає можливість знайти потрібний для вашої роботи віск та підказує, який з восків підходить для виготовлення безметалевих робіт (беззольні).

Артикул	Продукт	Твердість	Кількість	Температура	Беззольність	Стор.
02-1000(C) – 02-1030(C)	Pro-Mod Моделювальний віск	середній	60 г/110 г	55°C		6
02-1000(H) – 02-1030(H)	Pro-Mod Моделювальний віск	жорсткий	60 г	57°C		6
02-1045 – 02-1070(C)	Esprit Моделювальний віск	середній	60 г/110 г	55°C		7
02-1080 – 02-1095	Colors Моделювальний віск	середній	60 г	55°C	так	7
02-1100(C)	Pro-Mod F-1 прозорий (фрезерування/гравірування)	жорсткий	60 г/110 г	57°C	так	9
02-1115	Pro-Mod F-1 опаковий (фрезерування/гравірування)	жорсткий	60 г	57°C		9
02-1130(C)	Pro-Mod F-0 опаковий (фрезерування)	дуже жорсткий	60 г/110 г	58°C		9
02-1200 – 02-1210	Aesthetic-Inlay Wax (безметалева кераміка)	середній	60 г	53°C	так	8
02-1300(C) – 02-1370	Pro-Mod VKS (безметалева кераміка)	середній	60 г/110 г	55°C	так	8
02-1400(C) – 02-1420	Pro-Mod C – Цервікальний віск	середній	60 г/110 г	59°C	так	7
02-1430	Ceramic Shoulder Wax – віск для керамічного плеча	середній	2 x 8 г	53°C	так	12
02-1440	Pro-Mod B віск для піднутринь C + B	середній	60 г	61°C		10
02-1455	Sticky Wax – Липкий віск	середній	60 г	71°C	так	10
02-1470	Fixingwax – Фіксуєчий віск	середній	60 г	52°C	так	16
02-1480	Blockout Wax для моделей	середній	60 г	51°C		19
02-1500 – 02-1505	Technique-Wax прозорий	середній	110 г	57°C	так	9
02-1500S – 02-1505S	Technique-Wax прозорий	м'який	110 г	57°C	так	9
02-1510 – 02-1515	Technique-Wax опаковий	середній	110 г	56°C		9
02-1510S – 02-1515S	Technique-Wax опаковий	м'який	110 г	56°C		9
02-1550 – 02-1555	Tooth Sculpturing Wax прозорий	середній	40 г	55°C	так	6
02-1560 – 02-1565	Tooth Sculpturing Wax опаковий	середній	40 г	56°C		6
02-1570	Pro Pearl Моделювальний віск прозорий	середній	100 г	53°C		10
02-1630	CAD/CAM віск для піднутринь лазер-опак	середній	60 г	57°C		4
02-1640 – 02-1655	CAD/CAM Моделювальний віск лазер-опак	середній	60 г	56°C		4
02-1700 – 02-1740	Diagnosticwax – Діагностичний віск	середній	60 г	57°C	так	6
02-1750	Diagnosticwax – Starterset – Діагностичний віск-стартовий набір (всі кольори)	середній	5 x 9 г	57°C	так	6
02-1940	Stick-on wax – Липкий віск	середній	60 г	60°C	так	20
02-3000 – 02-3020	Flexi-Dip – Погружний віск	середній	300 г	87°C	так	10
02-3100 – 02-3110	Duro-Dip - Погружний віск	жорсткий	300 г	84°C	так	11
06-1700	Model Casting Wax – Модельний ливарний віск	середній	60 г	53°C	так	18
02-5112(Z) – 02-5122(Z)	CAD/CAM Воскові диски	дуже жорсткий	86 – 155 г	108°C	так	5

МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК ТА КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЛАК ДЛЯ CAD/CAM СИСТЕМ



- CAD/CAM моделювальний віск – опаковий моделювальний віск для високоточного сканування.

60 г

Бежевий
Зелений
Сірий

56 °C

Арт.№ 02-1640

Арт.№ 02-1650

Арт.№ 02-1655



- Липкі Штікси (Sticky Sticks) для DeguDent Cercon System.

Жорсткі, стійкі до деформації воскові палички, які можуть застосовуватися для фіксації ковпачків в DeguDent Cercon System.

70 г

Жовтий

Арт.№ 02-2210-D

AQUA SPACER, ВОДРОЗЧИННИЙ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЛАК ДЛЯ ТЕХНІКИ СКАНУВАННЯ



- Водорозчинний компенсацийний лак, який може застосовуватися для сканування. Рекомендований для всіх сучасних CAD/CAM систем. Після застосування Aqua Spacer може бути легко видалений за допомогою проточної води. (Див. стор. 24)

Aqua Spacer 20 мл
Розчинник 20 мл

Арт.№ 03-4110

Арт.№ 03-4170

CAD/CAM BLOCKOUT WAX, CAD/CAM ВІСК ДЛЯ ПІДНУТРІНЬ



- CAD/CAM віск для піднутріль – це лазер-опаковий віск для блокування порожнин на моделі перед скануванням. Важливе зауваження: CAD/CAM воски не можуть застосовуватися в техніці лиття.

60 г

CAD/CAM віск для піднутріль,
зелений

57 °C

Арт.№ 02-1630

CAD/CAM WAX, ВОСКОВІ ДИСКИ ДЛЯ CAD/CAM



- Віск, з якого виготовлено **al dente** CAD/CAM Wax Disc, спеціально розроблений для CAD/CAM технології. Таким чином, коронки та мости можуть бути сформовані віртуально, відфрезеровані та в результаті відлиті або відпресовані звичайним способом. Віск чудово піддається механічній обробці та вигорає без залишків. Це забезпечує дуже гладку зовнішню поверхню відливки. Ці оптимізовані властивості воску дозволяють відтворювати найделікатніші деталі та виключають усадку чи деформацію відфрезерованого об'єкта. Віск – стабільний в об'ємі – забезпечує абсолютну точність у пришийковій ділянці та в результаті відмінне прилягання. З одного диска можна відфрезерувати до 70 одиниць.



CAD/CAM воскові диски "Z" з круговим ободом

Діаметр 98 мм

12 мм
14 мм
16 мм
18 мм
20 мм
22 мм

Арт.№ 02-5112Z
Арт.№ 02-5114Z
Арт.№ 02-5116Z
Арт.№ 02-5118Z
Арт.№ 02-5120Z
Арт.№ 02-5122Z

CAD/CAM воскові диски з циліндричним краєм

Діаметр 100 мм


12 мм
14 мм
16 мм
18 мм
20 мм
22 мм

Арт.№ 02-5112
Арт.№ 02-5114
Арт.№ 02-5116
Арт.№ 02-5118
Арт.№ 02-5120
Арт.№ 02-5122



GLUFI – ТИМЧАСОВИЙ ФІКСУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ CAD/CAM ЗАГОТОВОК

- CAD/CAM каркаси, зазвичай, ненадійно розташовані на моделі: вони можуть впасти та зруйнувати кераміку, що була нанесена. **З GluFi цього не станеться:** візьміть інструмент та помістіть невелику кількість GluFi на верхівку штампика, притисніть каркас – і надійна фіксація буде забезпечена.
 - GluFi є надзвичайно адаптивним, тому не призведе до завищення по прикусу.
 - GluFi може використовуватися кілька разів: ви можете знімати та надягати ковпачок на модель кілька разів без втрати адгезивних властивостей.
 - Низька точка плавлення/займання гарантує згорання без залишків. (Увага: температура спікання мінімум 720°C!)

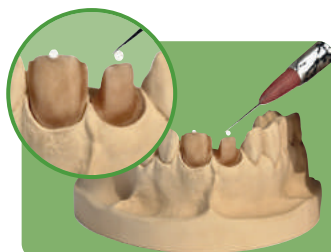

5 мл
6 x 5 мл

Арт.№ 02-6000
Арт.№ 02-6050

DIAGNOSTICWAX, ДІАГНОСТИЧНИЙ ВІСК



- Органічний беззолний діагностичний віск, адаптований до відтінків А-В-С-D та білий. Ідеально підходить для вакс-ап та моделювання під прес-кераміку.

60 г

Білий
А
В
С
D

57 °C

Арт.№ 02-1700
Арт.№ 02-1710
Арт.№ 02-1720
Арт.№ 02-1730
Арт.№ 02-1740

5 x 9 г

Стартовий набір,
всі кольори

57 °C

Арт.№ 02-1750



TOOTH SCULPTURING WAX, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК У ФОРМІ ЗУБА



- Універсальний моделювальний віск у формі 26 моляру, створеного Вольфрамом Шультісом, Карлсруе (Німеччина). Безусадочний віск, доступний у двох опакових та двох напівпрозорих версіях – обидві можуть використовуватися при моделюванні під литво металу та для безметалевих конструкцій. Він має високу стабільність та низьку точку плавлення, що дозволяє створювати точні вакс-апи. Ідеальний для моделювання гнатологічних та вакс-ап конструкцій. Внутрішня стабільність воску гарантує легку його обробку інструментами та гладку поверхню.

NEW

40 г

Моляр сірий, напівпрозорий
Моляр блакитний, напівпрозорий
Моляр бежевий, опаковий
Моляр зелений, опаковий

55 °C

Арт.№ 02-1550
Арт.№ 02-1555
Арт.№ 02-1560
Арт.№ 02-1565



PRO-MOD, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК

- Pro-Mod є ідеальним моделювальним воском для гнатологічних вакс-ап конструкцій. Він має високу точність завдяки високій жорсткості та низькій температурі плавлення. Висока міцність та помірنا текучість дозволяють моделювати дуже чіткий ріжучий край. Pro-Mod легко зрізається та завжди лишає гладку поверхню. Pro-Mod доступний двох типів жорсткості (нормальний/жорсткий (H)).

60 г - нормальний

Зелений
Сірий
Слонова кістка
Блакитний

55 °C

Арт.№ 02-1000
Арт.№ 02-1010
Арт.№ 02-1020
Арт.№ 02-1030

60 г - жорсткий

Зелений
Сірий
Слонова кістка
Блакитний

57 °C

Арт.№ 02-1000H
Арт.№ 02-1010H
Арт.№ 02-1020H
Арт.№ 02-1030H

110 г - нормальний

Зелений
Сірий
Слонова кістка
Блакитний

55 °C

Арт.№ 02-1000C
Арт.№ 02-1010C
Арт.№ 02-1020C
Арт.№ 02-1030C



PRO-MOD C, ПРИШИЙКОВИЙ ВІСК

✓ ash-free

60 г

Червоний
Блакитний
Жовтий
Чорний

59 °C

Арт.№ 02-1400
Арт.№ 02-1410
Арт.№ 02-1415
Арт.№ 02-1420

110 г

Червоний

59 °C

Арт.№ 02-1400C

- Pro-Mod C – пришийковий віск, який відповідає всім потребам техніка: не відклеюється, не має внутрішнього напруження, текучий, не стікає, не крихкий і, таким чином, має абсолютну точність. Навіщо ловити рибу в темряві? Світлий віск, що просвічується, дозволяє чітко побачити маркування по шийці. Таким чином, стає можливим точний візуальний контроль.



ESPRIT, ОПАКОВИЙ МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК



60 г

М'ятний
Бежевий
Лазуровий
Зелений
Блакитний

55 °C

Арт.№ 02-1045
Арт.№ 02-1055
Арт.№ 02-1060
Арт.№ 02-1065
Арт.№ 02-1070

110 г

Бежевий
Лазуровий
Зелений
Блакитний

55 °C

Арт.№ 02-1055C
Арт.№ 02-1060C
Арт.№ 02-1065C
Арт.№ 02-1070C

- Esprit – це моделювальний віск для універсального застосування.

Esprit підходить для створення верхівок бугрів або для індивідуальних ретейнерів.

Esprit надзвичайно добре зберігає форму та має низьку усадку. Завдяки внутрішній жорсткості Esprit має оптимальні властивості для різьблення, поверхня завжди залишається рівною і не потребує додаткової обробки.

Esprit дозволяє відтворити природні оклюзійні контакти та апроксимальні контактні точки під час лиття каркасу завдяки своїй пониженій внутрішній еластичності.

COLORS, КОЛЬОРОВІ МОДЕЛЮВАЛЬНІ ВОСКИ

✓ ash-free

60 г

Зелений
Жовтий
Пурпурний
Оранжевий

55 °C

Арт.№ 02-1080
Арт.№ 02-1085
Арт.№ 02-1090
Арт.№ 02-1095



- COLORS компанії **al dente** – це сучасний моделювальний віск з модними неоновими кольорами. Віск COLORS вирізняється міцністю і швидко охолоджується. Це відмінний віск для моделювання. Він також підходить для вакс-апів під прес-кераміку.

PRO-MOD VKS, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК ДЛЯ ПРЕС-КЕРАМІКИ



- Керамічні конструкції з прес-кераміки висувають спеціальні вимоги до моделювальних восків. Воски VKS компанії **al dente** не містять опакових компонентів, тому небажані реакції на формувочні маси виключені. Завдяки високій стабільності та низькій температурі плавлення ці воски компанії **al dente** прекрасно підходять для гнатологічних вакс-ап конструкцій. З них можна зробити надзвичайно точні верхівки бугрів та індивідуальні ретейнери. Воски компанії **al dente** підходять для усіх сучасних систем прес-керамік таких як Cergogold, IPS Empress, Optec OPC, Dicor, тощо.



60 г

Зелений
Сірий
Блакитний
Лазурний
Бежевий

55°C

Арт.№ 02-1300
Арт.№ 02-1310
Арт.№ 02-1320
Арт.№ 02-1350
Арт.№ 02-1370

110 г

Зелений
Сірий
Блакитний

55°C

Арт.№ 02-1300C
Арт.№ 02-1310C
Арт.№ 02-1320C



AESTHETIC-INLAY, ВІСК ДЛЯ ВКЛАДОК



- Моделювальні властивості цих восків були спеціально розроблені та адаптовані під вимоги техніків для створення вкладок. Коричневий та бежевий кольори створюють відмінний контраст, що робить процес моделювання комфортним для зору. Воски Aesthetic-Inlay компанії **al dente** дуже стійкі та мають низьку усадку. При литті можна чітко відтворити межі зуб-реставрація.

60 г

Прозорий коричневий
Прозорий бежевий

53°C

Арт.№ 02-1200
Арт.№ 02-1210



UNIVERSAL TECHNIQUE WAX, УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК



110 г - звичайний

Прозорий зелений
Прозорий блакитний
Опаковий бежевий
Опаковий лазурний

57°C

Арт.№ 02-1500

Арт.№ 02-1505

Арт.№ 02-1510

Арт.№ 02-1515

- Моделювальний віск у великих упаковках по 110 г для універсального застосування. Зараз в наявності є також з м'якшою текстурою. Відмінний для моделювання та різьблення. В наявності є 2 прозорих кольори для прес-кераміки та 2 опакові кольори для техніки лиття. Має дуже низьку усадку для моделювання без внутрішніх напружень.

110 г - м'який

Прозорий зелений
Прозорий блакитний
Опаковий бежевий
Опаковий лазурний

55°C

Арт.№02-1500S

Арт.№ 02-1505S

Арт.№ 02-1510S

Арт.№ 02-1515S

NEW



PRO-MOD F, ВІСК ФРЕЗЕРНИЙ ТА ДЛЯ РІЗЬБЛЕННЯ



- Комбіновані методики висувають інші вимоги до використання восків. Віск для фрезерування не повинен бути занадто жорстким чи крихким, однак він все ж повинен характеризуватися певним рівнем жорсткості. Виглядає, що неможливо повністю поєднати ці дві вимоги в одному воску. Саме тому ми створили фрезерувальний віск двох видів.

F - 0 = дуже жорсткий (фрезерувальний)

F - 1 = жорсткий (фрезерувальний та для різьблення)

PRO-MOD F-0

Надзвичайно твердий віск для фрезерувальної техніки. Завдяки значній жорсткості він не змазується, а забезпечує оптимальні можливості для фрезерування та видалення залишків.

60 г

Опаковий м'ятний

58°C

Арт.№ 02-1130

110 г

Опаковий м'ятний

58°C

Арт.№ 02-1130C

PRO-MOD F-1

Цей фрезерувальний віск для різноманітних робіт має властивості, що роблять його зручним для різьблення.

60 г

Прозорий зелений
Опаковий сірий

57°C

Арт.№ 02-1100

Арт.№ 02-1115

110 г

Прозорий зелений

57°C

Арт.№ 02-1100C

PRO-PEARL, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК В ГРАНУЛАХ

- Моделювальні воскові гранули PRO-PEARL дуже просто брати гарячим шпателем для воску – вони розтають миттєво, і при роботі в такий спосіб технік набагато менше стомлюється навіть за тривалий час. З опаковим воском легко працювати, і він має дуже низьку усадку.
Упаковка: 100 г воскових гранул в банці з металевим вушком для відкривання + окрема кришка.



100 г

Моделювальний віск PRO-PEARL
опаковий сірий

53°C

Арт.№ 02-1570

STICKY WAX, ЛИПКИЙ ВІСК

- Спеціальний липкий віск з дуже високою силою адгезії. Відмінно підходить для фіксації відламаних фрагментів та гарнітурних зубів, а також моделей для пайки. Завдяки високій жорсткості деформацій будь-чого, що зафіксовано цим воском, не станеться. Липкий віск **al dente** Sticky wax легко видаляється пароструменевим апаратом.



60 г

Червоний

71°C

Арт.№ 02-1455

PRO-MOD B, ВІСК ДЛЯ ПІДНУТРІНЬ C+V

- Це віск для блокування дефектів та порожнин в гіпсових штампиках. Віск PRO-MOD B фіксується до всіх гіпсових поверхонь, легко моделюється та завдяки високій температурі плавлення не з'єднується з іншими восками, як наприклад, погрузний віск.



60 г

Дентинний

61°C

Арт.№ 02-1440

FLEXI-DIP, ЕЛАСТИЧНИЙ ПОГРУЖНИЙ ВІСК

- FLEXI-DIP – це еластичний погрузний віск для точного прилягання воскового ковпачка, який характеризується відмінними властивостями при різьбленні та зрізанні. Висока еластичність цього воску запобігає деформації ковпачка, коли його знімають зі штампика. Цей віск гарантує ідеальну адаптацію та надзви-



300 г

Оранжевий
Фіолетовий
Жовтий

87°C

Арт.№ 02-3000
Арт.№ 02-3010
Арт.№ 02-3020



чайно точно прилягання відлитої коронки. Фізичні властивості цього спеціального еластичного воску наближаються до властивостей термопресованих синтетичних ковпачків.



Ідеальна температура для погрузних восків: прибіл. 87 °С, при якій товщина ковпачка становить прибіл. 0.35-0.4 мм.



DURO-DIP, ЖОРСТКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПОГРУЖНИЙ ВІСК



- Жорсткий еластичний погрузний віск DURO-DIP характеризується високою точністю прилягання та відмінними моделювальними властивостями. Ідеальна температура для погрузного воску: прибіл. 84 °С, при якій товщина ковпачка становить прибіл. 0.35-0.4 мм.

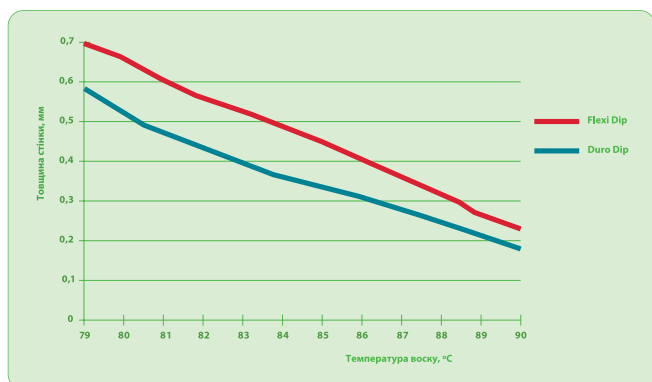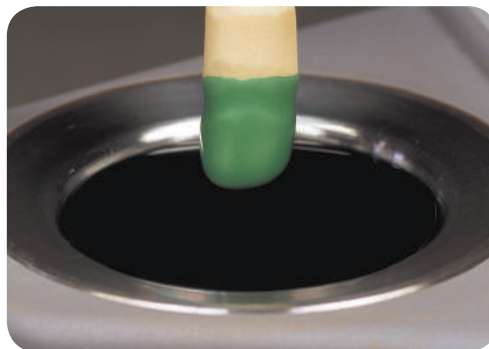

300 г
Жовтий
Зелений

84 °C
Art.Nr. 02-3100
Art.Nr. 02-3110

WAX BRUSH, ПЕНЗЛИК ДЛЯ ВОСКУ

Пензлик для воску

Арт.№ 09-1100



- Застосовується для полірування воскових моделей і видалення надлишків воску.

- Який технік під час роботи з керамікою не стикався з цією проблемою? Частина плечової маси відпадає, коли коронку знімають зі штампа. Деякі системи намагаються вирішити цю проблему шляхом змішування порошку кераміки та воску. Внаслідок цього кераміка стає недостатньо щільною, що спричиняє пористість та погане прилягання керамічних плечових мас.



2 x 8 г

53°C

Віск для керамічної маси

Арт.№ 02-1430



Наше рішення:

Плечова маса наноситься та конденсується звичайним методом. На неї наноситься віск для фіксації керамічного плеча виробництва компанії **al dente**, плечова маса стабілізується під шаром воску, а тому її можна знімати зі штампа без будь-якого ризику. Досягається оптимальне прилягання, а плечова маса не має пористості. Віск для плечової маси компанії **al dente** на основі органічних речовин стікає з інструмента при низькій температурі, легко просочує керамічну масу та згорає без залишків (мінімальна температура спікання 780°C).



Інструкції з використання

- ▶ Перед спіканням плечової маси штампик ізолюється сепаратором для кераміки, а потім у звичайний спосіб наноситься плечова маса.
- ▶ Після того як плечову масу ущільнили та висушили, гарячим моделювальним інструментом нанесіть на неї невелику кількість воску.
- ▶ Щоб віск повністю проник у висушену керамічну масу, штампик треба рівномірно підігріти феном. Коли робота охолоне, її можна знімати зі штампа, не боячись, що вона зламається.
- ▶ Тепер її можна спікати. Результат: відмінне керамічне плече.

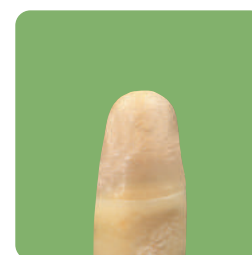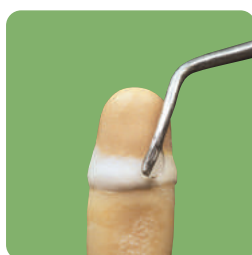



Wolfram Schultis

Wolfram Schultis

Досконалість, що створена із воску!

- Чи повірите ви, що ці моделі зроблено з воску? Разом з Вольфрамом Шультісом ми створили набір з 12 різних восків, які повністю відповідають кольорам натурального зуба. Тому набір моделювальних восків Real Art ідеально підходить для виготовлення демонстраційних об'єктів або для максимально естетичних вакс-апів.



Набір

Арт.№ 02-4500



2 x 8 г

- Прозорий бежевий
- Прозорий світлий дентин
- Опаковий дентин
- Опаковий темно-коричневий
- Опаковий темно-червоно-коричневий
- Опаковий пришийковий
- Прозорий різцевий
- Опаковий білий
- Прозорий сірий
- Прозорий насичено-жовтий
- Прозорий насичено-оранжевий
- Прозорий насичено-блакитний

Арт.№ 02-4510

Арт.№ 02-4520

Арт.№ 02-4530

Арт.№ 02-4540

Арт.№ 02-4550

Арт.№ 02-4560

Арт.№ 02-4570

Арт.№ 02-4580

Арт.№ 02-4590

Арт.№ 02-4600

Арт.№ 02-4610

Арт.№ 02-4620

ВОСКОВІ ІНЗОМИ БЕЗ ГІРЛЯНДИ



- Без гірлянди – оптимальна естетика завдяки повному облицюванню понтіка. Анатомічна форма інзомів спрощує нанесення кераміки. Глибока оклюзійна поверхня дозволяє створювати природні фісури. Завдяки тому, що точки з'єднання перенесені в напрямку до язичної/піднебінної частини, стало можливим відтворення природної глибокої сепарації.

Переваги:

- Економія часу – підвищення продуктивності
- Інзومي різних розмірів. Тому необхідність індивідуальної адаптації знижено до мінімуму
- Оптимальна якість воску та відмінні моделювальні властивості
- Завдяки жорсткості воску виключається деформація конструкції під час знімання

Без гірлянди

Зуб	17-14	12-22	24-27
C			
	25 шт. = 01-0225C 50 шт. = 01-0250C	25 шт. = 01-0325C 50 шт. = 01-0350C	25 шт. = 01-0125C 50 шт. = 01-0150C
B			
	25 шт. = 01-0225B 50 шт. = 01-0250B	25 шт. = 01-0325B 50 шт. = 01-0350B	25 шт. = 01-0125B 50 шт. = 01-0150B
A			
	25 шт. = 01-0225A 50 шт. = 01-0250A	25 шт. = 01-0325A 50 шт. = 01-0350A	25 шт. = 01-0125A 50 шт. = 01-0150A
A			
	25 шт. = 01-0525A 50 шт. = 01-0550A	25 шт. = 01-0625A 50 шт. = 01-0650A	25 шт. = 01-0425A 50 шт. = 01-0450A
B			
	25 шт. = 01-0525B 50 шт. = 01-0550B	25 шт. = 01-0625B 50 шт. = 01-0650B	25 шт. = 01-0425B 50 шт. = 01-0450B
C			
	25 шт. = 01-0525C 50 шт. = 01-0550C	25 шт. = 01-0625C 50 шт. = 01-0650C	25 шт. = 01-0425C 50 шт. = 01-0450C
Розмір	47-44	42-32	34-37

Всі ілюстрації оригінального розміру.

Асортимент

3 шт., разом – 54 інзими

Арт.№ 01-3001

10 шт., разом – 180 інзомів

Арт.№ 01-3002

20 шт., разом – 360 інзомів

Арт.№ 01-3003

Упаковки

25 шт.

50 шт.

100 шт.

ВОСКОВІ ІНЗОМИ З ГІРЛЯНДОЮ



Керамічні шари обмежуються язичною/піднебінною гірляндою, що дозволяє економити час та точно наносити керамічну масу.

Зуб	17-14	12-22	24-27
C			
	25 шт. = 01-3125C 50 шт. = 01-3150C	25 шт. = 01-3225C 50 шт. = 01-3250C	25 шт. = 01-3025C 50 шт. = 01-3050C
B			
	25 шт. = 01-3125B 50 шт. = 01-3150B	25 шт. = 01-3225B 50 шт. = 01-3250B	25 шт. = 01-3025B 50 шт. = 01-3050B
A			
	25 шт. = 01-3125A 50 шт. = 01-3150A	25 шт. = 01-3225A 50 шт. = 01-3250A	25 шт. = 01-3025A 50 шт. = 01-3050A
A			
	25 шт. = 01-3425A 50 шт. = 01-3450A	25 шт. = 01-3525A 50 шт. = 01-3550A	25 шт. = 01-3325A 50 шт. = 01-3350A
B			
	25 шт. = 01-3425B 50 шт. = 01-3450B	25 шт. = 01-3525B 50 шт. = 01-3550B	25 шт. = 01-3325B 50 шт. = 01-3350B
C			
	25 шт. = 01-3425C 50 шт. = 01-3450C	25 шт. = 01-3525C 50 шт. = 01-3550C	25 шт. = 01-3325C 50 шт. = 01-3350C
Розмір	47-44	42-32	34-37

Всі ілюстрації оригінального розміру.

Упаковки

25 шт.

50 шт.

100 шт.

Асортимент

3 шт., разом – 54 інзими


Арт.№ 01-3010

10 шт., разом – 180 інзомів

Арт.№ 01-3012

20 шт., разом – 360 інзомів

Арт.№ 01-3014

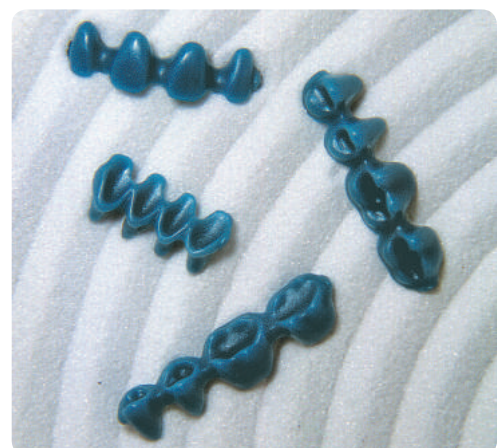

ПОШТУЧНІ ІНЗОМИ



Всі (пре-) моляри, які зображені на сірому фоні, є в наявності у вигляді інзомів з отвором.

Упаковки

15 шт.
30 шт.
100 шт.

Зуб	17/16	13	12	11	21	22	23	26/27	
B									
A									
A									
B									
Розмір	47/46	45	44	43	33	34	35	36/37	

Всі ілюстрації оригінального розміру.

Асортимент

Стартовий набір, 144 шт.

Арт.№ 01-4441

10 штук кожного = 360 шт.

Арт.№ 01-4444

20 штук кожного = 720 шт.

Арт.№ 01-4446

- ▶ Анатомічна форма
- ▶ Широкі апроксимальні точки з'єднання для фіксації без внутрішніх напружень.
- ▶ Зменшена кількість форм (18 форм) = невеликі складські запаси = економія коштів.
- ▶ 2 різних розміри (А+В).
- ▶ Також для бічної ділянки доступні інзони з отвором.



ІНЗОМИ З ОТВОРОМ



Асортимент

3 шт., разом = 144 шт.

Арт.№ 01-4441Н

10 шт., разом = 180 шт.

Арт.№ 01-4444Н

20 шт., разом = 360 шт.


Арт.№ 01-4446Н

- ▶ Зниження ваги до 45%.
- ▶ Зручні для пацієнта завдяки незначній кількості металу.
- ▶ Вільна від механічних напружень конструкція і при цьому майже такий самий об'єм литва між коронками та восковими понтками.
- ▶ Дуже проста робота. Пустоти заповнюються керамічною масою і спікаються у звичайний спосіб.



ФІКСУЮЧИЙ ВІСК

- Липкий постійно м'який віск для закріплення воскових мостів.

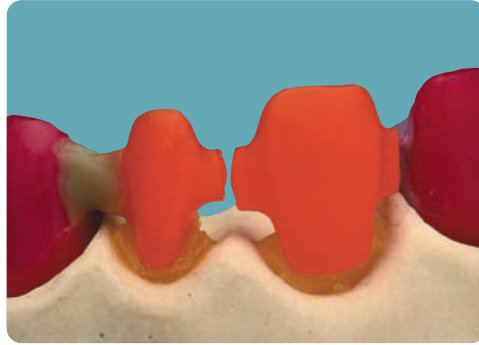

✓ ash-free

60 г
Жовтий

52°C
Арт.№ 02-1470

WAX OCCLUSAL PATTERNS, ОКЛЮЗІЙНІ ЗАГОТОВКИ ВОСКОВІ

- ► Створюються з точною відповідністю до природних зубів
- Створюються відповідно до натуральної моделі
- Універсальний розмір для легкого використання в кожній ситуації
- Спеціальний віск з відмінними моделювальними властивостями



✓ ash-free

Асортимент

4 x15 шт.

Арт.№ 01-6000

Набори

25 оклюзійних шаблонів для кожного квадранта зубного ряду та асортимент з 4 x15 оклюзійних шаблонів.

Упаковки

Форма 14-17
Форма 24-27
Форма 44-47
Форма 34-37

Арт.№01-6010
Арт.№01-6020
Арт.№01-6030
Арт.№01-6040

WAX UPS, ВОСКОВІ ВІНІРИ

✓ ash-free

Форми ▼	13	12	11	21	22	23
OK A						
OK B						
OK C						
OK D						
OK E						
UK						
Зуб ▶	43	42	41	31	32	33

- З восковими вінірами компанії **al dente** ви можете суттєво заощадити свій час при моделюванні діагностичних вакс-апів. В наявності – набори з 5 форм для верхньої щелепи та 1 форми для нижньої щелепи. Чистий повністю органічний віск, який також підходить до систем прес-кераміки.

Асортимент

Складається з 5 наборів вінірів усіх форм та 1 банки моделювального воску для вакс-апів. **Арт.№ 01-5000**

60 г

Бежевий моделювальний віск для вакс-апів.

Арт.№ 01-5010



Упаковки вінірів
10 шт.

- Ефективні вакс-апи компанії **al dente**, які економлять ваш час.


ЗУБОТЕХНІЧНЕ ЛИТВО

Профілі кламерів 200 шт./уп.


A-1	Арт.№ 06-1400
A-2	Арт.№ 06-1410
A-3	Арт.№ 06-1420
A-4	Арт.№ 06-1430
A-5	Арт.№ 06-1440

A-1: кламери для премолярів
A-2: кламери для молярів
A-3: зігнуті кільцеві кламери
A-4: прямі кільцеві кламери
A-5: кламери Боніхард


- Віск відмінної якості та однорідного кольору. Беззольні воски можна адаптувати до моделі без виникнення механічних напружень. Маркування можна легко бачити завдяки прозорості воску.

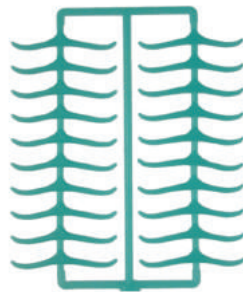


A-1

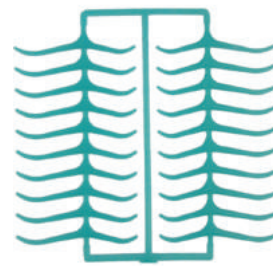


A-2

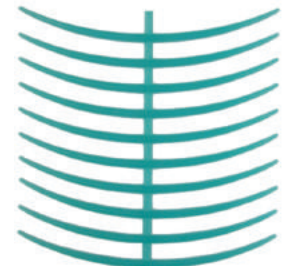

A-3

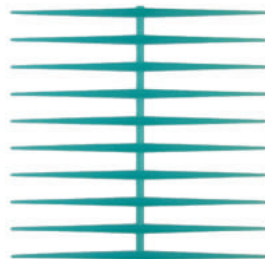

A-4

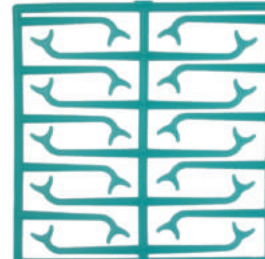


A-5

ПЛАСТИНИ ЛИВАРНІ


- Розмір пластини 75x150 мм Товщина пластини 0.3-0.6 мм 15 шт./уп.




Ливарний віск,
гладкий

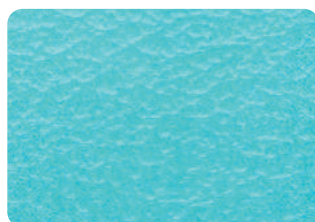

Ливарний віск,
дрібнозернистий

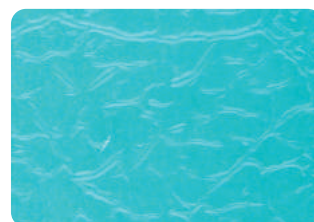

Ливарний віск,
крупнозернистий

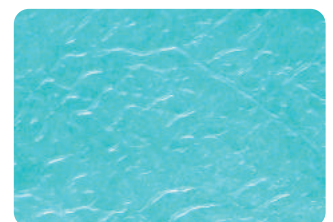

Ливарний віск,
фактурний


0.30 мм	Арт.№ 06-1030
0.35 мм	Арт.№ 06-1035
0.40 мм	Арт.№ 06-1040
0.50 мм	Арт.№ 06-1050
0.60 мм	Арт.№ 06-1060

0.30 мм	Арт.№ 06-1130
0.35 мм	Арт.№ 06-1135
0.40 мм	Арт.№ 06-1140
0.50 мм	Арт.№ 06-1150
0.60 мм	Арт.№ 06-1160

0.30 мм	Арт.№ 06-1230
0.35 мм	Арт.№ 06-1235
0.40 мм	Арт.№ 06-1240
0.50 мм	Арт.№ 06-1250
0.60 мм	Арт.№ 06-1260


0.30 мм	Арт.№ 06-1330
0.35 мм	Арт.№ 06-1335
0.40 мм	Арт.№ 06-1340
0.50 мм	Арт.№ 06-1350
0.60 мм	Арт.№ 06-1360

ВОСКОВІ РЕТЕНЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ

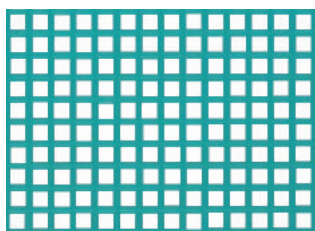


Ретенційна пластина з рівними чарунками

20 листів Арт.№ 06-1500

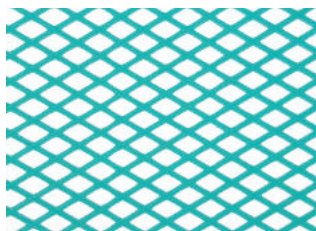

Ретенційна пластина з діагональними чарунками

20 листів Арт.№ 06-1510

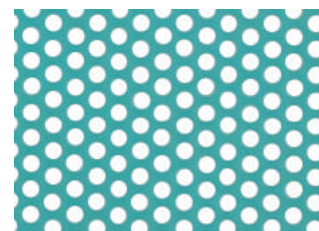

Ретенційна пластина з круглими чарунками

20 листів Арт.№ 06-1520



Ретенційна смужка

10 листів Арт.№ 06-1530



Пряма перфорована ретенційна смужка

40 шт. Арт.№ 06-1540




Ретенційна смужка зі зміщеними перфораціями

40 шт. Арт.№ 06-1550



Балки для нижньої щелепи

4x2 мм – 65 г
Арт.№ 06-1600

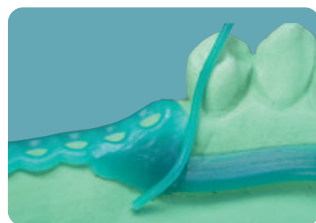

Дугові профілі

0.6 мм – 12 г Арт.№ 06-1620
0.8 мм – 25 г Арт.№ 06-1630
1.0 мм – 37 г Арт.№ 06-1640
1.2 мм – 50 г Арт.№ 06-1650

ЛИВАРНИЙ МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК

- Моделювальний віск має таку ж консистенцію, як і шаблони, завдяки цьому можна створити гармонійну модель. Немає необхідності в додатковій механічній обробці восків.



60 г

53°C
Арт.№ 06-1700

BLOCK-OUT WAX, ВІСК ДЛЯ БЛОКУВАННЯ ПІДНУТРІНЬ

- Для блокування піднутрinių в моделях при ливарних роботах. Віск для піднутрinių компанії al dente міцно фіксується до гіпсу і його легко зішкрябати. Він містить неорганічні речовини і тому не підходить для використання в якості ливарного воску.



60 г

51°C
Арт.№ 02-1480

ЛИВАРНИЙ ВІСК

0.5 мм/32 шт.

Арт. № 06-1750



- Самоадгезивний підготовчий віск для створення язичних кламерів та сідлової частини протезного ложа. Точно адаптується до поверхні моделі, має адгезію і до вологих моделей.

ВОСКОВИЙ ДРІТ



- Дротовий віск компанії **al dente** позбавлений пружності, йому можна надавати будь-яку форму, він не перетискається і не тріскається. Наявний в двох різних ступенях жорсткості.

Котушка 250 г
Блакитний/середньої
жорсткості

2.5 мм
3.0 мм
3.5 мм
4.0 мм
5.0 мм

Арт.№ 02-2010
Арт.№ 02-2020
Арт.№ 02-2030
Арт.№ 02-2040
Арт.№ 02-2050

Котушка 250 г
Зелений/жорсткий

2.5 мм
3.0 мм
3.5 мм
4.0 мм
5.0 мм

Арт.№ 02-2010H
Арт.№ 02-2020H
Арт.№ 02-2030H
Арт.№ 02-2040H
Арт.№ 02-2050H

STICKY STICKS, БАЛКИ ДЛЯ ЛИТНИКІВ



Круглі

3.0 мм – 70 г
4.0 мм – 150 г
5.0 мм – 150 г

Арт.№ 02-2210
Арт.№ 02-2230
Арт.№ 02-2240

Квадратні – 70 г

2.3x 2.3 мм

Арт.№ 02-2110



- Круглі чи квадратні? Вибирати вам! У будь-якому випадку спеціальний жорсткий та адгезивний віск, з якого виготовлено STICKY STICKS, спрощує маніпуляції та попереджає викривлення роботи під час її знімання з моделі.


ТРИКУТНІ ЛИТНИКИ



Трикутні литники, жорсткі 100 шт.

Блакитні, литники 5 мм

Арт.№ 02-1850

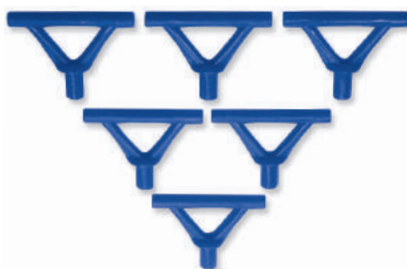

- Готові трикутні литники, які виготовлені з повністю органічних компонентів, згорають без залишків.



ЛИТНИКИ З РЕЗЕРВУАРОМ



- Мають ідеальну форму для литва, в результаті чого ви отримуєте більш однорідну структуру металу без порожнин та усадочних раковин.

Литники «EM» компанії **al dente** з діаметром головки 6-7-8 мм використовуються для сплавів дорогоцінних металів.

Литники «NEM» компанії **al dente** з діаметром головки 7-8-9 мм зі збільшеним поперечним розміром резервуару використовуються для литва у вакуумі, для сплавів з недорогоцінних металів та сплавів з низьким вмістом дорогоцінних металів.

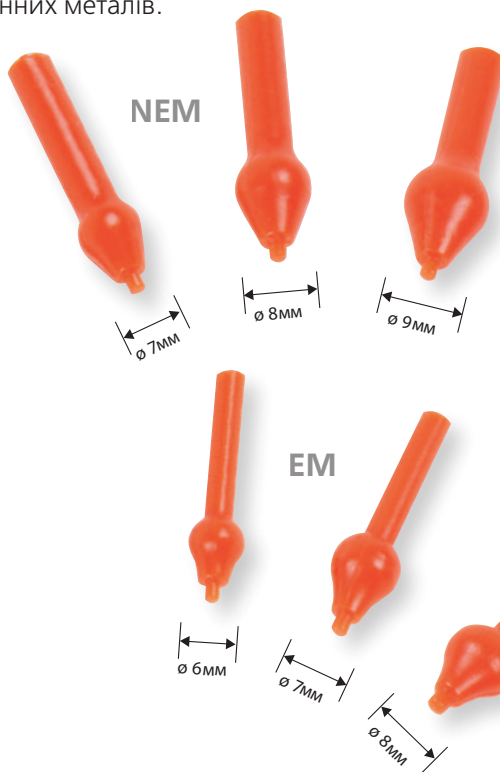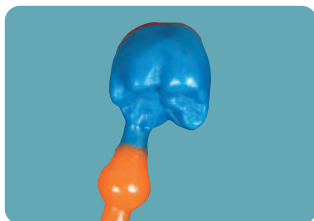

Асортимент

«EM» 6 мм + 7 мм + 8 мм + «NEM»
7 мм + 8 мм + 9 мм – 350 шт.

Арт.№ 02-1860

«EM» 6 мм + 7 мм + 8 мм – 350 шт.

Арт.№ 02-1920

«NEM» 7 мм + 8 мм + 9 мм – 210 шт.

Арт.№ 02-1895

Литники «EM»

«EM» 6 мм – 250 шт.

Арт.№ 02-1900

«EM» 7 мм – 250 шт.

Арт.№ 02-1905

«EM» 8 мм – 200 шт.

Арт.№ 02-1910

Литники «NEM»

«NEM» 7 мм – 150 шт.

Арт.№ 02-1870

«NEM» 8 мм – 150 шт.

Арт.№ 02-1880


«NEM» 9 мм – 120 шт.

Арт.№ 02-1890

Переваги:

- Заміна кулястої форми на більш технологічну конусну має результатом ідеальне протікання металу.
- Завдяки тому, що литник має діаметр 3 мм та ввігнуту форму резервуару, забезпечується легке та економне видалення литників з готової конструкції.
- Отримання в результаті більш гомогенної структури металу без порожнин.
- Найпростіший метод встановлення литників – нанесення воску на кінчик литника. Невеликий діаметр кінчика литника – всього 3 мм – та його ввігнута форма полегшують доступ до каркаса, дозволяють заощадити метал та легко від'єднати відлиту роботу.

ЛИПКИЙ ВІСК

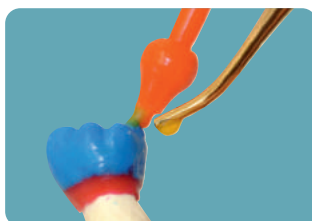

60 °C

Арт.№ 02-1940

БАЗИСНИЙ ВІСК



Дуже жорсткий

- Новий дуже жорсткий базисний віск компанії **al dente** зонайкраще підходить для повних знімних протезів. Він відрізняється високою жорсткістю, стабільністю країв та стійкістю на злам. Ці властивості базисного воску допомагають уникнути деформації воскових протезів навіть під час довготривалих примірок. Дуже жорсткий базисний віск компанії **al dente** легко моделюється і не стає крихким. Його незначна адгезія полегшує постановку гарнітурних зубів.

Точка затвердіння приблизно 65°C

Товщина 1.25 мм

Розмір пластин воску

175 мм x 80 мм

Нормальний/жорсткий

- Базисний віск компанії **al dente** з гармонійним поєднанням бджолиних восків, мікровосків та парафінів відповідає найвищим стандартам. Цей віск не має пружності, відмінно фіксується та не є липким.

Базисний віск компанії **al dente** легко моделюється та ріжеться. Коли воску надається потрібна форма, він тримає її завдяки відсутності пружності. Він має високу адгезію, але не прилипає.

Базисний віск компанії **al dente** випускається 2 видів (нормальний/жорсткий) — для різних температур навколишнього середовища.

Товщина 1.5 мм

Розмір пластин воску

175 мм x 80 мм

Нормальний базисний віск (зима) – 2.5 кг

Арт.№ 02-4010

Нормальний базисний віск (зима) – 500 г

Арт.№ 02-4020

Жорсткий базисний віск (літо) – 2.5 кг

Арт.№ 02-4110

Жорсткий базисний віск (літо) – 500 г

Арт.№ 02-4120

Дуже жорсткий базисний віск – 2.5 кг

Арт.№ 02-4140

Дуже жорсткий базисний віск – 500 г

Арт.№ 02-4150

ПРИКУСНІ ДУГИ

- Вже сформовані прикусні валики для економії часу під час реєстрації прикусу. Анатомічна форма з каналом в основі забезпечує легке встановлення прикусного валика на моделі. В наявності є три різні види прикусних валиків з різними рівнями жорсткості.

Червоні прикусні валики

М'які 100 шт.


Середня жорсткість 100 шт.

Жорсткі 100 шт.

Арт.№ 02-4200

Арт.№ 02-4210

Арт.№ 02-4220

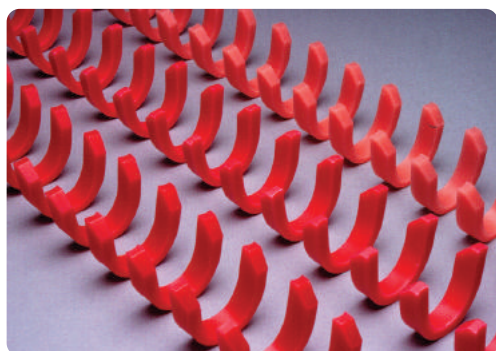

Установочний віск


- Для швидкого та надійного встановлення зубів. Червоного кольору. Легко видаляється за допомогою гарячої води.

3 x 3 мм – 220 г

5 x 5 мм – 220 г

Арт.№ 02-4180

Арт.№ 02-4190

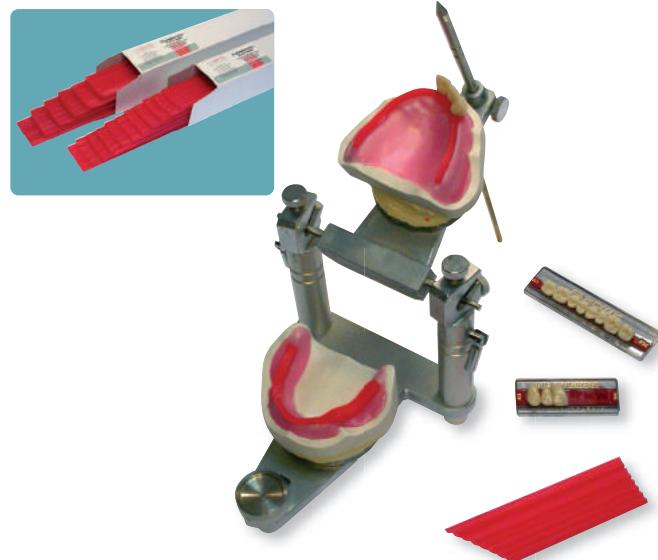

ARCTIC-SERIES ПЕНЗЛИКИ

- Пензлик Kolinsky для спеціалістів з кераміки – це надзвичайна якість, ергономічність та дизайн. Вбудовані металеві кульки допомагають формувати тонкий кінчик пензлика кожного разу, коли ви струшуєте його або плескаєте по ньому. Кінчик пензлика зроблений вручну з високоякісних ворсинок хутра колонка. Спеціальний ковпачок, який постачається в комплекті з пензликом, попереджає викривлення ворсинок, коли пензлик знаходиться у воді.

Ice Tool «Kolinsky» пензлик 1 шт.

Розмір 8	Арт.№ 09-3300
Розмір 6	Арт.№ 09-3310
Розмір 4	Арт.№ 09-3315
Опаковий	Арт.№ 09-3320
Глазурний	Арт.№ 09-3330
Барвники та глазур – розмір 0	Арт.№ 09-3340



ZTM Achim Schaaf, Heusenstamm



ICE TOOL KOLINSKY

- «ICE TOOL 8» – відмінно підходить для комфортного моделювання великих порцій кераміки, а також точного моделювання ріжучого краю та оклюзійних поверхонь.
«ICE TOOL 6+4» – (розмір 6+4) – особливо підходить для нанесення тонких шарів та роботи з барвниками.

Набір Ice Tool «Kolinsky»

6 пензликів у наборі **Арт.№ 09-3380**



ICE TOOL SYNTHETIC

Нове покоління пензликів для кераміки

- В пензлику для кераміки Ice Tool Synthetic втілено нову розробку – високоефективні волокна, які мають властивості натурального хутра у поєднанні з високими вимогами до виробництва сучасних керамічних конструкцій. Завдяки надзвичайно високій пружності щетинок цим пензликом можна взяти навіть незначну кількість керамічної маси. Спеціальні волокна створені таким чином, щоб утримувати велику кількість вологи, а потім передавати її керамічній масі. Кінчик пензлика завжди залишається у первісному вигляді. Якщо після довготривалого використання кінчик треба відновити, це зроблять вбудовані металеві кульки. Пензлик має ергономічну форму ручки, а її плоский кінчик можна використовувати для змішування керамічних порошків. Алюмінієвий ковпачок, який постачається в комплекті з пензликом, попереджає деформацію щетинок під час зберігання пензлика у воді.



Набір «Синтетичний» Ice Tool

6 пензликів у наборі **Арт.№ 09-3580**

Розмір 8	Арт.№ 09-3500
Розмір 6	Арт.№ 09-3510
Розмір 4	Арт.№ 09-3515
Опаковий	Арт.№ 09-3520
Глазур	Арт.№ 09-3530
Барвники та глазур – розмір 0	Арт.№ 09-3540

ПЕНЗЛИКИ ДЛЯ КЕРАМІКИ KOLINSKY

Пензлик – 1 шт.

Розмір 00	Арт.№ 09-3100
Розмір 0	Арт.№ 09-3105
Розмір 01	Арт.№ 09-3110
Розмір 04	Арт.№ 09-3140
Розмір 06	Арт.№ 09-3160
Розмір 08	Арт.№ 09-3180



- Трикутний пензлик для кераміки Kolinsky, зроблений вручну з хутра червоного соболя найкращої якості. Тугі та тонкі щетинки хутра червоного соболя є чудовим резервуаром для рідини. Завдяки відмінним та еластичним кінчикам пензликів, керамічна маса наноситься з їх допомогою точно та рівномірно. Форма ручки пензлика ергономічна, трикутна, тому його легко тримати в руці, і навіть під час тривалої роботи не відчувається симптомів втоми. Завдяки трикутній формі пензлик не скочується зі столу.

ПЕНЗЛИКИ ДЛЯ КЕРАМІКИ SYNTHETIC

Пензлик – 1 шт.

Розмір 00	Арт.№ 09-3200
Розмір 0	Арт.№ 09-3205
Розмір 01	Арт.№ 09-3210
Розмір 04	Арт.№ 09-3240
Розмір 06	Арт.№ 09-3260
Розмір 08	Арт.№ 09-3280



- Цей трикутний пензлик для кераміки має синтетичні щетинки найвищої якості. Кінчик пензлика дуже пружний та має загострену форму. Схвалена спеціалістами ергономічна трикутна форма ручки попереджає скочування пензлика зі столу і дозволяє працювати довгий час без відчуття симптомів втоми.

ТЕКСТУРНИЙ МАРКЕР ДЛЯ КЕРАМІКИ



- Текстурний маркер для кераміки компанії **al dente** використовується для точного відтворення блиску та текстури поверхні керамічної конструкції відносно сусідніх природних зубів. Легко помітити, наскільки гармонійно кераміка вписується в зубний ряд, коли на неї нанесений текстурний маркер. Текстурний маркер для кераміки представлений в двох кольорах: золотистий та сріблястий. Маркер вже змішаний і готовий до використання. Не треба додатково застосовувати праймер або подібний продукт. Цей маркер представляє собою пляшечку з пензликом – ваше робоче місце завжди залишиться чистим. Текстурний маркер для кераміки легко видалити за допомогою води або струменя пари.

Набір текстурних маркерів для кераміки

Золотистий + Розріджувач 2 x 20 мл
Сріблястий + Розріджувач 2 x 20 мл
Розріджувач

Арт.№ 03-1250
Арт.№ 03-1260
Арт.№ 03-1280



ІЗОЛЮЮЧА РІДИНА ДЛЯ КЕРАМІКИ

- Надзвичайно ефективна ізоляція гіпсу від кераміки. Наноситься дуже тонким шаром. Довготривалий ізоляційний ефект. Не забарвлює кераміку. Немає залишків.



Набір

2 x 20 мл

Арт.№ 03-1150

AQUA SPACER – CAD/CAM, ВОДОРОЗЧИННИЙ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЛАК ДЛЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ПРОЦЕДУР


- Лазер-опаківий компенсаційний лак представлений в 4 основних дентинних кольорах (А, В, С, D). Він змивається водою, і тому його можна використовувати для будь-яких робіт із застосуванням системи CAD/CAM та безметалевих керамічних реставрацій. Штампики можна маскувати вибраним відтінком так, щоб колір реставрації не змінювався під час роботи із прозорими цирконієвими каркасами та іншими безметалевими конструкціями. Оскільки шар компенсаційного лаку дуже тонкий, він не впливає на прилягання. Під час обробки лак легко видаляється під струменем проточної води. А тому немає руйнації штампика під дією струменя пари, а також для видалення лаку не потрібно застосовувати шкідливі для здоров'я розчинники.




- ▶ Запечатайте штампик за допомогою Pro-Die Hardener.



- ▶ Вкрийте штампик лаком. Товщина шару: приблизно 15 мкм. За необхідності нанесіть 2 шари.

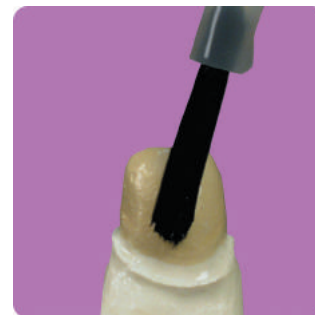

- ▶ Почекайте 15 хвилин, щоб лак висох, а потім нанесіть спеціальний сепаратор.

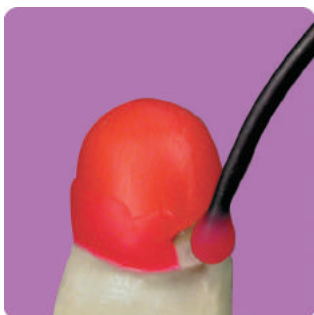

- ▶ Змодельуйте коронку з воску для безметалевої кераміки.



- ▶ Змийте водорозчинний компенсаційний лак під струменем води. Помістіть коронку на штампик.



- ▶ Готові керамічні коронки без зміни кольору, яка може виникати внаслідок використання насичених кольорових компенсаційних лаків.

Лак на водній основі А – 20 мл NEW
 Лак на водній основі В – 20 мл NEW
 Лак на водній основі С – 20 мл NEW
 Лак на водній основі D – 20 мл NEW
 Сепараційна рідина для лаку на водній основі – 20 мл
 Розріджувач для лаку на водній основі – 20 мл

Арт.№ 03-4110
 Арт.№ 03-4120
 Арт.№ 03-4130
 Арт.№ 03-4140
 Арт.№ 03-4160
 Арт.№ 03-4170

PRO-DIE HARDENER, ЗАТВЕРДЖУВАЧ ГІПСУ

Pro-Die Hardener 2 x 20 мл

Прозорий (0 мкм) Арт.№ 03-2020
Розріджувач 2 x 20 мл Арт.№ 03-2190



- PRO-DIE HARDENER (0 мкм) використовується для затвердіння, запечатування поверхні та захисту штампики та уступа. Не створює шару на поверхні. Повністю абсорбується гіпсом.

PRO-DIE SPACER, КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЛАК

Прозорий (3 мкм) Арт.№ 03-2000
Червоний (7 мкм) Арт.№ 03-2040
Опаковий блакитний, (7 мкм) Арт.№ 03-2060
Опаковий бежевий, (7 мкм) Арт.№ 03-2070
Опаковий сріблястий, (12 мкм) Арт.№ 03-2090
Опаковий золотистий, (12 мкм) Арт.№ 03-2100
Розріджувач 2 x 20 мл Арт.№ 03-2190



- Лаки PRO-DIE спеціально розроблені для задоволення вимог зубних техніків. Вони відзначаються:
 - ▶ Коротким часом висихання
 - ▶ Високою остаточною твердістю
 - ▶ Стійкістю до випаровування
 - ▶ Високою покривною здатністю

CHAMEO DIE SPACER, КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЛАК З ІНДИКАТОРОМ ВИСИХАННЯ

Червоний → Фіолетовий (7 мкм) Арт.№ 03-1980
Розріджувач 2 x 20 мл Арт.№ 03-2190



- Ви коли-небудь бачили, щось подібне? DIE SPACER, який показує коли можна продовжувати роботу зі штампилом. CHAMEO DIE SPACER змінює колір з червоного на фіолетовий під час висихання.



Червоний – ще не висох.



Фіолетовий – вже висох.
Можна продовжувати обробку.

Етапи роботи зі штампилом:

- ▶ Очистіть межу препарування та помітьте її
- ▶ Нанесіть затверджувач (0 мкм) на підготовлену межу препарування, щоб зафіксувати її краї
- ▶ Нанесіть PRO-DIE або PRO-LUX SPACER приблизно на 1 мм межі препарування
- ▶ Дайте штампику висохнути протягом кількох хвилин

Увага: Штампик повинен бути чистим та сухим

- ▶ Його поверхню не потрібно обробляти праймером на основі цианоакрилатів
- ▶ Нанесіть компенсаційний лак світлового затвердіння якнайтоншим шаром

PRO-LUX SPACER, ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЙНИЙ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЛАК

- Фотополімеризаційний PRO-LUX DIE SPACER компанії **al dente** має переконливі переваги:
 - ▶ PRO-LUX полімеризується протягом 90 секунд будь-яким полімеризатором (показник кольору - 78) або стробоскопом.
 - ▶ PRO-LUX полімеризується і стає твердим, як скло, але не стає крихким.
 - ▶ PRO-LUX не руйнується під дією пари з пароструменевих апаратів.
 - ▶ PRO-LUX відмінно підходить для запечатування промивної частини моделі.

Більше не треба хвилюватися, що керамічні шари відламуються – їх можна легко видалити з моделі.



PRO-LUX SPACER 20 мл


Прозорий (10 мкм)
Прозорий червоний
(10 мкм)

Арт.№ 03-2200

Арт.№ 03-2210

PRO SEAL, ПОКРИВНИЙ ЛАК ДЛЯ ВОСКУ

- PRO SEAL для запечатування воску наноситься на оклюзійні поверхні роботи перед формуванням в опоку (час висихання – 5 хвилин). Завдяки PRO SEAL (товщина приблизно 5 мкм) вирівнюються маленькі поверхневі подряпини та нерівності. Можна наносити PRO SEAL лише на контактні точки. Після нанесення цього лаку робота виглядає відполірованою. Після відливки поверхня стає більш однорідною, таким чином зменшується час обробки конструкції.

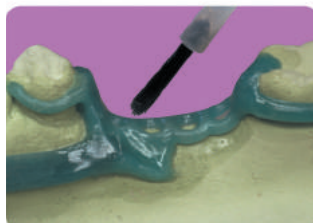

PRO SEAL 20 мл

Пляшка з пензликом
Розріджувач

Арт.№ 03-2300

Арт.№ 03-2310

Набір PRO SEAL 2 x 20 мл

Віск для запечатування
+ Розріджувач

Арт.№ 03-2320

COLLOIDAL GRAPHITE, МАРКЕР ПОВЕРХНІ ДЛЯ ЗАМКОВИХ КРІПЛЕНЬ

- Можна легко побачити дефекти, якщо нанести тонкий шар рідини на матрицю чи патрицю атачмена – це спростить підгонку.



Пляшка з пензликом 20 мл

Розріджувач 20 мл

Арт.№ 03-1300

Арт.№ 03-1310

CONTACT MARKER, МАРКЕР КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ (РІДКА КОПІРКА)

CONTACT MARKER 2 x 20 мл

Блакитний (3 мкм)	Арт.№ 03-1200
Білий (3 мкм)	Арт.№ 03-1205
Червоний (3 мкм)	Арт.№ 03-1210
Розріджувач 2 x 20 мл	Арт.№ 03-1220



- Являє собою пігментовану (3 мкм) рідину з низькою в'язкістю для візуалізації дефектів припасовки коронок, вкладок та атачментів. CONTACT MARKER утримується на всіх матеріалах, таких як метал, гіпс або пластик. Наноситься тільки один шар CONTACT MARKER. Він легко змивається водою. Випускається маркер трьох різних кольорів.

OCCUSAL SPRAY, ОКЛЮЗІЙНИЙ СПРЕЙ

Окклюзійний спрей

Зелений – 75 мл	Арт.№ 03-1230
Білий – 75 мл	Арт.№ 03-1240
Червоний – 75 мл	Арт.№ 03-1245



- Коли ви використовуєте окклюзійний спрей компанії **al dente**, можна швидко знайти точки надлишкового тиску.
 - ▶ Економічний.
 - ▶ В комплект входить додаткова насадка для найтоншого струменя спрею.
 - ▶ Легко видаляється водою.
 - ▶ Висока точність.
 - ▶ Не забруднює повітря завдяки відсутності хлорфторвуглецю.
 - ▶ Не горючий.

CAD/CAM SPRAY, СПРЕЙ ДЛЯ СКАНУВАННЯ

Світлий бежевий, 400 мл	Арт.№ 03-4200
Світлий бежевий, 5 x 400 мл	Арт.№ 03-4220



- Допомогає під час всіх процедур сканування. Універсальний спрей для всіх CAD/CAM систем для лабораторного застосування.
 - ▶ Простий, зручний та економічний у використанні.
 - ▶ Точно підкреслює деталі уступа і гарантує точне оптичне сканування.
 - ▶ Легко видаляється за допомогою струменя повітря чи води.
 - ▶ Великий об'єм - 400 мл.

ISO-PRO, УНІВЕРСАЛЬНА ІЗОЛЮЮЧА РІДИНА

- Рідина ISO-PRO повністю абсорбується поверхнею гіпсу і не залишає ніякого шару. Вона характеризується надзвичайними добрими ізолюючими властивостями після лише одного нанесення. Не містить спирт, розчиняється у воді, тому ця рідина нейтральна по відношенню до моделювальних восків та формовочних матеріалів. Рідину ISO-PRO можна також придбати у пляшці 250 мл.



Пляшки

2 x 30 мл
250 мл

Арт.№ 03-1100
Арт.№ 03-1110

DEBUBLIZER-PRO, ДЕБУБЛАЙЗЕР ДЛЯ ВОСКУ ТА СИЛІКОНУ

- Рідина, що нейтралізує поверхневий натяг, застосовується для воскових конструкцій та силіконових відбитків. Гарантує відмінне зволоження поверхні між воском та формовочним матеріалом або між відбитковим матеріалом та гіпсовою моделлю. Поверхня гіпсової моделі стає помітно більш гладкою, а кількість повітряних бульбашок зменшується.



Пляшка

1000 мл

Арт.№ 03-2400

Пляшка-спрей

100 мл

Арт.№ 03-2410

LIGHT-CURING TRAY MATERIAL, ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЙНІ ПЛАСТИНИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДБИТКОВИХ ЛОЖОК

- Фотополімеризаційний матеріал для індивідуальних відбиткових ложок з відмінними фізичними властивостями. Легко адаптується на моделі. Дуже стабільний та стійкий до зламу. Представлений у вже сформованих пластинах для верхньої щелепи – прозорих та рожевого кольору.



50 пластин
рожевого кольору
50 пластин прозорих

Арт.№ 03-3035
Арт.№ 03-3045

Технічні дані

Товщина пластини приблизно 2.2 мм
Міцність на вигин 85 Н/мм²
Модуль пружності 5000 Н/мм²
Твердість за шкалою Роквелла 96 HRL

BLOCKOUT, ФОТОПОЛІМЕРНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ БЛОКУВАННЯ ПІДНУТРІНЬ

- Фотополімерний матеріал для блокування піднутрینь з відмінними моделювальними та адгезивними властивостями. Матеріал BLOCKOUT компанії **al dente** полімеризується будь-яким сучасним полімеризатором. Після полімеризації він стає твердим і готовим для обробки.



BLOCKOUT LIQUID

- 4 г**
 BLOCKOUT звичайний, блакитний **Арт.№ 03-3200**
 BLOCKOUT рідкий, блакитний **Арт.№ 03-3240**
- 5 x 4 г**
 BLOCKOUT звичайний, блакитний **Арт.№ 03-3210**
 BLOCKOUT рідкий, блакитний **Арт.№ 03-3250**



FLEXIFORM, СИЛІКОНОВІ ФОРМИ ДЛЯ ОКЛЮЗІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ

Набір

Набір 16 шт. **Арт.№ 04-1000**

або одна форма



- Силіконові форми, які заощаджують час при створенні функціональних оклюзійних поверхонь. Заповніть форму FLEXIFORM моделювальним воском та помістіть на штампик, поки віск не охолов. Закрийте артикулятор, дайте воску повністю затвердіти, а потім вийміть з форми: оклюзійна поверхня готова! Ви заощаджуєте принаймні 5 хвилин. Форма FLEXIFORM також підходить для робіт з керамікою та акриловими пластмасами.



04-1017	04-1016	04-1015	04-1014	04-1024	04-1025	04-1026	04-1027
04-1047	04-1046	04-1045	04-1044	04-1034	04-1035	04-1036	04-1037

Ілюстрації у збільшеному вигляді

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ

ЗУБОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

КРІСТАР
Група компаній

04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/факс: (044) 463.63.37
(044) 463.62.66

info@kristar.ua
www.kristar.ua

Спеціалізоване видання, призначене для лікарів та інших професійних медичних працівників.