

## ШТРИПСИ МЕТАЛЕВІ АЛМАЗНІ

Алмазні штрипси – це сталі смужки з алмазним покриттям, призначені для шліфування реставрацій, а також застосування під час ортодонтчних процедур.

Доступні двох типів абразивності: дрібна (fine) – жовте маркування, середня (medium) – червоне маркування.

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Заведіть алмазну штрипсу в апроксимальну ділянку, повернувши абразивною стороною до тієї поверхні зуба, з якою необхідно працювати (шліфувати чи полірувати). Абразивна сторона смужки має маркування кольором залежно від типу абразивності: середня (medium) – червона, дрібна (fine) – жовта. Для досягнення найкращого результату послідовно використовуйте алмазні штрипси двох типів абразивності від середньої (medium) до дрібної (fine).

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Штрипси призначені для одноразового використання. Повторне застосування може стати причиною перехресного інфікування.
- Не використовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів.
- Контакт штрипси з поверхнею ясен може призвести до травмування. З метою уникнення травмування ясенного сосочка рекомендовано захистити його клином або іншим способом.

#### МЕХАНІЗМ ДІЇ

Завдяки тертю абразивної сторони алмазної штрипси по поверхні зуба відбувається стирання (зрізання) реставраційного матеріалу, що забезпечує належну обробку реставрації.

#### СКЛАД

Нержавіюча сталь, алмази.

#### ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте у сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів.



Штрипси призначені для одноразового використання.

Дата внесення змін в інструкцію: 02-2017.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp.Técн. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220043

+55 47 3395-6115

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна

тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua