

# ПРЕСТИЖ БАЙТ КАД КАМ

## PRESTIGE BITE CAD CAM

Prestige Bite CAD CAM (Престиж Байт КАД КАМ) – новий вдосконалений вінілполісилоксановий матеріал серії Prestige Bite (Престиж Байт) для реєстрації прикусу при виконанні робіт з використанням систем CAD CAM (КАД КАМ) для оптичного, лазерного і тактильного сканування.

Завдяки своєму спеціальному інноваційному складу матеріал створює якнайповнішу інформативність даних, отриманих у результаті тривимірного сканування.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тиксотропність – не тече.
- Сумісність із системами CAD CAM (КАД КАМ): оптичного, лазерного і тактильного сканування.
- Швидке твердіння.
- Максимальна точність передачі деталей без спотворень завдяки поглинанню / рефракції світла, що дає змогу програмам створювати точні зображення.
- Оптимальна кінцева твердість за Шором (A): 95.
- Стабільність розмірів.

Додаткове використання двоокису титану не є необхідним. Опаковість, колір та жорсткість матеріалу дають можливість оператору перевіряти результати та забезпечують простоту роботи. Ступінь віддзеркалення поверхні забезпечує ідеальне зчитування оптичних даних.

Призначений для використання лише в стоматології.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Співвідношення база-катализатор	1:1
Робочий час*	30 секунд
Час твердіння у порожнині рота*	60 секунд
Відтворення деталей	2 мкм
Стабільність розмірів через 24 години	- 0,05%
Твердість	95 за Шором (A)
Колір	Світло-зелений

\*Зазначений час рахується з фази замішування матеріалу при температурі 23°C. Вищі температури скорочують робочий час, а низькі температури – збільшують.

### ПІДГОТОВКА ДИСПЕНСERA – ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ

- Зберіть диспенсер. Перед встановленням змішувальної насадки переконайтеся, що обидва компоненти (базовий матеріал та катализатор) рівномірно видавлюються з картриджа, для цього злегка натисніть на ручку диспенсера.
- Після того, як картридж встановлено на диспенсер, зніміть та утилізуйте заводську кришку. Конструкція картриджа для змішування у новому дизайні запобігає забрудненню двох матеріалів (базового та катализатора) після першого використання.
- Встановіть змішувальну насадку (провертаючи її на 1/4 оберту). Дозування та замішування матеріалу виконуються автоматично за допомогою змішувальної насадки, що встановлюється на картридж.
- Внесіть матеріал безпосередньо на попередньо висушені оклюзійні поверхні. Завдяки високій тиксотропності матеріал не розповзається. Лікар має можливість контролювати кількість матеріалу, що видавлюється.
- Згідно з традиційною методикою, попросіть пацієнта зімкнути щелепи. Короткий час твердіння дозволяє мінімізувати ризик виникнення помилок при реєстрації прикусу, а також забезпечити комфорт пацієнту.
- Після повної полімеризації, відбиток оклюзійних поверхонь відправляється у зуботехнічну лабораторію, спеціального поводження відбиток не потребує.
- Такі властивості матеріалу, як висока деталізація, стабільність та твердість, забезпечують зручну роботу з ним у зуботехнічній лабораторії.
- Після використання залишайте змішувальну насадку на картриджі, не знімаючи її до наступного застосування. Матеріал усередині насадки полімеризується, утворюючи таким чином своєрідний природний ковпачок для картриджа.
- Для наступного застосування того ж самого картриджа перед змішуванням зніміть використану змішувальну насадку (провертаючи її на 1/4 оберту).
- Переконайтеся, що база та катализатор вільно видавлюються.
- Встановіть нову змішувальну насадку та виконайте реєстрацію прикусу.
- НІКОЛИ не встановлюйте оригінальну кришку знову на картридж.
- Використовуйте тільки спеціальні змішувальні насадки, що постачаються з Prestige Bite CAD CAM (Престиж Байт КАД КАМ).
- У періоди між змішуваннями, зберігайте диспенсер з встановленою насадкою так, щоб насадка була повернена донизу.

## ДЕЗИНФЕКЦІЯ ВІДБИТКА

Відбиток можна дезінфікувати без ризику деформації, використовуючи звичайні засоби для дезінфекції та дотримуючись вказівок їхнього виробника.

## ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Prestige Bite CAD CAM (Престиж Байт КАД КАМ) слід використовувати, уважно дотримуючись інструкцій виробника. Будь-яке інше використання, не передбачене у цьому документі, є виключно відповідальністю користувача.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Уникайте контакту відбиткового матеріалу з очима. У випадку контакту з очима промийте їх ретельно чистою водою та одразу зверніться до офтальмолога.
- Матеріал може викликати алергічні реакції у чутливих людей. У разі сумніву, проконсультуйтеся з алергологом. У разі виникнення гострих алергічних реакцій під час лікування, одразу припиніть роботу з матеріалом.

## УВАГА

Твердіння вінілполісилоксану може сповільнитися через контакт матеріалу з латексними рукавичками. Уникайте прямого контакту латексних рукавичок з ретракційною ниткою та матеріалом.

Рекомендується ретельно мити руки, щоб видалити будь-які сліди забруднення або використовувати вінілові рукавички.

Вінілполісилоксан – хімічно стійкий матеріал, тому не допускайте його потрапляння на одяг, зокрема й на лабораторний спецодяг.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбитки при кімнатній температурі. Гарантований термін придатності матеріалу Prestige (Престиж): 36 місяців з дати виробництва за умови правильного зберігання. Зберігайте матеріал надійно закритим у прохолодному сухому місці при температурі 4°C – 28°C. Тримайте якомога далі від джерел тепла, іскор та відкритого полум'я.

Термін придатності зазначений для продукту, що зберігається саме у нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Номер партії та термін придатності зазначені на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для ідентифікації товару.

**ВАЖЛИВО:** Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

## УПАКОВКА

Код товару/Опис                    055015 – 100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл) + 12 змішувальних насадок  
   055215 – 100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл)  
   055415 – 10 картриджів по 50 мл (база + каталізатор)

Дата останнього оновлення інструкції: 08.2020



Уповноважений представник в Україні:  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«КРИСТАР-ЦЕНТР»  
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна  
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua  
kristar.ua

### VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY  
Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail: [info@vanninidental.com](mailto:info@vanninidental.com) [www.vanninidental.com](http://www.vanninidental.com)

### ВАНІНІ ДЕНТАЛ ІНДАСТРІ Ес.Ар.Ел.

Via di Campigliano 55/A, 50012 Grassina, Firenze, Italia  
Тел: +39 055 644698; Факс +39 055 644697

E-mail: [info@vanninidental.com](mailto:info@vanninidental.com) [www.vanninidental.com](http://www.vanninidental.com)