

GC TISSUE CONDITIONER ДжіСі ТІШЬЮ КОНДИЦІОНЕР

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

МАТЕРІАЛ ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ ТКАНИН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ДЛЯ ПЕРЕБАЗУВАННЯ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ

1. Кондиціювання тканин ротової порожнини.
2. Тимчасове перебазування.
3. Зняття функціональних відбитків.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не використовуйте цей матеріал для пацієнтів з алергією на мономер метакрилата, полімер метакрилата, етанол або пластифікатор на основі ефіру аліфатичної кислоти.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. ПІДГОТОВКА

Перевірте стан ротової порожнини пацієнта та протезної конструкції, яку використовує пацієнт. Підгоніть твердосплавним бором поверхні, що не припасовані, почистіть їх та просушіть. Забезпечте утворення достатнього місця для нанесення шару GC TISSUE CONDITIONER (ДжіСі ТІШЬЮ КОНДИЦІОНЕР) товщиною мінімум 1 мм для отримання необхідної еластичності. Нанесіть кокосове масло або вазелін на поверхні, що не призначені для перебазування.

2. ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ/РІДИНИ

Стандартне співвідношення порошку / рідини - 2,4 г / 2 мл (одна порція порошку до 2 порцій рідини). Відміряйте потрібну кількість порошку та рідини у гумову чашку для замішування.

Примітка :

- а) Використання меншої кількості рідини призведе до скорочення гелеподібної фази та утворення суміші більшої в'язкості. Більша кількість рідини призведе до подовження гелеподібної фази та утворення суміші меншої в'язкості.
- б) За певних умов зберігання порошок в пляшечці може частково злипатися. Це не впливає на робочі властивості матеріалу.
- в) Щільно закривайте пляшечки з порошком, рідиною та покривним лаком одразу після використання.

3. ЗАМІШУВАННЯ

Замішуйте порошок з рідиною протягом 30-60 секунд доки суміш не набуде кремopodobної консистенції.

4. НАНЕСЕННЯ

1) Покривний лак може бути використаний у якості бондингового агенту для покращення зв'язування та уникнення можливого відшарування. За допомогою пензлика нанесіть покривний лак лише на місця, де необхідне посилення адгезії. У цьому випадку GC TISSUE CONDITIONER (ДжіСі ТІШЬЮ КОНДИЦІОНЕР) буде неможливо видалити руками.

2) Рівномірно нанесіть суміш на поверхні підготовленого протезу, що підлягають перебазуванню.

Примітка :

- а) Для запобігання налипанню матеріалу зволожите пальці або інструмент водою. Не використовуйте крем або вазелін.
 - б) Уникайте потрапляння надлишків матеріалу у горло пацієнта.
- 3) Встановіть протез у роті. Попросіть пацієнта злегка прикусити його у положенні центральної оклюзії і поворушити губами та нижньою щелепою для надання матеріалу потрібної форми. Через 5 хвилин вийміть протез та перевірте наявність надлишків матеріалу та місць, куди він не потрапив.
- 4) Видаліть надлишки гострим інструментом.

5. ФІНІШНА ОБРОБКА

- 1) Промийте протез від слини під проточною водою. Висушіть повітрям.
- 2) Нанесіть покривний лак на поверхні протезу, які були перебазовані. Ретельно висушіть його повітрям або просто залиште на 4-5 хвилин.

Примітка :

Для покращення крайового прилягання покривний лак можна також нанести на стик GC TISSUE CONDITIONER (ДжіСі ТІШЬЮ КОНДИЦІОНЕР) та протеза.

3) Повторно встановіть протез у ротіву порожнину.

Примітка :

- а) Для зменшення неприємного запаху перед встановленням занурте протез у воду.
- б) Проінструкуйте пацієнта, що очищення перебазованих ділянок протеза потрібно здійснювати пальцями під проточною водою. Використання щітки може пошкодити перебазовані ділянки. Наскільки це можливо, слід утримуватись від застосування спеціальних речовин для чистки протезів протягом тривалого часу.

6. ВИДАЛЕННЯ

Рекомендується видалити або замінити матеріал через кілька днів або тижнів, в залежності від клінічного випадку. GC TISSUE CONDITIONER (ДжіСі ТІШЬЮ КОНДИЦІОНЕР) можна зчистити руками. Використовуйте гострий інструмент або бор для видалення матеріалу з ділянок, де застосовувався бондинговий агент.

ЗБЕРІГАННЯ

Для оптимальних робочих характеристик зберігати у прохолодному та

темному місці при температурі 4-25°C (39,2-77,0°F) подалі від прямих сонячних променів та високої температури.

КОЛЬОРИ

Рожевий, Білий

ПАКОВАННЯ

1. 1-1 Упаковка

Набір містить: Порошок 90г (1), Рідина 90г (101мл) (1), Покривний лак 12г (15мл) (1), Мірна ємність для порошку (1), Пластиковий шприц для рідини №1 (1), Пензлик №7 (1), Пластиковий шпатель (1), Гумова чашка (Велика) (1)

2. Додатково

а. GC TISSUE CONDITIONER (ДжіСі ТІШЬЮ КОНДИЦІОНЕР) порошок 90г (кожного відтінку)

б. GC TISSUE CONDITIONER (ДжіСі ТІШЬЮ КОНДИЦІОНЕР) рідина 90г (101мл)

в. GC TISSUE CONDITIONER (ДжіСі ТІШЬЮ КОНДИЦІОНЕР) покривний лак 12г (15мл)

УВАГА

1. Рідина є легкозаймистою. Не тримайте поблизу джерел займання. Не зберігайте та не використовуйте біля відкритого вогню та за умов високої температури.

2. Використовуйте у приміщеннях, що добре провітрюються. Після використання негайно закривайте кришечкою.

3. Уникайте контакту з очима. При потраплянні у очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.

4. Уникайте прямого контакту рідини, суміші та покривного лаку зі шкірою. У випадку такого контакту видаліть матеріал ватною кулькою або губкою, змоченими у спирті та промийте водою.

5. Покривний лак може пожовтіти з часом, але це не вплине на його робочі властивості.

6. Не змішуйте з іншими матеріалами.

7. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

8. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням:

<http://www.gceurope.com>

Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ:

СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевіряйте їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження.

НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗІНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть систему, щоб запобігати засиханню та накопиченню забруднень. Продезінфікуйте її дезінфікуючим засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров'я відповідно до регіональних/національних вимог.

Небажані ефекти - Звітність

Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним посиланням:

info@kristar.ua

а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental

Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 08/2019



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071,
Україна тел/факс: +380445020091, e-mail:
info@kristar.ua
kristar.ua



ВИРОБНИК
ДжіСі ДЕНТАЛ ПРОДАКТС КОРП
(2-285 Торііаматсу-Чо, Касуга-Ші, Айти 486-0844, Японія)

ПОШИРЮЄТЬСЯ



EU: ДжіСі ЄУРОП Ен.Ві.
Рісьорч Парк, Інтерлевенлаан 33, В-3001 Левен, Бельгія
ТЕЛ: +32 16 74 10 00