

ПРЕСТИЖ МОНОФАЗ

PRESTIGE MONOPHASE

Prestige Monophase (Престиж Монофаз) – полівінілсилоксановий гідрофільний відбитковий матеріал середньої в'язкості (звичайної консистенції) текучий для нанесення безпосередньо на підготовлені ділянки або як матеріал однотипної в'язкості. Тиксотропний, гідрофільний, має ідеальне співвідношення між робочим часом та часом твердіння, високу точність передачі деталей, підвищену розмірну стабільність.

ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт є ідеальним для зняття всіх видів відбитків, що використовуються для виготовлення знімних та незнімних протезів, а також ортодонтичних конструкцій, конструкцій з брекетами, тимчасових конструкцій тощо.

Для використання лише лікарями-стоматологами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ISO 4832 / ADA 19	Тип 2 Звичайна консистенція
Співвідношення база-каталізатор	1:1
Робочий час*	2 хвилини
Час твердіння в порожнині рота*	3 хвилини 30 секунд
Час твердіння*	5 хвилин 30 секунд
Деформація при стисканні	3% – 5%
Відновлення форми	>99.5%
Стабільність розмірів протягом 24 годин	<-0.20%
Твердість за Шором (A)	50
Колір	Зелений

*Відлік зазначених вище часових параметрів збігається з початком замішування при температурі 23°C.

Вища температура прискорює процес, нижча – уповільнює його.

ПІДГОТОВКА ДИСПЕНСERA – ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Повністю відтягніть назад плунжер диспенсера, піднявши розташований знизу чорний звільняючий важіль.
- Підніміть фіксатор картриджа на диспенсері.
- Встановіть картридж V-подібним пазом на його фланці донизу. У такому випадку фіксатор має опуститись без зусиль.
- Після того, як картридж було встановлено на диспенсер, перевірте ковпачок на чверть оберту. Зніміть його, застосувавши адекватне зусилля. Не викидайте ковпачок.
- Переконайтеся, що обидва компоненти (базовий матеріал та каталізатор) рівномірно видавлюються з картриджа. Для цього злегка натисніть на ручку диспенсера, видавивши незначну кількість матеріалу. Після цього ретельно очистіть носики картриджа.
- Міцно приєднайте змішувальну насадку, сумістивши V-подібний паз на кольоровому обідку змішувальної насадки з відповідною позначкою на картриджі. Далі, застосовуючи деяке зусилля саме до кольорового обідка насадки, а не до частини, у якій відбувається замішування двох компонентів, поверніть її на чверть оберту.
- Тепер пристрій готовий до застосування; видавлюйте матеріал, натискаючи на ручку диспенсера з невеликим зусиллям.
- Після використання зніміть насадку та встановіть на місце ковпачок, як описано вище.
- Для установки нового картриджа дотримуйтеся вище наведених вказівок від самого початку.

Відбитки, зняті Prestige Monophase (Престиж Монофаз), можна покривати сріблом або міддю у ванночках для гальванізації.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВІДБИТКА

Після зняття відбитка його потрібно дезінфікувати для повного видалення дрібних часточок матеріалу та слини. Це можна робити, зануривши його у 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може залишатися зануреним у дезінфікуючий розчин протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому ніяких деформацій не відбувається.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛЕЙ

Відливати модель рекомендується не раніше, ніж через 1 годину після полімеризації. Стабільність розмірів відбитка зберігається протягом 7 днів. Матеріали серії Prestige (Престиж) сумісні з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами, наявними на ринку.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбитки при кімнатній температурі. Гарантований термін придатності продукту – 3 роки від дати виробництва за умови правильного зберігання. Зберігайте продукт у прохолодному сухому місці при температурі 4°C – 28°C у герметично закритому контейнері. Тримайте якомога далі від джерел тепла, іскор та відкритого полум'я.

Термін придатності зазначений для продукту, що зберігається саме у нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Номер партії та термін придатності зазначені на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

УВАГА

- Уникайте контакту очей та шкіри з каталізатором.
- У випадку контакту зі шкірою ретельно промийте відповідну ділянку водою з милом.
- У випадку контакту з очима ретельно промийте їх водою та зверніться до лікаря.
- Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте їх потрапляння на одяг, зокрема на лабораторний спецодяг.

УПАКОВКА

Код продукту/Опис 055010 — 100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл) + 12 змішувальних насадок
 055210 — 100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл)
 055410 — 10 картриджів по 50 мл кожний

Останні зміни в інструкцію внесено: 08.2020



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY
Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697
E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com

ВАНІНІ ДЕНТАЛ ІНДАСТРІ Ес.Ар.Ел.

Via ді Кампігліано 55/А, 50012 Грассіна, Флоренція, Італія
Тел: +39 055 644698; Факс +39 055 644697
E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com