

ESTHETIC PLUS

Інструмент для моделювання прямих і непрямих композитних реставрацій.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ОПИС

ESTHETIC PLUS – інструмент, який було розроблено для досягнення легкості та точності моделювання композитів при прямих і непрямих реставраціях.

Комплект містить:

- інструмент з прямою ручкою – полегшує доступ до вестибулярної ділянки передніх та бічних зубів;
- інструмент з кутовою ручкою – дозволяє легше і комфортніше працювати з лінгвальною та палатинальною сторонами передніх або бічних зубів, а також з оклюзійною поверхнею бічних зубів.

Насадки знімні; виготовлені з силікону, до них зовсім не прилипає композит; доступні у чотирьох різних формах. Також є два типи насадок за жорсткістю: hard (сині) і soft (білі).

ESTHETIC PLUS дозволяє сформувати композит і відновити природну анатомію зуба.

ПОКАЗАННЯ

Інструмент ESTHETIC PLUS призначений для прямих і непрямих композитних реставрацій.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Виберіть інструмент і насадку, які якнайкраще підходять для клінічного випадку.
- Зафіксуйте насадку на кінці інструмента. Поверніть насадку для досягнення найкращого положення для роботи.
- Формуйте композит легкими дотиками, починаючи з твердих насадок (синіх) і закінчуючи м'якими (білими).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Рекомендується повна ізоляція операційного поля (кофердам) для уникнення ризику ковтання насадок.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на полісульфон або силікон.
- Після кожного використання силіконові насадки рекомендується очищати спиртом для видалення залишків композиту, а також попередження їх невідповідності для майбутніх процедур.
- Стерилізація може змінити колір насадок, що не пошкоджує їх та не впливає на їхню якість.

- Цей інструмент не слід використовувати з дуже густими композитами, текучими композитами, моделювальними пластмасами, склоіономерними цементами.
- Стерилізувати необхідно лише відповідно до інструкції. Стерилізація іншими засобами може призвести до пошкодження інструмента.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Інструмент можна автоклавувати (126°C, 147 кПа, 16 хв).

Перед стерилізацією необхідно очистити інструменти водою та ензимним очисним засобом.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте в сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів.

СКЛАД

Інструмент: полісульфон.

Насадки soft (білі): силікон, оксид титану.

Насадки hard (сині): силікон, оксид титану, нетоксичний барвник.

Інструмент дозволяється стерилізувати.

Дата внесення змін в інструкцію 09-2016.

TDV Dental Ltd.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944| CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp. Técn. Taís Cúgola Coelho Pereira. CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220051

0800 47 1020 | +55 47 3395-6115

info@tdv.com.br www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua