

Стоматологічний матеріал для очищення кореневих каналів / Гель на основі ЕДТА для обробки кореневих каналів.

Опис

Гель Шур-Преп на основі етилендіамін тетраоцтової кислоти (ЕДТА) – препарат, що має здатність до утворення хелатних сполук, забезпечує ефективне очищення кореневого каналу та полегшує його обробку. Гель містить пероксид карбаміду, що вступаючи у реакцію з гіпохлоридом натрію, сприяє піноутворенню і полегшує видалення залишків пульпової тканини та дентинних ошурків з каналу. Полегшуючи розширення та досягнення прохідності кореневих каналів, гель Шур-Преп покращує проникнення лікарських засобів, що застосовуються при ендодонтичному лікуванні, та пломбувальних матеріалів. Гель Шур-Преп також має змащувальні властивості, завдяки чому підвищується ефективність введення лікарських засобів у кореневий канал.

Склад

15% етилендіамін тетраоцтової кислоти (ЕДТА)

10% пероксид карбаміду, що містить поліпропіленгліколь (ППГ) та поліетиленгліколь (ПЕГ)

Показання до застосування

1. Полегшення обробки та очищення кореневого каналу.
2. Зручне та швидке видалення дентинних ошурків.
3. Сприяння декальцинації дентину.
4. Полегшення інструментальної обробки каналів завдяки змащувальним властивостям.

Спосіб використання

1. Ізолюйте зуб за допомогою кофердаму та забезпечте доступ до пульпової камери.
2. Введіть необхідну кількість гелю Шур-Преп у пульпову камеру або нанесіть гель безпосередньо на файл.
3. Обробіть канал файлом та римером звичайним способом.
4. За потреби повторіть попередню процедуру кілька разів.
5. Обробіть канал гіпохлоритом натрію.

Застереження

1. Для використання лише у стоматології.
2. Не можна вводити препарат за межі апікального отвору кореня зуба.
3. Вводити гель слід обережно, щоб не допустити перфорації кореневого каналу.
4. Після кожного використання завжди щільно закривайте ковпачок.
5. При роботі з препаратом рекомендується одягати захисні рукавички.
6. Не використовуйте препарат після закінчення строку придатності.
7. При випадковому контакті матеріалу з очима чи тканинами порожнини рота, необхідно промити їх великою кількістю води.
8. Тільки для професійного використання лікарями-стоматологами. Дотримуйтесь процедур і запобіжних заходів.
9. Зберігайте у місцях недосяжних для осіб, що не працюють у сфері стоматології, а також дітей, літніх людей та інших осіб.
10. Не використовуйте для пацієнтів, що мають гіперчутливість або алергію на будь-який компонент препарату.

Зберігання

1. У випадку тривалого невикористання препарату для збереження його властивостей, зберігайте гель Шур-Преп у холодильнику.
2. Не можна зберігати в морозильній камері, не заморожувати.
3. Уникати потрапляння прямих сонячних променів.

Символи



Використати до



Код партії



Номер
за каталогом



Медицинський
виріб



Ознайомитися
з інструкцією
з Використання



Температурне
обмеження



Виробник



Знак відповідності
Технічному регламенту
в Україні

Строк придатності

2 роки з дати виготовлення.

Гарантія

«Шур Дент Корпорейшн» замінить продукт, якщо буде доведено, що він непридатний для використання. «Шур Дент Корпорейшн» не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, прямі чи непрямі, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю застосування вказаного продукту. Стоматолог несе відповідальність за визначення придатності продукту перед його використанням за призначенням. Стоматолог бере на себе всі ризики та відповідальність у зв'язку із застосуванням продукту.

Дата останнього перегляду інструкції: 01.06.2024

 SURE DENT CORPORATION
809, 52 Sagimakgol, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Korea
Тел: +82-31-737-4720
Факс: +82-31-737-4724
E-mail: suredent@suredent.com

«ШУР ДЕНТ КОРПОРЕЙШН»
No 809, 52, Sagimakgol-ro, Chungwon-gu,
Sonnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Korea
Тел.: +82-31-737-4720
Факс: +82-31-737-4724
Ел. адреса: suredent@suredent.



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «КРИСТАР-ЦЕНТР», вул. Межигірська,
буд. 50, кв. 2, м. Київ, 04071, Україна
тел: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua,
www.kristar.ua