

# FREEGENOL TEMPORARY PACK

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

БЕЗЕВГЕНОЛЬНИЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ТИМЧАСОВИХ ФІКСАЦІЙ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

## ПОКАЗАННЯ

Цементування тимчасових коронок та мостів.

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

## ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Видавіть на блок для змішування смужки пасти База та Каталізатор однакової довжини.
2. Ретельно змішуйте їх протягом 20-30 секунд.
3. Внесіть пасту у (тимчасову) коронку або міст та встановіть на відпрепарований сухий зуб.
4. Залишіть застигати (3 хвилини від початку змішування), та видаліть надлишки.

## ПРИМІТКИ

1. Час застигання можна регулювати використанням більшої або меншої кількості Бази (чим більше Бази, тим швидше застигання, менше Бази – повільніше застигання). Не виходьте за межі пропорцій База/Каталізатор від 3:2 до 2:3).
2. Якщо матеріал прилипає до зуба або металу, можна додати вазеліну до 25% від загального об'єму суміші.

## ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендовано для оптимальних робочих характеристик, зберігати при температурі 4-25°C (39,2-77,0°F). (Термін придатності: 3 роки від дати виробництва).

## УПАКОВКА

Упаковка 1-1: 55г Бази, 20г Каталізатора, Очисник та, блок для змішування.

## УВАГА

При потрапленні у очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря. Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням: <http://www.gceurope.com/download> Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

Останні зміни внесено : 07/2015

MANUFACTURED  
by GC CORPORATION  
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585,  
Japan  
DISTRIBUTED by  
GC CORPORATION  
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan

CE 0086

GC EUROPE N.V.  
ResearchDPark, Interleuvenlaan 13, BD3001 Leuven,  
Belgium  
GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street, Alpis, IL 60803 U.S.A.  
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.  
19 Loyang Way, #06D27 Singapore 508724

**'GC.'**

1405310GCUA