

Матеріал на основі гідроксиду кальцію та сульфату барію для пломбування кореневих каналів.

Опис

Шур-Пейст – матеріал для пломбування кореневих каналів, для тимчасового перекриття відкритої пульпи та лікування інфікованих кореневих каналів. Препарат також використовується як внутрішньоканальний медикамент. Основні компоненти препарату – гідроксид кальцію та сульфат барію, матеріал рентгеноконтрастний, має антибактеріальний ефект (pH≥12). Шур-Пейст має стабільну форму, не потребує додаткового згущування чи розведення, випускається у вигляді попередньо замішаної пасти рідкої консистенції у зручному шприці. Шур-Пейст також має високу здатність проникнення до апекса та біосумісність з періапикальними тканинами.

Склад

1. Гідроксид кальцію.
2. Сульфат барію.
3. Згущувач.
4. Пропілен-гліколь.
5. Вода.

Функціональне цільове використання

Тимчасове пломбування кореневих каналів під час ендодонтичного лікування

Показання до застосування

1. Лікування інфікованих кореневих каналів.
2. Тимчасове перекриття відкритої пульпи.
3. Дезинфекція каналу після екстирпації пульпи.
4. Пульпарна прокладка після вітальної пульпотомії.

Протипоказання

Не використовувати як матеріал для постійних пломб або фіксуючий матеріал.

Вказівки щодо застосування

1. Після препарування кореневого каналу промийте його та висушіть у звичайний спосіб.
2. Для зручності зміни напрямку насадки використовуйте кільце на шприці.
3. Введіть насадку шприца в устя кореневого каналу.
4. Нанесіть пасту, м'яко і плавно стискаючи поршень. Використовуйте індикатор на шприці.
5. Повністю заповніть канал пастою, натискаючи на плунжер шприца, поступово виведіть насадку з каналу.
6. Видаліть надлишок пасти.
7. Обов'язково повністю видаліть Шур-Пейст перед остаточною обтурацією каналу. Видалення залишків пасти здійснюється за допомогою спеціального розчину та стоматологічних інструментів.
8. Зніміть одноразову насадку зі шприца, щільно закрийте ковпачком. Зберігайте у прохолодному місці.






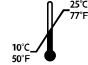


Застереження

1. Для використання лише у стоматології.
2. Для застосування тільки лікарями-стоматологами. Дотримуйтесь процедур і запобіжних заходів.
3. Зберігайте у місцях недосяжних для осіб, що не працюють у сфері стоматології, а також дітей, літніх людей та інших осіб.
4. Не видавлюйте пасту з надмірним зусиллям, оскільки це може викликати больові відчуття у пацієнта.
5. Не виводьте матеріал за межі верхівки каналу кореня зуба, це може викликати запалення, некроз тканин або пошкодження нерва.
6. Уникайте контакту матеріалу зі шкірою, очима та слизовою оболонкою. Контакт гідроксиду кальцію зі шкірою, очима та слизовою оболонкою може спричинити місцеве подразнення та опіки. У випадку контакту матеріалу з очима негайно промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря.
7. Утримуйте шприц зі щільно закритим ковпачком, коли він не використовується.
8. Не використовуйте повторно одноразову насадку після застосування.
9. Не використовуйте для лікування внутрішніх захворювань.
10. Не застосовуйте після закінчення терміну придатності.
11. Не використовуйте для пацієнтів, які мають підвищену чутливість або алергію до матеріалів, що застосовуються під час лікування.
12. Не використовуйте продукт, якщо паста затверділа, відбулося її розшарування або вона містить сторонні речовини.

Умови зберігання

1. Не допускати потрапляння прямих сонячних променів.
2. Зберігати у прохолодному місці (при температурі 10 - 25°C, 50 - 77 °F).

Символи

							
Використати до	Код партії	Номер за каталогом	Медичний виріб	Ознайомитися з інструкцією з використання	Температурне обмеження	Виробник	Знак відповідності Технічному регламенту в Україні

Термін придатності

3 роки з дати виробництва.


Гарантія

«Шур Дент Корпорейшн» замінить продукт, якщо буде доведено, що він непридатний для використання. «Шур Дент Корпорейшн» не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, прямі чи непрямі, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю застосування вказаного продукту. Стоматолог несе відповідальність за визначення придатності продукту перед його використанням за призначенням. Стоматолог бере на себе всі ризики та відповідальність у зв'язку із застосуванням продукту.

Дата останнього перегляду інструкції: 01.06.2024

 SURE DENT CORPORATION
809, 52 Sagimakgoko, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Korea
Тел.: +82-31-737-4720
Факс: +82-31-737-4724
E-mail: suredent@suredent.com

«ШУР ДЕНТ КОРПОРЕЙШН»
No 809, 52, Sagimakgol-ro, Chungwon-gu,
Sonnam-si, Kyonggi-do, 13210, Korea
Тел.: +82-31-737-4720
Факс: +82-31-737-4724
Ел.адреса: suredent@suredent.

 Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «КРИСТАР-ЦЕНТР», вул. Межигірська,
буд. 50, кв. 2, м. Київ, 04071, Україна
тел: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua,
www.kristar.ua