

ШТРИПСИ МЕТАЛЕВІ З ПИЛКОЮ

Абразивна смужка для шліфування апроксимальних ділянок, а також використання під час встановлення ортодонтичних конструкцій. Неабразивна центральна частина штрипси з пилкою призначена для видалення надлишків реставраційного матеріалу з міжзубних проміжків.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Шліфування реставрацій та підготовка при встановленні ортодонтичних конструкцій. Видалення надлишків композитів, адгезивів, цементів з міжзубних проміжків.

ВИКОРИСТАННЯ

Заведіть гладкий центр штрипси в апроксимальну ділянку. Для шліфування реставрацій та підготовки при встановленні ортодонтичних конструкцій виконуйте поздовжні рухи вперед і назад, використовуючи алмазну поверхню штрипси. З метою видалення надлишків реставраційного матеріалу виконуйте такі самі рухи, застосовуючи центральну частину штрипси з пилкою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів.
- Контакт пилки з поверхнею ясен може призвести до їх травмування. Рекомендується захищати ясна.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Можна стерилізувати будь-яким способом. Можна автоклавувати (126°C, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією необхідно провести очищення водою та ензимним очисним засобом.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Абразивна поверхня штрипси забезпечує шліфування реставраційного матеріалу, а також використовується при встановленні ортодонтичних конструкцій. Неабразивна пилка в центральній частині видаляє надлишки композитів, адгезивів та цементів з міжзубного проміжку.

СКЛАД

Нержавіюча сталь, натуральні алмази.

РОЗМІРИ

150 мм x 3 мм x 0.05 мм



Штрипси металеві з пилкою можна стерилізувати.

Дата внесення змін в інструкцію: 03-2014.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp.Técн. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220056

+55 47 3395-6115

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна

тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua