

# G-CEM™ Veneer

Високоестетичний композитний цемент світлової полімеризації із легким внесенням

## Ідеальна текучість



# G-CEM Veneer від GC



## Ідеальна текучість

Естетичний цемент із видатними механічними властивостями та легким внесенням. **G-CEM Veneer** забезпечує незрівнянний естетичний результат для впевненої посмішки. Секрет полягає в оптимально збалансованій формулі з технологією Повноконтурного Силанування Часток наповнювача. Ця інноваційна розробка дозволяє досягти високого рівня наповнення за допомогою однорідного розподілу наповнювачів у матриці. Результат: **полегшене моделювання та вражаючі фізичні властивості**.

## Повноконтурне Силанування Часток

G-CEM Veneer створений з використанням **найновішої інноваційної технології (Повноконтурне Силанування Часток)**.

Поверхня часток майже повністю покрита силановим з'єднувальним агентом, що забезпечує ідеальний зв'язок між наповнювачем і матрицею. Ця нова технологія дозволяє ефективно розподілити **більшу кількість часток (наповнення 69%)**, що призводить до **тиксотропної консистенції**.

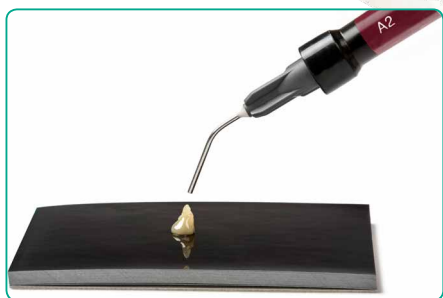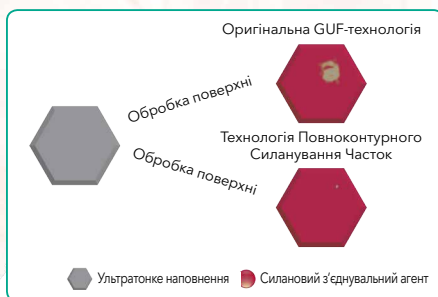

## Переваги тиксотропності

Завдяки новій технології Повноконтурного Силанування Часток, G-CEM Veneer **надзвичайно тиксотропний**. Він не змінює форму та тече лише під дією зовнішнього тиску. Таким чином вся поверхня реставрації покривається рівномірно, без пустот, а товщина плівки мінімальна. **Результат – ідеальна адаптованість!**

Ще одна перевага технології Повноконтурного Силанування Часток: **G-CEM Veneer не липкий**. Тому його легко внести з високою точністю та **легко видаляти надлишки**. Оптимально врівноважена текучість робить цемент особливо зручним та ефективним у порівнянні зі звичайними високотекучими композитами або композитами з попереднім нагріванням.

Унікальна консистенція робить G-CEM Veneer **ідеальним партнером для ваших естетичних реставрацій**.

Конкурент

G-CEM Veneer



## Спростіть складні кроки

Завдяки універсальному праймеру G-Multi PRIMER та універсальному адгезиву G-Premio BOND G-CEM Veneer забезпечує стабільну та довготривалу адгезію до будь-яких типів поверхонь та куски, виготовленої з будь-якого матеріалу. **Фіксація стає по-справжньому стандартизованою.**

### G-Premio BOND

G-Premio BOND - це **дійсно універсальний адгезив** із перевіреною формулою, що з'єднується з **куксою, виготовленою з будь-якого матеріалу**. G-Premio BOND містить три функціональні мономери, щоб з'єднатися з куксою, виготовленою з дентину, емалі, металу чи композиту.

G-Premio BOND можна **використовувати з усіма техніками** травління, рекомендованими для тонких реставрацій, таких як, вініри, вибіркоче травління емалі чи тотальне травління.

Після полімеризації світлом шар адгезиву стає тонким і рівномірним, що дозволяє **досконало адаптувати** реставрацію у будь-який час.

### G-Multi PRIMER

G-Multi PRIMER - **універсальний праймер**, який використовує три різні хімічні агенти, щоб забезпечити ідеальну адгезію за будь-яких умов. Завдяки додаванню силану до праймеру, а не до бонду **забезпечується стабільність адгезії**.



## СТАНДАРТИЗОВАНІ КРОКИ ВНЕСЕННЯ

### 0. Початкова ситуація



Чотири естетичні відтинки

G-CEM Veneer випускається у чотирьох відтинках. Вони ретельно підібрані для задоволення усіх ваших естетичних вимог.

### 1. Примірка реставрації



Прогнозований кінцевий результат

Із Try-in пастою ви легко можете спрогнозувати кінцевий результат. Вона допомагає обрати необхідний відтінок та опаківість.

### 2. Протравлення



Оберіть метод протравлення

Протравіть краї емалі чи застосуйте підхід тотального травління для мінімального препарування, що здебільшого локалізовано в емалі.

### 3. Нанесення G-Premio BOND



Адгезія до усіх поверхонь

Перевірена формула G-Premio BOND забезпечує адгезію до будь-яких матеріалів куски. Він полімеризується окремо та настільки тонкий, що не заважає встановленню реставрації.



## G-CEM Veneer

### Якісна полімеризація

G-CEM Veneer можна ефективно полімеризувати крізь реставрацію <2 мм із достатньою прозорістю. Показаний для композитів та керамічних **вінірів, вкладок і накладок**.

### Надзвичайна зносостійкість



Гладка та блискуча поверхня зберігається тривалий час завдяки високій зносостійкості, **запобігає утворенню крайових сколів і протидіє дисколюванню**. Технологія Повноконтурного Силанування Часток та покращена матриця запобігають втраті часток та забезпечують рівномірне розподілення наповнювача.

### Мінімальна товщина плівки

Переваги міцності в поєднанні з ідеальною текучістю... Відмінна підгонка **без необхідності попереднього нагріву!**

## G-CEM Try-in Paste

Відтинки G-CEM Try-in Paste **ідеально відповідають** чотирьом відтинкам G-CEM Veneer. Вони створені на основі води для легкого видалення після нанесення.

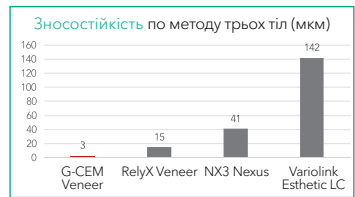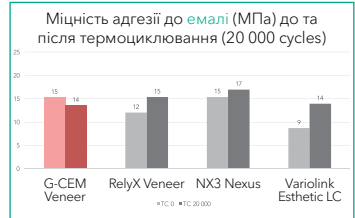

Джерело: GC R&D, Японія. Файл даних.



#### 4. Нанесення G-Multi PRIMER



#### Адгезія до будь-яких каркасів

Після необхідної попередньої обробки (травління чи піскоструменевої обробки) G-Multi PRIMER забезпечує стабільну адгезію до будь-яких каркасів естетичних реставрацій.

#### 5. Фіксація



#### Точне внесення

Тиксотропність та довгий робочий час забезпечують точне внесення.

#### 6. Видалення надлишків



#### Легке очищення

Оптимально полімеризувати світлом протягом 1-2 секунд перед видаленням. Після фінальної полімеризації краї можна легко фінірувати та полірувати до яскравого блиску, щоб мінімізувати утворення зубного нальоту.

#### 7. Кінцевий результат



#### Довговічний результат

Висока стабільність кольору та відмінні механічні властивості забезпечують довготривалий та якісний кінцевий результат.

## Ефект вражає!

### Чудовий результат


G-CEM Veneer є високонаповненим та **має неймовірну зносостійкість**.

Разом із G-Premio BOND та G-Multi PRIMER він забезпечує **високу міцність адгезії для довготривалого та естетичного результату**.

Механічні властивості цього цементу схожі із властивостями пастоподібних композитів, але моделювання G-CEM Veneer значно полегшене завдяки нижчій в'язкості.



З люб'язного дозволу лікаря J Mattiussi, Italia

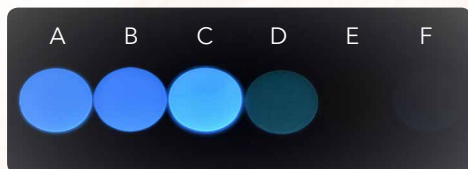

Флюоресценція 0.5 мм дисків. A: G-CEM Veneer; B: Variolink Esthetic; C: Panavia V5; D: NX3 Nexus; E: Calibri; F: RelyX Unicem


### Природна естетика

G-CEM Veneer адаптується до будь-яких прецизійних естетичних випадків, забезпечуючи **природний результат**.


**Флюоресценція** G-CEM Veneer подібна до флюоресценції природних зубів. Реставрація виглядатиме непомітно при будь-якому освітленні.

### Чотири відтінки для усіх випадків


**Чотири відтінки** ретельно підібрані для ідеальної інтеграції кольору у будь-якому випадку. Завдяки Try-in пасті ви можете переконатися, що вибраний відтінок забезпечить бажаний естетичний результат.

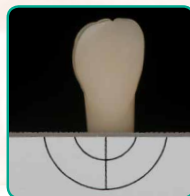

A2

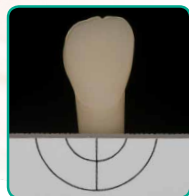

Прозорий

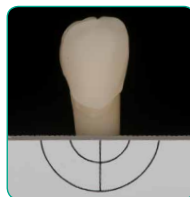

Опак



Відбілений

# G-CEM Veneer від GC

## Унікальне моделювання, неперевершена міцність.



**A2**

Стандартний для фіксації більшості ваших ортопедичних конструкцій



**Прозорий**

Ідеальний для дуже тонких конструкцій, щоб зберегти натуральний відтінок



**Опак**

Використовується для маскування дисколорованих поверхонь там, де це необхідно



**Відбілений**

Використовується для підвищення опакості та яскравості, коли потрібний білосніжний результат

G-CEM Veneer	
<b>G-CEM Veneer Starter Kit</b>	
10001382	2 x G-CEM Veneer (шприци) A2 & TR, 2 x Try-in Paste (шприци) A2 & TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio BOND, 45x насадки голкові
<b>G-CEM Veneer шприц 1 мл (1.7 г) + 10 насадок</b>	
10001387	G-CEM Veneer A2 EEP
10001388	G-CEM Veneer Translucent (TR) EEP
10001389	G-CEM Veneer Opaque (OP) EEP
10001390	G-CEM Veneer Bleach (BL) EEP
<b>G-CEM Try-in paste 1.2 мл (1.5 г)</b>	
10001484	G-CEM Try-in Paste A2
10001485	G-CEM Try-in Paste Translucent
10001486	G-CEM Try-in Paste Opaque
10001487	G-CEM Try-in Paste Bleach
<b>Споріднені продукти</b>	
10003735	GC голкові насадки (подовжені) (30 шт.)
10001350	GC G-Multi PRIMER 5 мл
10001462	GC G-Premio BOND, пляшечка 5 мл EEP

G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER та G-Premio BOND є торговою маркою GC. Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem та Variolink Esthetic DC не є торговою маркою GC.



**Завантажте наш GC Luting Guide**  
для покрокових інструкцій для кожного варіанту фіксації.



### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax. +32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

### GC EUROPE N.V.

GCEEO Ukraine  
04071, м. Київ,  
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10  
Тел. (044) 463.62.66  
info.ukraine@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/uk-UA>

Офіційний дистриб'ютор  
компанії GC в Україні:  
Група компаній "КРИСТАР"  
04071, м. Київ,  
вул. Межигирська, 50, оф. 1  
Тел./факс (044) 503.11.11  
info@kristar.ua  
[www.kristar.ua](http://www.kristar.ua)