

DIAMOND GLOSS

Алмазна полірувальна паста.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ОПИС

DIAMOND GLOSS – це надзвичайно дрібнозерниста мікронізована алмазна полірувальна паста, що підходить для використання в кабінеті стоматолога та в лабораторії. Пасту рекомендується наносити повстяними (фетровими) або бархатними дисками.

Паста DIAMOND GLOSS надає яскравості зубній емалі, реставраціям з кераміки, композитів, а також металам.

Паста складається з водорозчинних інгредієнтів, тому легко видаляється вкінці процедури.

ПОКАЗАННЯ

Паста DIAMOND GLOSS призначена для полірування зубної емалі, керамічних конструкцій, композитних реставрацій, а також металів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Паста DIAMOND GLOSS повинна наноситися повстяними (фетровими) або бархатними дисками. Вона поліпшує вигляд зубів під час фінішного полірування.

- Підготуйте робочу ділянку, відполіруйте, щоб поверхня була гладкою та обробленою.
- Зафіксуйте диск в дискотримачі.
- Нанесіть пасту на диск або безпосередньо на поверхню, що поліруватиметься.
- Полірування необхідно здійснювати при низьких обертах та невеликому тиску, переривчастими дотиками та круговими рухами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Для використання лише лікарями-стоматологами.
- Тільки для одноразового використання.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів пасту.
- Рекомендується використовувати захисні окуляри під час застосування продукту.
- Дотримуйтесь інструкцій з використання, щоб запобігти надмірному нагріванню поверхні пасту.
- Зберігайте продукт в оригінальному щільно закритому шприці.
- Не заморожуйте.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте в сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів.

СКЛАД

Поліетиленгліколь, алмазні мікрочастинки, ароматизатор.

Дата внесення змін в інструкцію: 10-2014.

TDV Dental Ltd.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944| CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp. Técn. Taís Cúgola Coelho Pereira. CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220051

0800 47 1020 | +55 47 3395-6115

info@tdv.com.br www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua