

ПРЕСТИЖ ГІДРОЛАЙТ

PRESTIGE HYDROLIGHT

Супергідрофільний вінілполісилоксановий матеріал низької в'язкості Prestige Hydrolight (Престиж Гідролайт) рекомендується використовувати у поєднанні з Putty (Патті) або Heavy Body (Хеві Боді) матеріалом при застосуванні двоетапної (подвійний відбиток*) або одноетапної (одномоментної) методики.

Завдяки надзвичайній гідрофільності Prestige Hydrolight (Престиж Гідролайт) здатний витіснити рідини, таким чином дозволяючи матеріалові затікати у найдрібніші деталі та відтворювати краї відбитку з високою точністю.

*При застосуванні Prestige Hydrolight (Престиж Гідролайт) за двоетапною методикою (подвійний відбиток) ми рекомендуємо розмістити поліетиленову прокладку на базовий шар під час першого етапу зняття відбитку, щоб поліпшити якість деталізації під час наступного етапу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт ідеально підходить для зняття будь-якого типу відбитків у всіх клінічних ситуаціях.

ПЕРЕВАГИ

- Надзвичайна гідрофільність та оптимальна текучість
- Максимальна точність відтворення деталей
- Тиксотропний
- Кут контакту менше ніж 10°
- Висока міцність на розрив
- Відмінне відновлення форми
- Висока стабільність розмірів
- Відсутність деформацій відбитків під час виведення з ротової порожнини

Призначений для використання лише в стоматології.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ISO 4823 - ADA 19	Тип 3 Light-Bodied (Лайт-Бодід) консистенція
Співвідношення змішування Основа : Каталізатор	1 : 1
Час змішування*	Автоматичне змішування
Робочий час*	1 хвилина 30 секунд
Час затвердіння у ротовій порожнині*	2 хвилини 30 секунд
Загальний час затвердіння*	4 хвилини
Деформація при стисканні	3% – 5%
Відновлення форми після деформації	>99,5%
Стабільність розмірів протягом 24 годин	<0,2%
Твердість по Шору А	45
Колір	Фіолетовий

*Зазначений час рахується з фази змішування матеріалу при температурі 23°C (73°F). Вищі температури скорочують робочий час, а нижчі – збільшують.

ПІДГОТОВКА ДИСПЕНСERA ТА ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Можна використовувати будь-які стандартні ложки, при цьому слід переконатися у тому, що вони є жорсткими і не деформуються.
- Важливо забезпечити належну адгезію матеріалу до відбиткової ложки задля уникнення неточностей, особливо під час виведення з рота.
- Для забезпечення міцного бондингу слід використовувати Prestige Universal Adhesive (Універсальний Адгезив Престиж).
- Повністю відтягніть назад плунжер диспенсера, піднявши розташований знизу чорний звільняючий важіль.
- Підніміть фіксатор картриджа на диспенсері.
- Встановіть картридж V-подібним пазом на його фланці донизу. У такому випадку фіксатор має опуститись без зусиль.
- Після того, як картридж було встановлено на диспенсер, перевірте ковпачок на чверть оберту. Зніміть його, застосувавши адекватне зусилля. Не викидайте ковпачок.
- Переконайтеся, що обидва компоненти (базовий матеріал та каталізатор) рівномірно видавлюються з картриджа. Для цього злегка натисніть на ручку диспенсера, видавивши незначну кількість матеріалу. Після цього ретельно очистіть носики картриджа.
- Міцно приєднайте змішувальну насадку, сумістивши V-подібний паз на кольоровому обідку змішувальної насадки з відповідною позначкою на картриджі. Далі, застосовуючи деяке зусилля саме до кольорового обідка насадки, а не до частини, в якій відбувається змішування двох компонентів, поверніть її на чверть оберту.
- Тепер пристрій готовий до застосування; видавлюйте матеріал, натискаючи на ручку диспенсера з невеликим зусиллям.

- Після використання зніміть насадку та встановіть на місце ковпачок, як описано вище.
- Для установки нового картриджа дотримуйтеся вище наведених вказівок від самого початку.

Відбитки, зняті з допомогою Prestige Hydrolight (Престиж Гідролайт), можна покривати міддю або сріблом у ванночках для гальванізації.

ВАЖЛИВО

Перед зняттям другого відбитку обов'язково промийте та акуратно висушіть перший відбиток. Це забезпечить ідеальну адгезію між першим та другим шарами матеріалу.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Після зняття відбитку його потрібно дезінфікувати для повного видалення дрібних часточок матеріалу та слини. Це можна робити, зануривши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може залишатися зануреним в дезінфікуючому розчині протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому ніяких деформацій не відбувається.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ

Немає потреби чекати перед відливанням моделі. Моделі можуть відливатися безпосередньо після дезінфекції або протягом двох тижнів, за умови, що відбитки зберігатимуться при кімнатній температурі. Prestige Hydrolight (Престиж Гідролайт) сумісний з усіма провідними марками гіпсів, наприклад, Hydrocal Kerr® (Гідрокал Керр®) класу III та Fujirock GC® (Фуджірок ДжіСі®) класу IV та поліуретановими смолами.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбитки при кімнатній температурі. Гарантований термін придатності Prestige Hydrolight (Престиж Гідролайт) – 36 місяців від дати виробництва, за умови правильного зберігання. Зберігайте матеріал надійно закритим в прохолодному та сухому місці при температурі 4°C – 28°C (39°F – 82°F). Тримайте подалі від джерел високих температур, іскор та відкритого полум'я. Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника. Номер партії і термін придатності вказані на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

УВАГА

- У випадку контакту зі шкірою, ретельно промийте уражену ділянку водою з милом.
- У випадку контакту з очима, ретельно промийте їх водою та зверніться до лікаря.
- У людей з підвищеною чутливістю вінілполісілоксанові матеріали можуть викликати чутливість або інші алергічні реакції.
- Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте потрапляння на одяг, зокрема й на лабораторний спецодяг.

УПАКОВКА

Код товару/опис 055107 – 100 мл (50 мл бази + 50 мл каталізатора) + 12 змішувальних насадок
 055407 – 10 картриджів по 50 мл (база + каталізатор)



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY
Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697
E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com

ВАНІНІ ДЕНТАЛ ІНДАСТРІ Ес.Ар.Ел.

Via di Campigliano 55/A, 50012 Grassina, Firenze, Italia
Тел: +39 055 644698; Факс +39 055 644697
E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com