

POLIMAX

POLIMAX – це полірувальні диски з натуральної вовни, просочені дегідратованою абразивною полірувальною пастою на основі оксиду алюмінію. Абразивність: дуже дрібна (extra-fine). Диски призначені для полірування композитів, металів, кераміки та зубної емалі. Абразивна паста активується кількома краплями води, відмінно полірує і надає яскравого блиску поверхні зубів або реставрацій. Мандрела VERSAPLUS та система кріплення диска дозволяють використовувати усю поверхню диска.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Встановіть мандрелу у кутовий наконечник. Закріпіть диск на мандрелі. Додайте кілька крапель води для активації абразивної пасти. Полірування виконуйте круговими переривчастими рухами з незначним тиском на низьких обертах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Диски призначені для одноразового використання.
- Повторне застосування може стати причиною перехресного інфікування.
- Не використовуйте диски при швидкості вище 4000 об/хв.
- Користувач несе повну відповідальність за комбіноване використання мандрели чи дисків разом зі схожими продуктами.
- З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання диска перед початком реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів дисків.

З'ЄДНАННЯ З КУТОВИМ НАКОНЕЧНИКОМ

Мандрела відповідає вимогам ISO 1797-1.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Мандрелу можна автоклаувати (126°C, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією необхідно очистити мандрелу водою та ензимним очисним засобом.

Диски призначені лише для одноразового використання.

СКЛАД

Диски: оксид алюмінію, вовняна повсть.

Система фіксації: полівінілхлорид.

Мандрела: метал.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте у сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів.



Диски призначені лише для одноразового використання.

Мандрелу дозволяється стерилізувати.

Дата внесення змін в інструкцію: 05-2016.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp.Técн. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220033

+55 47 3395-6115

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна

тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua