

МАТРИЧНА СТРИЧКА МЕТАЛЕВА

Матрична стрічка з нержавіючої сталі товщиною 0,05 мм.

Металева матрична стрічка призначена для використання з реставраційними матеріалами світлового затвердіння при реставраціях II класу.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Встановіть матричну стрічку в тримач для матриці. Встановіть матричну стрічку з тримачем для матриці в міжзубний проміжок. Припасуйте матричну стрічку до зуба. Заведіть анатомічний клин в апроксимальну ділянку та виконайте процедуру реставрації. Після проведення реставрації видаліть клин і матричну стрічку з тримачем для матриці. Виконайте шліфування та полірування реставрації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Матрична стрічка призначена для одноразового використання. Повторне застосування може стати причиною перехресного інфікування.
- З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання матричної стрічки або клина перед початком реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область.
- Не використовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Матрична стрічка служить бар'єром для реставраційного матеріалу.

СКЛАД

Нержавіюча сталь.



Металева матрична стрічка призначена для одноразового використання.

Дата внесення змін в інструкцію: 10-2014.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp.Téc. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220043

+55 47 3395-6115

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна

тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua