

# GC Fuji PLUS™ CONDITIONER

## ДжіСі Фуджі ПЛЮС КОНДИЦІОНЕР

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

РІДИНА ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ ТКАНИН ЗУБА

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках за показаннями до застосування.

### ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

GC Fuji PLUS CONDITIONER (ДжіСі Фуджі ПЛЮС КОНДИЦІОНЕР) – це рідина для кондиціювання тканин зуба, розроблена для використання зі склоіономерним цементом для фіксації GC Fuji PLUS (ДжіСі Фуджі ПЛЮС). Вона допомагає підсилити силу адгезії GC Fuji PLUS (ДжіСі Фуджі ПЛЮС) до тканин зуба.

### ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- 1) Після підготовки зуба нанесіть GC Fuji PLUS CONDITIONER (ДжіСі Фуджі ПЛЮС КОНДИЦІОНЕР) на поверхню, з якою буде з'єднуватись ортопедична конструкція, на 20 секунд.
- 2) Ретельно промийте зуб водою та висушіть. НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.
- 3) Продовжуйте діяти у відповідності до інструкцій до GC Fuji PLUS (ДжіСі Фуджі ПЛЮС).
- 4) Закрийте пляшечку відразу після використання.

### ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендовано для оптимальних робочих характеристик, Зберігати при температурі 4-25°C (39,2-77,0°F)

### ПАКОВАННЯ

Пляшечка 7 г (6,5 мл)

### УВАГА

- 1) У випадку контакту із м'якими тканинами порожнини рота або зі шкірою, негайно промийте великою кількістю води.
- 2) При потраплянні в очі негайно промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.
- 3) GC Fuji PLUS CONDITIONER (ДжіСі Фуджі ПЛЮС КОНДИЦІОНЕР) містить 2%-ий розчин хлориду заліза. GC Fuji PLUS CONDITIONER (ДжіСі Фуджі ПЛЮС КОНДИЦІОНЕР) не рекомендовано комбінувати з матеріалами, що містять епінефрин, який, як відомо, може вступати в реакцію з продуктами, що містять залізо, та цим спричиняти забарвлення слизової оболонки.
- 4) Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.
- 5) В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення такої реакції припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

Деякі матеріали, які зазначені в даній інструкції, можуть класифікуватися як небезпечні відповідно до Узгодженої Системи Класифікації хімічних речовин. Завжди ознайомлюйтеся з Паспортами Хімічної Безпеки, які ви можете завантажити за наступним посиланням:

<https://www.gc.dental/europe>

Їх також можна отримати у вашого постачальника.

### ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

СИСТЕМИ ДОСТАВЛЕННЯ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевіряйте їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження. НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У РОЗЧИНИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ. Ретельно очистіть систему, щоб запобігати засиханню та накопичення забруднень. Продезінфікуйте її засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров'я відповідно до регіональних/ національних вимог.

### Небажані ефекти – Звітність

Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним посиланням: [info@kristar.ua](mailto:info@kristar.ua)

а також до нашої системи внутрішнього контролю: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)  
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 06/2024



UA.TR.101

Уповноважений представник в Україні:  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«КРИСТАР-ЦЕНТР»  
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна  
тел/факс: +3804445020091, e-mail: [info@kristar.ua](mailto:info@kristar.ua)  
[kristar.ua](http://kristar.ua)

CE 2797  
GC

### ВИРОБНИК

ДжіСі КОРПОРЕЙШН  
76-1 Хасунума-Чо, Итабаші-Ку, Токіо 174-8585, Японія

### ПОШИРЮЄТЬСЯ

ДжіСі КОРПОРЕЙШН  
76-1 Хасунума-Чо, Итабаші-Ку, Токіо 174-8585, Японія



EU: ДжіСі ЄУРОП Ен.Ві.  
Рісьорч Парк, Інтерлевенлаан 33, В-3001 Левен, Бельгія  
ТЕЛ: +32 16 74 10 00