

іноКоре

inoCore

Композитний матеріал подвійного затвердіння для нарощування кукси зуба

іноCore (іноКоре) – це стоматологічний матеріал подвійного затвердіння для нарощування кукси зуба, який можна використовувати для нарощування кукси за всіма методиками завдяки тому, що матеріал зручний у роботі та має високу міцність на стискання. іноCore (іноКоре) доступний у відтінках А3 та синій.

Властивості

- Добре обробляється, оскільки має міцність, що близька до міцності дентину.
- Доступний у відтінках: синій та А3.
- Легко видавлюється через змішувальну насадку.
- Економно використовується при ручному змішуванні завдяки еко-насадкам.

Показання для застосування

- Нарощування кукси за всіма методиками.
- Постійні реставрації ушкоджених зубів.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка до використання

1. Перед застосуванням перевірте термін придатності та цілісність упаковки продукту.
2. Встановіть еко-насадку або змішувальну насадку на шприц іноCore (іноКоре).

Спосіб використання

1. Промийте та висушіть відпрепаровану порожнину зуба.
2. Підготуйте порожнину зуба відповідно до правил виконання лікувальних процедур.
3. Протравіть відпрепаровану поверхню, після чого нанесіть адгезив. Застереження: будьте обережні при проведенні процедури.
4. Нанесіть необхідну кількість матеріалу іноCore (іноКоре) на ділянку лікування.
5. Полімеризуйте світлом.
Хімічна полімеризація у ротовій порожнині: протягом 5 хвилин.
Час полімеризації світлодіодною лампою: 20 секунд.
Час полімеризації галогеновою лампою: 40 секунд.
6. Проведіть обробку поверхні зуба та кукси.
Примітка. Час хімічної полімеризації у ротовій порожнині: при використанні змішувальної насадки: ≤ 4 хвилини, при використанні еко-насадки (ручне змішування) ≤ 6 хвилин.

Фізичні властивості іноCore (іноКоре):

Міцність на стискання: 310 МПа. Глибина полімеризації (20 секунд): 5.1 мм.

Упаковка

2 шприци іноCore (іноКоре) по 5 мл (по 10 г), еко-насадки, змішувальні насадки, інструкція з використання.



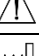

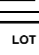

Застереження

1. Час роботи з матеріалом може збільшуватися (або зменшуватися) приблизно на 5 секунд з підвищенням (або зниженням) температури на кожен 1°C.
2. Плями від продукту не видаляються з поверхні тканин, тому для запобігання появі плям уникайте контакту матеріалу з одягом.
3. При потраплянні матеріалу на шкіру або в очі – промийте їх чистою водою.
4. Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності.
5. Продукт призначений для використання лише лікарями-стоматологами.

Зберігання

1. Уникайте впливу високих температур і потрапляння прямих сонячних променів.
2. Закривайте шприц кришечкою одразу після використання та зберігайте щільно закритим.
3. Зберігайте у сухому та прохолодному місці.
4. Термін придатності – 2 роки з дати виготовлення.

Позначення

Символ	Опис
	Зберігати у сухому місці
	Використати до
	Застереження! Ознайомтеся з супровідними документами
	Дата виробництва
	Виробник
	Код партії

Дата останнього перегляду інструкції: 03/2022



INNO DENTAL CO., LTD.

Rm 812, Byucksan Digital Valley 6-cha, 219, Gasandigital 1-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 08501
Tel: 02-757-1112, 02-779-1113; Fax: 02-757-9990
E-mail: inod55@naver.com; inodentalcompany@gmail.com
www.inod.co.kr

ІННО ДЕНТАЛ КО., ЛТД.

812, Бюксан Діджитал Веллі 6-ча, 219, Касандіджитал 1-ро,
Кимчхон-гу, Сеул, 08501, Республіка Корея
Тел.: +82-2-757-1112; Факс: +82-2-757-9990
Ел.пошта: inod55@naver.com; inodentalcompany@gmail.com
www.inod.co.kr



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2,
м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091,
e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua