


INOD


Q.P. ВОЛОКОННИЙ ШТИФТ

Виріб, що відповідає усім технічним вимогам


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

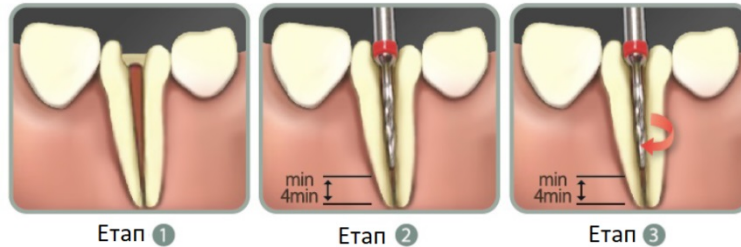

1. Кореневий канал, обтурований гутаперчею.
2. Універсальним свердлом (1000 – 2000 об/хв) видаліть матеріал, що заповнює кореневий канал. Залиште щонайменше 4 мм пломбувального матеріалу в апікальній частині кореня.
3. Підберіть штифт потрібного розміру та відповідну розгортку. Використовуючи відповідну розгортку, розширте кореневий канал та сформуйте ложе для штифта.

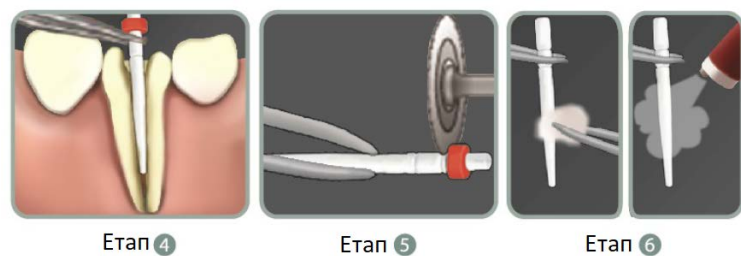


4. Помістіть штифт у підготовлене ложе, щоб переконатися, що він відповідає йому за розміром. Штифт повинен легко вийматися з нього.
5. Обріжте штифт до необхідної довжини алмазним диском чи алмазним бором.
**Примітка. Не використовуйте для цього ножиці, скальпель чи подібні інструменти, тому що вони роздавлять штифт, його структура буде зруйнована, а міцність втрачена.*
6. Очистіть штифт спиртом та просушіть повітрям без домішок води та мастила.

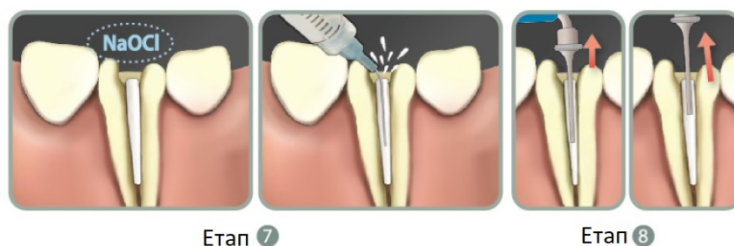

7. Очистіть та продезінфікуйте кореневий канал 2,5 – 5,25% розчином гіпохлориту натрію (NaOCl). Негайно промийте водою та висушіть паперовими штифтами.
**Примітка. Не використовуйте перекис водню (H₂O₂) чи інші речовини для дезінфекції, а також розчин EDTA, тому що їхні залишки можуть зменшити силу адгезії та негативно вплинути на реакцію твердіння цементу.*

8. Почніть вносити цемент в апікальну частину кореневого каналу. Як на початку, так і протягом усього процесу фіксації утримуйте подовжувальну насадку зануреною в цемент, щоб уникнути потрапляння в нього повітря.

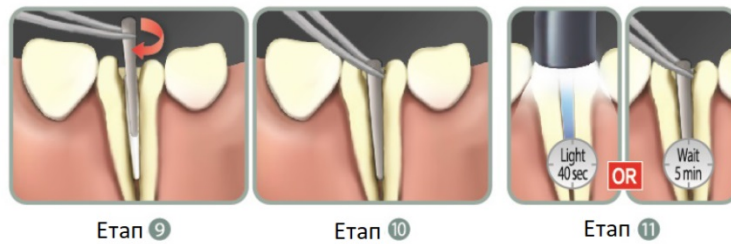

9. негайно встановіть штифт. Злегка похитайте його. З помірним зусиллям утримуйте штифт на місці.
10. З помірним зусиллям видаліть надлишки цементу відповідним інструментом або ватною кулькою.
11. Полімеризуйте цемент світлом або залиште тверднути самостійно – згідно з рекомендаціями виробника цементу.

Після використання продукту

- 1) Не використовуйте повторно. Тільки для одноразового застосування.
- 2) Розпаковані вироби зберігайте у сухому приміщенні при кімнатній температурі. Уникайте попадання прямого світла.

Правила техніки безпеки під час використання продукту

- 1) Уникайте попадання прямого сонячного світла під час застосування штифта.
- 2) Використовуйте тільки алмазний диск для обрізування штифта.
- 3) Уникайте забруднення штифта.
- 4) Для очищення використовуйте губку, просочену спиртом. Уникайте прямого контакту штифта з водою або мастилом.