

SUPERFIX

SUPERFIX – це фінішні та полірувальні диски для композитних реставрацій. Мандрела VERSAPLUS для SUPERFIX має спеціальну форму без типового металевого кільця для диска – це дозволяє використовувати усю абразивну поверхню диску та уникнути подряпин реставрації.

Доступні двох діаметрів: 9.5 мм та 12.7 мм, а також чотирьох типів абразивності з маркуванням кольором.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Встановіть мандрелу у кутовий наконечник. Закріпіть диск на мандрелі. Для досягнення найкращого результату послідовно використовуйте диски чотирьох типів абразивності від грубої (coarse) до дуже дрібної (x-fine). Процедуру необхідно виконувати сухим диском і переривчастими дотиками на низькій та середній швидкості. Рекомендовано використовувати грубі диски (coarse) на швидкості 10000 об/хв, дуже дрібні (x-fine) – 30000 об/хв.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Завдяки тертю абразивної сторони диска по поверхні зуба відбувається шліфування та полірування поверхні реставрації.

З'ЄДНАННЯ З КУТОВИМ НАКОНЕЧНИКОМ

Мандрела відповідає вимогам ISO 1797-1.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Диски призначені для одноразового використання. Повторне застосування може стати причиною перехресного інфікування.
- Тривалий контакт ротаційного інструмента з поверхнею зуба може призвести до нагрівання тканин зуба і незворотних уражень пульпи.
- З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання диска перед початком реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область.
- Користувач несе повну відповідальність за комбіноване використання мандрели чи дисків разом зі схожими продуктами.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів дисків.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Мандрелу можна автоклавувати (126°C, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією необхідно очистити мандрелу водою та ензимним очисним засобом.

Диски призначені лише для одноразового використання.



СКЛАД

Диски: оксид алюмінію, поліетилентерефталат, штучний каучук, пігменти на водній основі.

Мандрела: метал.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте у сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів.

МАРКУВАННЯ КОЛЬОРОМ

Колір – абразивність

Бордовий – coarse (груба)

Темно-рожевий – medium (середня)

Світло-рожевий – fine (дрібна)

Білий – x-fine (дуже дрібна)

Диски призначені лише для одноразового використання.

Мандрелу дозволяється стерилізувати.

Дата внесення змін в інструкцію: 03-2017.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp.Técн. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220030

+55 47 3395-6115 | 0800 47 1020

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна

тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua