

POLIGLOSS

Універсальна полірувальна паста на основі оксиду алюмінію.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ОПИС

POLIGLOSS – це полірувальна паста на основі оксиду алюмінію для фінішного полірування композитів. Ця паста також застосовується для надання фінального блиску реставраціям з усіх реставраційних матеріалів, а також зубній емалі.

ПОКАЗАННЯ

Паста POLIGLOSS призначена для полірування зубної емалі та усіх видів реставрацій й ортопедичних конструкцій, зокрема керамічних, композитних, металевих.

ЗАСТОСУВАННЯ

Пасту POLIGLOSS рекомендується наносити повстяними (фетровими) або бархатними полірувальними дисками, які посилюють дію пасти при фінішному поліруванні.

- Підготуйте робочу ділянку, відполіруйте, щоб поверхня була гладкою, з необхідною анатомією.
- Приєднайте диск до мандрели.
- Нанесіть пасту на диск або безпосередньо на зуби або пломби з реставраційного матеріалу.
- Полірування необхідно здійснювати при низьких обертах та невеликому тиску, переривчастими дотиками та круговими рухами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Для використання лише лікарями-стоматологами.
- Тільки для одноразового використання.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який компонент пасти.
- Рекомендується використовувати захисні окуляри під час застосування продукту.
- Дотримуйтесь інструкцій з використання, щоб запобігти надмірному нагріванню поверхні пасти.
- Зберігайте продукт в оригінальному щільно закритому шприці.
- Не заморожуйте.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте в сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів.

СКЛАД

Поліетиленгліколь, оксид алюмінію, ароматизатор.

Дата внесення змін в інструкцію: 03-2015.

TDV Dental Ltd.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944| CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp. Técn. Taís Cúgola Coelho Pereira. CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220051

0800 47 1020 | +55 47 3395-6115

info@tdv.com.br www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua