

ШТРИПСИ ПОЛІЕСТЕРОВІ

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Призначені для шліфування та полірування композитів.

ВИКОРИСТАННЯ

Заведіть гладкий прозорий центр штрипси в апроксимальну ділянку. Для шліфування і полірування виконуйте поздовжні рухи вперед і назад, докладаючи силу до композиту, починаючи з середньої абразивності штрипси (сіре зерно) і закінчуючи дрібною абразивністю штрипси (біле зерно).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Штрипси призначено для одноразового використання. Повторне застосування може стати причиною перехресного інфікування.
- Не використовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Абразивна поверхня штрипси забезпечує шліфування реставраційного матеріалу, а також використовується при встановленні ортодонтичних конструкцій.

СКЛАД

Поліестер, клей, оксид алюмінію.



Штрипси призначені для одноразового використання.

Дата внесення змін в інструкцію: 09-2016.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp.Téc. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220069

+55 47 3395-6115

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна

тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua