

Представляємо Знімний адаптер для ручного змішування виробництва компанії BJM

Цей запатентований зареєстрований пристрій – досконале рішення для змішування двокомпонентних матеріалів вручну замість використання насадки для змішування.



• Арт. #100912W



• Арт. #100912BLW



• Арт. #100912W

Якщо ви як стоматолог віддаєте перевагу ручному змішуванню двокомпонентних матеріалів, тепер ви можете вдосконалити цей процес за допомогою простого у використанні **Знімного адаптера для ручного змішування** (далі: адаптер). Адаптер BJM сумісний з усіма продуктами BJM в шприцах Сулзер-Мікс Пак 5 мл для автоматичного змішування.

На додаток до вищої ефективності процесу змішування, адаптер BJM дозволить зробити робочі поверхні чистішими та безпечнішими завдяки своїй унікальній структурі, яка розділяє два компоненти, дозволяючи дозувати їх в однакових пропорціях та запобігаючи забрудненню отворів шприца при повторному використанні.

На відміну від інших ручних адаптерів, доступних на ринку, адаптер BJM можна легко зняти, що дає можливість користувачу вільно вибрати бажаний режим змішування: ручний або автоматичний.



1. Вирівняйте ребро адаптера з отвором двокамерного шприца



2. Встановіть адаптер на двокамерний шприц




3. Зніміть захисний ковпачок з адаптера



4. Адаптер готовий до використання



5. Закрийте адаптер захисним ковпачком

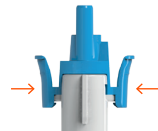

6. Одночасно натисніть на адаптер з обох боків, а потім від'єднайте його від двокамерного шприца

Знімний адаптер для ручного змішування BJM можна використовувати з:

High-Q-Bond SE



Cem-Implant



Q-Temp



Q-Core Syringable



Q-Crown



BJM Root Canal Sealer

