

Диски полірувальні FELT WHEELS, повстяні просочені

Диски з натуральної вовни, просочені абразивною полірувальною пастою на основі оксиду алюмінію, призначені для полірування композитів і металів.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Зафіксуйте диск на мандрелі та встановіть її у наконечник. Полірування виконуйте переривчастими дотиками з незначним тиском на низьких обертах.

З'ЄДНАННЯ З КУТОВИМ НАКОНЕЧНИКОМ

Мандрела відповідає вимогам ISO 1797-1.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Рекомендується контролювати напрямок обертання мікромотора, інакше гвинт мандрели може послабитися.
- Користувач несе повну відповідальність за комбіноване використання мандрели чи дисків разом зі схожими продуктами.
- З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання диска перед початком реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Мандрелу можна автоклавувати (126°C, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією необхідно очистити мандрелу водою та ензимним очисним засобом.

Диски призначені для одноразового використання. Повторне застосування може стати причиною перехресного інфікування.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Завдяки тертю абразивної сторони диска по поверхні зуба відбувається шліфування та полірування поверхні реставрації.

СКЛАД

Диски: оксид алюмінію, вовняна повсть.

Мандрела: метал.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте у сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів.



Диски призначені лише для одноразового використання.

Мандрелу дозволяється стерилізувати.

Дата внесення змін в інструкцію: 08-2012.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp.Téc. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220033

Tecn. Resp.: Dr. Elson J. Costa | CRO/SC 1202

+55 47 3395-6115

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна

тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua