

ПИЛКА НЕАБРАЗИВНА MICRO CUT MANUAL



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Заведіть пилку в апроксимальну ділянку. Застосуйте силу до надлишку матеріалу, який необхідно видалити.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Повторне застосування пилки без її попередньої стерилізації може викликати перехресне інфікування.
- Край пилки дуже гострий.
- З метою уникнення травмування ясенного сосочка рекомендовано захистити його клином.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів.
- З метою уникнення випадкового ковтання пилки перед початком реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Пилку неабразивну MICRO CUT MANUAL можна автоклавувати (126°C, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією необхідно провести очищення водою та ензимним очисним засобом.

СКЛАД

Нержавіюча сталь.

Пилку неабразивну MICRO CUT MANUAL можна стерилізувати.

Дата внесення змін в інструкцію: 01-2015.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000
Pomerode/SC – Brasil. Resp.Téc. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884
Reg. ANVISA 10291220018
+55 47 3395-6115 | 0800 47 1020
info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua