

Gradia

Градiя

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію до використання.



КОМПОЗИТНИЙ МАТЕРІАЛ СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ КОРОНОК І МОСТІВ, ВКЛАДОК ТА ВІНІРІВ

Для використання лише лікарями-стоматологами та зубними техніками у випадках, що описані в даній інструкції.

ЗА БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ВКАЗІВОК ДО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ GRADIA (ГРАДІЯ).

ПОКАЗАННЯ

1. Коронки та мости (з металевим каркасом)
2. Безметалеві реставрації: жакетні коронки, вкладки, накладки, ламіновані вініри
3. Супраструктури імплантатів

ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.
2. У випадках неправильного прикусу, бруксизму або синдрому стиснення щелеп.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

I. ПРОЦЕДУРА НАДБУДОВИ

I. Коронка на передніх / жувальних зубах

1. Нанесіть на чисту поверхню металевого каркасу шар METALPRIMER II, Z (МЕТАЛПРАЙМЕР II, Зет) (GC (ДжіСі)) та дайте висохнути.

2. Послідовно надбудовуйте вінір на металевому каркасі у наступному порядку:

а. FOUNDATION OPAQUE (ОСНОВНИЙ ОПАК), MARGIN OPAQUE (КРАЙОВИЙ ОПАК), OPAQUE (ОПАК).

Полімеризуйте світлом кожний шар протягом 1 хвилини за допомогою LABOLIGHT LV-III, II, DUO (ЛАБОЛАЙТ ЕлВі-III, II, ДУО) (GC (ДжіСі)).

б. Потім наносьте INTENSIVE COLOR (ІНТЕНСИВ КОЛОР), OPAQUS DENTIN (ОПАК ДЕНТИН), DENTIN (ДЕНТИН), MAMELON STAIN (МАМЕЛО СТЕЙН),

ENAMEL (ЕМАЛЬ) або FLOWABLE COMPOSITE (ФЛОВАБЛ КОПМОЗИТ), CERVICAL TRANSLUCENT (ПРИШИЙКОВИЙ ТРАНСЛЮЦЕНТ), ENAMEL INTENSIVE (ЕМАЛЬ ІНТЕНСИВ) та HALO ENAMEL (ГАЛО ЕМАЛЬ). Полімеризуйте світлом кожний шар протягом 30 секунд за допомогою LABOLIGHT LV-III, II, DUO (ЛАБОЛАЙТ ЕлВі-III, II, ДУО) (GC (ДжіСі)) або протягом 10 секунд за допомогою STEPLIGHT SL-I (СТЕПЛАЙТ ЕсЕл-I), LABOLIGHT DUO (ЛАБОЛАЙТ ЕлВі ДУО) (GC (ДжіСі)).

Примітка:

на FLOWABLE COMPOSITE (ФЛОВАБЛ КОМПОЗИТ) необхідно нанести шар іншої пасти, такої як ENAMEL (ЕМАЛЬ) або ENAMEL INTENSIVE (ЕМАЛЬ ІНТЕНСИВ).

3. Нанесіть на поверхню вініру GRADIA AIR BARRIER (ГРАДІЯ ЕІР БАРЬЕР).

4. Виконайте фінішну полімеризацію світлом протягом 3 хвилин за допомогою LABOLIGHT LV-III, II, DUO (ЛАБОЛАЙТ ЕлВі-III, II, ДУО) (GC (ДжіСі)).

5. Відполіруйте з використанням GRADIA DIAPOLISHER (ГРАДІЯ ДІАПОЛІШЕР) за допомогою фетрового полірувального круга або іншим способом.

II. Жакетні коронки передніх або жувальних зубів

1. а. Зробіть гіпсову поверхню зуба більш твердою шляхом нанесення GRADIA DIE-HARDNER (ГРАДІЯ ДАЙ-ХАРДНЕР).

б. Нанесіть за необхідності шар парафінового воску у якості сепаратора.

в. Нанесіть на поверхню штампу GRADIA SEPARATOR (ГРАДІЯ СЕПАРАТОР).

2. Послідовно надбудовуйте коронку на гіпсовому штампі у наступному порядку:

а. OPAQUE (ОПАК) (на губну поверхню), MARGIN OPAQUE (КРАЙОВИЙ ОПАК) (на язичну поверхню)

Полімеризуйте світлом кожний шар протягом 1 хвилини за допомогою LABOLIGHT LV-III, II, DUO (ЛАБОЛАЙТ ЕлВі-III, II, ДУО) (GC (ДжіСі)).

б. Потім наносьте SHOULDER DENTIN (ПЛЕЧОВИЙ ДЕНТИН), OPAQUS DENTIN (ОПАК ДЕНТИН), DENTIN (ДЕНТИН), MAMELON STAIN (МАМЕЛО СТЕЙН), ENAMEL (ЕМАЛЬ) чи TRANSLUCENT (ТРАНСЛЮЦЕНТ), чи FLOWABLE COMPOSITE (ФЛОВАБЛ КОПМОЗИТ), CERVICAL TRANSLUCENT (ПРИШИЙКОВИЙ ТРАНСЛЮЦЕНТ), ENAMEL INTENSIVE (ЕМАЛЬ ІНТЕНСИВ) та HALO ENAMEL (ГАЛО ЕМАЛЬ) (на губну поверхню) / MAMELON STAIN (МАМЕЛО СТЕЙН), OPAQUS DENTIN INTENSIVE (ОПАК ДЕНТИН ІНТЕНСИВ), HALO ENAMEL (ГАЛО ЕМАЛЬ) (на язичну поверхню). Полімеризуйте світлом кожний шар протягом 30 секунд за допомогою LABOLIGHT LV-III, II, DUO (ЛАБОЛАЙТ ЕлВі-III, II, ДУО) (GC (ДжіСі)) або протягом 10 секунд за допомогою STEPLIGHT SL-I, LABOLIGHT DUO (СТЕПЛАЙТ ЕсЕл-I, ЛАБОЛАЙТ

ДУО) (GC (ДжіСі)).

Примітка:

на FLOWABLE COMPOSITE (ФЛОВАБЛ КОПМОЗИТ) необхідно нанести шар іншої пасти, такої як ENAMEL (ЕМАЛЬ) або ENAMEL INTENSIVE (ЕМАЛЬ ІНТЕНСІВ).

3. Нанесіть на поверхню коронки GRADIA AIR BARRIER (ГРАДІЯ АІР БАРЬЕР).

4. Виконайте фінішну полімеризацію протягом 3 хвилин за допомогою LABOLIGHT LV-III, II, DUO (ЛАБОЛАЙТ ЕлВі-III, II, ДУО) (GC (ДжіСі)).

5. Відполіруйте з використанням GRADIA DIAPOLISHER (ГРАДІЯ ДІАПОЛІШЕР) за допомогою фетрового полірувального круга або іншим способом.

III. Вкладки жувальних зубів

1. а. Нанесіть GRADIA DIE-HARDNER (ГРАДІЯ ДАЙ-ХАРДНЕР) на внутрішню поверхню порожнини в гіпсі для надання їй поверхні більшої твердості.

б. Заблокуйте наявні піднутріння воском.

в. Нанесіть за необхідності шар парафінового воску у якості сепаратора.

г. Нанесіть на поверхню штамп GRADIA SEPARATOR (ГРАДІЯ СЕПАРАТОР).

2. Послідовно надбудовуйте вкладку на гіпсовому штампі у наступному порядку:

CERVICAL TRANSLUCENT (ПРИШІЙКОВИЙ ТРАНСЛЮЦЕНТ) та ENAMEL INTENSIVE (ЕМАЛЬ ІНТЕНСІВ) або ENAMEL (ЕМАЛЬ).

Полімеризуйте світлом кожний шар протягом 30 секунд за допомогою LABOLIGHT LV-III, II, DUO (ЛАБОЛАЙТ ЕлВі-III, II, ДУО) (GC (ДжіСі)) або протягом 10 секунд за допомогою STEPLIGHT SL-I, LABOLIGHT DUO (СТЕПЛАЙТ ЕсЕл-І, ЛАБОЛАЙТ ДУО) (GC (ДжіСі)).

3. Нанесіть на поверхню вкладки GRADIA AIR BARRIER (ГРАДІЯ АІР БАРЬЕР).

4. Виконайте фінішну полімеризацію протягом 3 хвилин за допомогою LABOLIGHT LV-III, II, DUO (ЛАБОЛАЙТ ЕлВі-III, II, ДУО) (GC (ДжіСі)).

5. Відполіруйте з використанням GRADIA DIAPOLISHER (ГРАДІЯ ДІАПОЛІШЕР) за допомогою фетрового полірувального круга або іншим способом.

IV. КОМПОЗИТНИЙ ПРАЙМЕР

Використовувати у якості адгезива світлової полімеризації для додаткового нанесення та ремонту композиту.

ЗБЕРІГАННЯ

Для підтримання оптимальних властивостей матеріалу зберігайте його в прохолодному місці подалі від прямих сонячних променів.

УВАГА

1. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

2. GRADIA SEPARATOR (ГРАДІЯ СЕПАРАТОР), GRADIA DIE-HARDNER (ГРАДІЯ ДАЙ-ХАРДНЕР) та METALPRIMER II, Z (МЕТАЛПРАЙМЕР II, Зет) (GC (ДжіСі)) є легкозаймистими у рідкому та газоподібному стані. Не використовувати поблизу відкритого полум'я. Зберігати на безпечній відстані від джерел займання. Зберігати у місці, недосяжному для прямого сонячного світла.

3. При коригуванні або поліруванні поверхні використовувати пилосос та надягати захисну маску для уникнення вдихання пилу.

4. При потрапленні на тканини ротової порожнини або шкіру негайно видалити ваткою. Змити водою.

5. При потрапленні до очей негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря.

6. Утилізувати у відповідності з місцевими нормативно-правовими настановами.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні відповідно до Узгодженої Системи Класифікації хімічних речовин. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням:

<http://www.gceurope.com>

Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

Дата внесення останніх змін: 08/2019



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

CE 2797, 'GC'

ВИРОБНИК

ДжіСі ДЕНТАЛ ПРОДАКТС КОРП
2-285 Торііматсу-Чо, Касуга-Ші, Аїті 486-0844, Японія

ПОШИРЮЄТЬСЯ

ДжіСі КОРПОРЕЙШН
76-1 Хасунума-Чо, Ітабаші-Ку, Токіо 174-8585, Японія



ЕУ: ДжіСі ЄУРОП Ен.Ві.
Рісьорч Парк, Інтерлевенлаан 33, В-3001 Левен, Бельгія
ТЕЛ: +32 16 74 10 00