

# Sure-Seal Root™

## Силер для пломбування корневих каналів

### Опис

**Sure-Seal Root™** – зручна, попередньо змішана, готова до використання (вноситься через насадку) паста на основі біоактивного силікату кальцію, яка розроблена для постійної obturaції кореневого каналу зуба. **Sure-Seal Root™** основана на суміші силікату кальцію, для тужавіння та твердіння якої необхідна вода.

**Sure-Seal Root™** не дає усадки під час затвердіння і демонструє відмінні фізичні властивості.

### Час затвердіння

Час затвердіння складає 25 хв, вимірюється відповідно до ISO 6876:2012 (100% вологість повітря). Але в каналах кореня зуба час затвердіння може становити понад 2,5 години.

### Склад

Силікат кальцію, оксид цирконію, наповнювач, згущувач.

### Показання до застосування

Постійна obturaція каналу кореня зуба.

### Рекомендовані процедури

1. Відпрепаруйте та промийте канал кореня зуба, використовуючи стандартні ендодонтичні методики.
2. Зніміть ковпачок зі шприца Sure-Seal Root™. Надійно приєднайте одноразову внутрішньоканальну насадку до канюлі шприца, повертаючи її за годинниковою стрілкою. Одноразова насадка гнучка і її можна зігнути, щоб полегшити доступ до кореневого каналу.
3. Помістіть кінчик насадки, що встановлена на шприц, в кореневий канал не глибше, ніж на одну третину (1/3) в корональній частині.  
Акуратно і рівномірно видавіть Sure-Seal Root™ у верхівку каналу кореня зуба.  
На цьому етапі можна зробити рентгенівський знімок для забезпечення адекватного апікального запечатування. Якщо кількість матеріалу недостатня, ретельно вимийте Sure-Seal Root™ з кореневого каналу і повторіть процедуру.
4. Продовжуйте заповнювати канал кореня зуба Sure-Seal Root™ після зняття одноразової насадки. Повністю заповніть канал кореня зуба; уникайте утворення повітряних бульбашок і переповнення кореневого каналу.
5. Видаліть надлишок Sure-Seal Root™ з верхньої частини каналу кореня зуба вологою ватною кулькою.
6. Помістіть гутаперчеві штифти в кореневий канал, використовуючи стандартні ендодонтичні методики.
7. Sure-Seal Root™ залишатиметься як частина постійного заповнення кореневого каналу зуба.

## Запобіжні заходи та зберігання

1. Уникайте впливу прямих сонячних променів.
2. Зберігайте в прохолодному місці.
3. Для застосування лише в стоматології.
4. Для застосування виключно лікарями-стоматологами.  
Дотримуйтесь процедур і запобіжних заходів.
5. Зберігайте подалі від не стоматологів, а також дітей, літніх людей та інших.
6. Не виводьте матеріал за межі верхівки каналу кореня зуба.
7. Не прикладайте надмірну силу для видавлювання пасти, бо пацієнт може відчутти гострий біль.
8. При випадковому попаданні в очі негайно промийте їх великою кількістю води.
9. Утримуйте шприц із щільно закритим ковпачком, коли він не використовується.
10. Не використовуйте повторно одноразову насадку після застосування.
11. Не використовуйте для лікування внутрішніх захворювань.
12. Не застосовуйте після закінчення терміну придатності.

## Символи




Використати до дати



Номер партії



Дивитись інструкції з використання

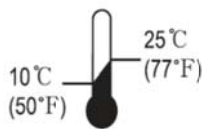

Температурні обмеження



Європейський представник



Виробник

**Термін придатності:** 2 роки з дати виготовлення

## Гарантія

Sure Dent Corporation замінить продукт, якщо буде доведено, що він не придатний для використання. Sure Dent Corporation не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, прямі чи непрямі, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю використання продукту. Стоматолог несе відповідальність за визначення придатності продукту перед його використанням за призначенням. Стоматолог бере на себе всі ризики та відповідальність у зв'язку з цим.

## SURE DENT CORPORATION

#809, 52 Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  
Тел.: +82-31-737-4720 Факс: +82-31-737-4724 E-mail: [suredent@suredent.com](mailto:suredent@suredent.com)

## SARL Man (Європейський представник)

5 Rue Cecile Vallet, 92340, Bourg La Reine, France



UA.TR.067

Уповноважений представник в Україні:  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«КРИСТАР-ЦЕНТР»  
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна  
тел./факс: +380445020091, e-mail: [info@kristar.ua](mailto:info@kristar.ua)  
[kristar.ua](http://kristar.ua)