

Шур-Сіл Рут ПіТі

Sure-Seal Root™ PT

○ Матеріал для заповнення кореневого каналу ○

○ Попередньо змішана, готова до використання паста на основі алюмосилікату кальцію ○
(густої консистенції).

Інструкція з використання

Опис

Шур-Сіл Рут ПіТі – це попередньо змішана біокерамічна паста для перекриття пульпи, постійного відновлення цілісності кореневого каналу, заповнення верхівки кореня. Шур-Сіл Рут ПіТі постачається у канюлі, яка містить суміш алюмосилікату кальцію, воду, а також деякі інші складові. Вноситься у кореневий канал, не потребує замішування з водою.

Склад

- Алюмосилікат кальцію.
- Оксид цирконію.
- Згущувач.

Час затвердіння

Час затвердіння: до 25 хвилин (визначено відповідно до ISO 6876:2012). У вологому середовищі час затвердіння може бути меншим та становити до 10 хв. У сухому середовищі час затвердіння може бути більшим.

Показання до застосування

- Покриття пульпи.
- Відновлення кореня після перфорації.
- Відновлення кореня після резорбції.
- Заповнення верхівки кореня.
- Апексифікація.

Вказівки щодо застосування

Канюлі

1. Перед застосуванням Шур-Сіл Рут ПіТі перевірте продукт на відсутність пошкоджень або дефектів.
2. Встановіть канюлю у пістолет для канюль. Зніміть ковпачок з канюлі.
3. Обережно натисніть на ручку пістолета для видавлювання потрібної кількості матеріалу з канюлі. Виконайте щільне пакування матеріалу у робочій ділянці.
4. Залежно від місця нанесення Шур-Сіл Рут ПіТі може бути внесений пістолетом через канюлю або інструментом. Після внесення Шур-Сіл Рут ПіТі щільно упакуйте матеріал у робочій ділянці.
5. Завершіть лікування відповідно до вибраної методики.

Покриття пульпи

[Непряме]

1. Непряме покриття пульпи є найкращим для лікування здорової пульпи чи зворотного пульпіту. Не використовуйте матеріал для непрямого покриття пульпи при незворотному пульпіті.
2. Ізольуйте зуб кофердамом та відпрепаруйте порожнину бором, що обертається на високій швидкості.
3. Видаліть усі інфіковані карієсом тканини, використовуючи сферичний бор на низькій швидкості та/або ручний екскаватор.
4. Перед тим як пульпа буде оголена, промийте внутрішню поверхню відпрепарованої порожнини. Видаліть зайву вологу чи зупиніть кровотечу сухою ватною кулькою.
5. Помістіть достатню кількість Шур-Сіл Рут ПіТі на дно дентину та упакуйте матеріал, таким чином збільшуючи міцність дентину. Видаліть залишки ручним екскаватором, мікрощіткою чи ватною кулькою.
6. Покрийте Шур-Сіл Рут ПіТі тонким шаром склоіономерного цементу, покриваючи латеральні дентинні стінки порожнини. Продовжте процедуру реставрації відповідно до інструкцій виробника.
7. Якщо шар дентину занадто тонкий, рекомендується детально стежити за змінами клінічних симптомів, до того як остаточно завершити реставрацію композитним матеріалом.
8. Після реставрації оцініть життєздатність пульпи за допомогою рентгенівських знімків (X-ray) протягом 3-6 місяців.

[Пряме]

1. Ізольуйте зуб кофердамом та відпрепаруйте порожнину бором, що обертається на високій швидкості.
2. Видаліть усі інфіковані карієсом тканини, використовуючи сферичний бор на низькій швидкості та/або ручний екскаватор.
3. Після відкриття пульпи промийте розчином NaOCl порожнину та місце контакту з пульпою. Якщо є кровотеча, досягніть гемостазу акуратно помістивши на поверхню пульпи ватну кульку, змочену розчином NaOCl чи стерильним фізіологічним розчином.
4. Відповідним інструментом помістіть достатню кількість Шур-Сіл Рут ПіТі, упакуйте матеріал. Усуньте надлишок мікрощіткою або ватною кулькою.
5. Покрийте Шур-Сіл Рут ПіТі тонким шаром склоіономерного цементу, покриваючи латеральні дентинні стінки порожнини. Продовжте процедуру реставрації відповідно до інструкцій виробника.
6. Рекомендується детально стежити за змінами клінічних симптомів, до того як остаточно завершити реставрацію композитним матеріалом.
7. Після реставрації оцініть життєздатність пульпи за допомогою рентгенівських знімків (X-ray) протягом 3-6 місяців.

Відновлення після перфорації кореня / резорбції кореня

1. Ізольуйте зуб кофердамом. Очистіть кореневий канал відповідним інструментом та промийте розчином NaOCl.
2. Помістіть гідроксид кальцію у канал для знезараження області на тиждень.
3. У наступний візит пацієнта: ізольуйте зуб кофердамом та видаліть гідроксид кальцію.
4. Видаліть надмірну вологу використовуючи паперові штифти. Ізольуйте кореневий канал та визначте місце перфорації.
5. Нанесіть Шур-Сіл Рут ПіТі на область перфорації використовуючи відповідний інструмент, наприклад плагер чи паперовий штифт.
6. Перевірте правильність розміщення Шур-Сіл Рут ПіТі за допомогою рентгенівського

знімку (X-ray). Якщо неправильно, - видаліть матеріал та повторіть внесення.

- Візьміть вологу ватну кульку, відіжміть її, помістіть у кореневий канал, закрийте канал тимчасовою пломбою щонайменше на 4 години.
- Через 4 години або у наступний візит пацієнта, ізолюйте зуб кофердамом, перевірте чи повністю затвердів матеріал. Якщо не затвердів, видаліть матеріал та повторіть процедуру внесення.
- Якщо Шур-Сіл Рут ПіТі повністю затвердів, виконайте обтурацію каналу для завершення лікування.

Заповнення верхівки кореня

- Забезпечте доступ до верхівки кореня, проведіть резекцію хірургічним бором.
- Підготуйте робочу область верхівки кореня глибиною 3-5 мм, використовуючи ультразвукові насадки.
- Ізолюйте робочу область та контролюйте, щоб не було надлишку вологи, за допомогою паперових штафтів. Контролюйте, щоб не було кровотечі, використовуючи відповідну методику.
- Внесіть Шур-Сіл Рут ПіТі у кореневий канал відповідним інструментом.
- Видаліть надлишок матеріалу та очистіть поверхню кореня.
- Перевірте правильність внесення Шур-Сіл Рут ПіТі за допомогою рентгенівського знімку (X-ray).

Апексифікація

- Ізолюйте зуб кофердамом. Очистіть кореневий канал відповідним інструментом та промийте розчином NaOCl.
- Висушіть кореневий канал паперовими штафтами та внесіть гідроксид кальцію у кореневий канал для знезараження. Закрийте канал тимчасовим пломбувальним матеріалом на тиждень.
- У наступний візит пацієнта: ізолюйте зуб кофердамом та видаліть гідроксид кальцію. Очистіть кореневий канал відповідним інструментом та промийте розчином NaOCl.
- Внесіть Шур-Сіл Рут ПіТі у кореневий канал відповідним інструментом, наприклад, плагером або паперовим штафтом. Створіть апікальний бар'єр за допомогою Шур-Сіл Рут ПіТі.
- Видаліть надлишок матеріалу та очистіть поверхню кореня.
- Перевірте правильність внесення Шур-Сіл Рут ПіТі за допомогою рентгенівського знімку (X-ray). Якщо неправильно, - повторіть процедуру внесення.
- Якщо Шур-Сіл Рут ПіТі повністю затвердів, виконайте обтурацію каналу для завершення лікування.

Зберігання

- Тримайте Шур-Сіл Рут ПіТі у прохолодному місці (при температурі 10-25°C). Уникайте попадання прямого сонячного світла.
- Тримайте кожен пакет закритим, коли не використовуєте Шур-Сіл Рут ПіТі.

Застереження

- Для застосування лише у стоматології.
- Для використання лише лікарями-стоматологами. Дотримуйтесь процедури та запобіжних заходів.
- Зберігайте у недоступному місці для не стоматологів, а також дітей, літніх людей та інших.
- Уникайте контакту матеріалу зі шкірою та очима. Якщо матеріал попав на шкіру, видаліть його негайно губкою або ватою, а потім промийте проточною водою. У випадку попадання в очі, негайно промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря

відповідної спеціалізації.

- Не пакуйте Шур-Сіл Рут ПіТі з надмірним зусиллям у кореневий канал, оскільки це може призвести до пошкоджень.
- Не використовуйте цей продукт для пацієнта, якщо відомо, що пацієнт має алергію на компоненти цього матеріалу.
- Перед використанням перевірте, щоб не було пошкоджень пакету. Якщо пакет пошкоджений, не використовуйте матеріал.
- Не ковтати – тільки для зовнішнього застосування.
- Не використовуйте матеріал після закінчення терміну придатності.
- Лише для одноразового використання. Не використовуйте повторно, щоб запобігти інфікуванню.

Символи, що зазначаються на упаковці



Використати до



Код партії



Номер
за каталогом



Медицинський
виріб



Лише для
одноразового
використання



Виробник



Не стерильний



Ознайомтеся
з інструкцією
з використання



Температурне
обмеження



Знак відповідності
Технічному регламенту
в Україні

Термін придатності

2 роки з дати виробництва.

Гарантія

«Шур Дент Корпорейшн» замінить продукт, якщо буде доведено, що він непридатний для використання. «Шур Дент Корпорейшн» не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, прями чи непрямі, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю застосування вказаного продукту. Стоматолог несе відповідальність за визначення придатності продукту перед його використанням за призначенням. Стоматолог бере на себе всі ризики та відповідальність у зв'язку із застосуванням продукту

Дата останнього перегляду інструкції: 01.06.2024



SURE DENT CORPORATION
809, 52 Sagimakgoko, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Korea
Тел: +82-31-737-4720
Факс: +82-31-737-4724
E-mail: suredent@suredent.com

«ШУР ДЕНТ КОРПОРЕЙШН»
No 809, 52, Sagimakgol-ro, Chungwon-gu,
Sonnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Korea
Тел.: +82-31-737-4720
Факс: +82-31-737-4724
Ел.адреса: suredent@suredent.



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «КРИСТАР-ЦЕНТР», вул. Межигірська,
буд. 50, кв. 2, м. Київ, 04071, Україна
тел: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua, www.kristar.ua