

COMPOSITE PRIMER КОМПОЗИТ ПРАЙМЕР

Перед застосуванням уважно
прочитайте інструкцію до використання.

UK

ПРАЙМЕР ДЛЯ МІКРОНАПОВНЕНИХ КОМПОЗИТІВ ТА АКРИЛОВИХ ПЛАСТМАС

Для використання лише стоматологами та зубними техніками і лише для цілей, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

1. Обробка поверхні мікронапоповнених композитів (МНК) або мікронаповнених гібридних композитів (GRADIA (ГРАДІЯ), GRADIA gum shades (ГРАДІЯ гам шейдс)) перед фіксацією або ремонтом.
2. Обробка поверхні акрилових пластмас перед ремонтом.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Не використовувати для пацієнтів з підтвердженою алергією на мономер метакрилату та полімер метакрилату.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

А. Обробка поверхні реставрації перед процедурою фіксації

1. ПІДГОТОВКА

Підготуйте призначену для бондингу поверхню за допомогою піскоструменевого апарату (оксидом алюмінію) під тиском щонайменше 3 кг/см² (2,94 Бар). Дотримуйтеся інструкцій з використання від виробника. Очистіть повітрям без домішок мастила.

Примітка:

Захистіть місця, що не потребують обробки, маскувальною стрічкою.

2. НАНЕСЕННЯ

Помістіть одну чи дві краплі COMPOSITE PRIMER (КОМПОЗИТ ПРАЙМЕР) у призначену для цього ємність. Наносьте за допомогою пензлика тонким шаром на поверхні, призначені для бондингу.

Примітка:

- 1) Використовуйте негайно після поміщення у ємність. Закривайте пляшку кришечкою одразу після використання.
- 2) У випадку забруднення матеріалу перед полімеризацією світлом

промийте та висушіть поверхню та повторіть процедуру нанесення матеріалу.

3. ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ СВІТЛОМ

Полімеризуйте світлом (довжина хвилі 470 нм). Дотримуйтеся інструкцій з використання від виробника полімеризатора. Після полімеризації не видаляйте інгібований киснем зовнішній шар.

Галоген/Світлодіод (> 700 мВт/см²): 20 секунд

Високопотужний світлодіод (> 1200 мВт/см²): 10 секунд

4. ФІКСАЦІЯ

Нанесіть на оброблені поверхні реставрації відповідний цемент для фіксації та виконайте процедуру фіксації. Дотримуйтеся інструкцій з використання від виробника.

Б. Обробка поверхні реставрації перед ремонтом

1. ПІДГОТОВКА

Підготуйте призначені для бондингу поверхні за допомогою алмазного бору або піскоструменевого апарату (оксидом алюмінію) під тиском щонайменше 3 кг/см² (2,94 Бар). Дотримуйтеся усіх застережних заходів при використанні піскоструменевого апарату в порожнині рота. Дотримуйтеся інструкцій з використання від виробника. Очистіть повітрям без домішок мастила.

Примітка:

Захистіть місця, що не потребують обробки, маскувальною стрічкою.

2. НАНЕСЕННЯ

Помістіть одну чи дві краплі COMPOSITE PRIMER (КОМПОЗИТ ПРАЙМЕР) у призначену для цього ємність. Наносьте за допомогою пензлика тонким шаром на поверхні, призначені для бондингу.

Примітка:

- 1) Використовуйте негайно після поміщення у ємність. Закривайте пляшку кришечкою одразу після використання.
- 2) У випадку забруднення матеріалу перед полімеризацією світлом промийте та висушіть поверхню й повторіть процедуру нанесення матеріалу.

3. ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ СВІТЛОМ

Див. пункт А 3 вище. Час полімеризації при використанні Labolight DUO (Лаболایت ДУО), LABOLIGHT LV-III (Лаболایت ЕлВі-III) становить 1 хвилину.

4. РЕМОНТ

Нанесіть на оброблені поверхні реставрації композитний матеріал, такий як GRADIA (ГРАДІЯ), GRADIA DIRECT (ГРАДІЯ ДІРЕКТ), GC KALORE (ДжіСі КАЛОРЕ) або GRADIA gum shades (ГРАДІЯ гам шейдс) та починайте фінішну обробку. Дотримуйтеся інструкцій з використання від виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

Для оптимальних робочих характеристик зберігайте у прохолодному темному місці при температурі 4-25°C (39.2-77.0°F).

ПАКОВАННЯ

Пляшечка 3 мл

УВАГА

1. COMPOSITE PRIMER (КОМПОЗИТ ПРАЙМЕР) є легкозаймистою речовиною. Не використовуйте біля відкритого вогню. Зберігайте подалі від джерел займання. Не тримайте велику кількість матеріалу в одному місці. Зберігайте подалі від прямих сонячних променів.
2. У випадку контакту матеріалу з тканинами ротової порожнини негайно видаліть матеріал губкою або ватним тампоном. Після обробки промийте водою.
3. У випадку потрапляння матеріалу на шкіру негайно видаліть його губкою або ватним тампоном. Промийте водою з милом.
4. У випадку потрапляння у очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
5. Не ковтайте матеріал.
6. Не змішуйте з іншими праймерами. Не використовуйте щіточку повторно з іншими матеріалами.
7. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.
8. У поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. Якщо таке трапиться, припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

Деякі матеріали, які зазначені в даній інструкції, можуть класифікуватися як небезпечні відповідно до Узгодженої Системи Класифікації хімічних

речовин. Завжди ознайомлюйтеся з Паспортами Хімічної Безпеки, які ви можете завантажити за наступним посиланням:

<http://www.gceurope.com>

Їх також можна отримати у вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ:

СИСТЕМИ ДОСТАВЛЕННЯ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевіряйте їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження. Викидайте систему у разі її пошкодження.

НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У РОЗЧИНИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ. Ретельно очистіть систему, щоб запобігати засиханню та накопиченню забруднень. Продезинфікуйте її засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров'я відповідно до регіональних/національних вимог.

НЕБАЖАНІ ЕФЕКТИ - ЗВІТНІСТЬ

Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним посиланням: info@kristar.ua

а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 08/2019



UA.TR.101

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

CE 0086

GC

ВИРОБНИК

ДжіСі ДЕНТАЛ ПРОДАКТС КОРП
(2-285 Торііамасу-Чо, Касуґа-Ші, Аїті 486-0844, Японія)

ПОШИРЮЄТЬСЯ

ДжіСі КОРПОРЕЙШН
76-1 Хасунума-Чо, Итабаші-Ку, Токіо 174-8585, Японія



EU: ДжіСі ЄУРОП Ен.Ві.

Рісьорч Парк, Інтерлевенлаан 33, В-3001 Левен, Бельгія
ТЕЛ: +32 16 74 10 00