

## PROTESIL PUTTY

Силіконовий еластомерний матеріал густої консистенції, високої в'язкості. Продукт відповідає положенням стандартів ISO 4823 та ADA 19.

**Protesil Putty** – силіконовий матеріал, який призначений для зняття першого відбитку за двоетапною методикою; під час робочої фази матеріал характеризується особливою м'якістю, однак після реакції вулканізації демонструє надзвичайну твердість.

**Protesil Putty** може використовуватися для зняття всіх типів відбитків, на основі яких виготовляються знімні та незнімні протези, а також ортодонтичні конструкції, навчальні моделі, тимчасові конструкції і т.п.

Продукт може використовуватися з усіма типами відбиткових ложок. У випадку повної або часткової адентії рекомендується використовувати систему відбиткових ложок Superform®. При використанні неперфорованих відбиткових ложок рекомендується застосовувати універсальний адгезив **Prestige Universal Adhesive**.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Час твердіння:  $\geq 1$  хвилина 30 секунд.
- Час твердіння в порожнині рота: 3 хвилини.
- Час замішування: 30 секунд.
- Деформація при стисканні: 3% – 5%
- Відновлення форми:  $>99,5\%$
- Стабільність розмірів, протягом 24 годин:  $<-0,20\%$
- Твердість: 50A за Шором
- Колір жовтий. Із персиковим смаком.

\* Відлік вказаних вище часових параметрів співпадає з початком замішування при температурі 23° C (73° F). Вища температура прискорює процес, нижча – уповільнює його.

Постачається стоматологам та в зуботехнічні лабораторії або на їх запит.

### ДОЗУВАННЯ

- При використанні гелю-катализатора: на кожен мірну ложку базової маси «без гірки» відмірюйте відрізок гелю довжиною в дві поділки на блоці для змішування (4 см).
- При використанні рідини-катализатора: на кожен мірну ложку базової маси «без гірки» використовуйте 5 – 6 крапель рідини.

Висока температура в приміщенні або збільшення дози катализатора можуть прискорити процес вулканізації. Низька температура в приміщенні або зменшення дози катализатора, навпаки, уповільнюють його.

### ПІДГОТОВКА

Акуратно змішуйте катализатор з базою протягом мінімум 30 секунд, декілька разів розподіляючи суміш тонким шаром в процесі замішування, доки вона не набуде однорідного забарвлення. Час твердіння може змінюватися залежно від температури або кількості катализатора, що використовується.

### АДГЕЗИВ

При використанні індивідуальної відбиткової ложки з пластмаси світлового твердіння протріть відповідну поверхню ложки ватним тампоном, змоченим етиловим спиртом. Дочекайтесь випаровування спирту. З допомогою відповідного пензля нанесіть **адгезив** рівномірним шаром. Після використання відразу закривайте пляшечку кришкою. Дотримуйтесь вказівок виробника адгезиву.

### ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Після зняття відбитку його потрібно стерилізувати для повного видалення дрібних часточок матеріалу та слини. Це можна робити, зануривши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може

залишатися зануреним в дезинфікуючому розчині протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому жодних змін розмірів не відбувається.

### **ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ**

Відливати модель рекомендується через 30 хвилин після полімеризації впродовж наступних 72 годин. Матеріал **Protesil Putty** сумісний з усіма якісними стоматологічними гіпсами.

### **ГАЛЬВАНІЗАЦІЯ**

Відбитки можна покрити міддю або сріблом. Матеріал **Protesil Putty** є сумісним з усіма наявними на ринку ванночками для гальванізації відбитків сріблом та міддю.

### **ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігайте в герметично закритому контейнері в прохолодному сухому місці при температурі 4 – 28°C (39 – 82°F). Тримайте подалі від джерел високих температур, місць, де можливе іскріння, або відкритого полум'я.

Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

### **МАРКУВАННЯ**

Номер партії і термін придатності вказані на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

**ВАЖЛИВО:** Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

### **УВАГА**

- Не допускайте потрапляння каталізатора в очі або на шкіру.
- У випадку контакту зі шкірою ретельно промийте ділянку милом і водою.
- При потрапленні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.

### **УПАКОВКА**

Індивідуальний код продукту	Індивідуальна упаковка
056004	База, банка, 1,5 кг
056002	Відро, 25 кг
056021	Гель-каталізатор, 60 мл
056008	Рідина-каталізатор, 30 мл



### **VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.**

Via di Campigliano 55/A - int. 15

50012 GRASSINA (FI) – Італія

Тел.: +39 055/644698 Факс: +39 055/644697

Електронна пошта: [info@vanninidental.com](mailto:info@vanninidental.com)

[www.vanninidental.com](http://www.vanninidental.com)