

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ШТРИПСИ АБРАЗІВНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З АЛМАЗНИМ ПОКРИТТЯМ

Показання:

Штрипси абразивні з нержавіючої сталі з алмазним покриттям використовуються в стоматологічних процедурах для фінішної обробки, полірування та шліфування проксимальних поверхонь. Вони дозволяють контролювано видаляти надлишки реставраційного матеріалу та відновлювати точки контакту між сусідніми зубами.

Для використання лише кваліфікованими стоматологами.

Застосування:

Фінішна обробка та полірування проксимальних поверхонь реставрацій з композитних та інших стоматологічних матеріалів, а також видалення надлишків матеріалів, коригування точок контакту між сусідніми зубами та обробка проксимальних поверхонь.

Основні принципи дії та функціонування:

Штрипси абразивні з алмазним покриттям з нержавіючої сталі використовуються для абразивної механічної обробки поверхонь, забезпечуючи контрольоване видалення надлишків реставраційного матеріалу або зубної емалі шляхом тертя між робочою поверхнею стрічки та ділянкою, що обробляється. Це дозволяє здійснювати стирання проксимальних поверхонь, фінішну обробку та полірування реставрацій або поверхонь зубів.

Протипоказання:

- Не використовувати для пацієнтів з гіперчутливістю до металів, особливо до нержавіючої сталі.
- Не використовувати на ділянках з сильним запаленням або активною кровотечею.
- Не використовувати виріб, якщо він пошкоджений, деформований або втратив абразивне покриття.

Інструкція із застосування:

Штрипси абразивні з нержавіючої сталі з нейтральним центром мають гладкий проміжок в абразивному покритті (неабразивна зона), який використовується для введення смужки в міжпроксимальні проміжки, захищаючи дотичні ділянки від небажаного стирання.

- Тримайте шліфувальну смужку між верхніми фалангами великого і вказівного пальців.
- Введіть смужку саме неабразивним центром у міжпроксимальну зону.
- Виконайте вестибулярні рухи для піднебінної/язикової поверхні і в зворотному напрямку, від шийного відділу до оклюзійної частини зуба і в зворотному напрямку.
- Для полегшення введення шліфувальної смужки в міжпроксимальні проміжки її можна змастити.

Процедура очищення

Не застосовується. Продукт призначений для одноразового використання, тому його не слід чистити або використовувати повторно.

Процедура стерилізації:

Не застосовується. Продукт постачається нестерильним і не підлягає стерилізації.

Застереження та запобіжні заходи:

- Цей виріб призначений для використання лише стоматологами, оскільки вони мають всю наукову інформацію, необхідну для його правильного використання.
- Необхідно використовувати захисні окуляри, щоб захистити очі від потрапляння дрібних частинок.
- Під час роботи зі штрипсами використовуйте засоби індивідуального захисту, включаючи рукавички, маски, захисні окуляри та лабораторні халати з довгими рукавами, як і з усіма іншими стоматологічними інструментами. Використовуйте захисні окуляри для пацієнта.
- НОМЕР ПАРТІЇ: важливо зберегти номер партії, вказаний на пакуванні продукції, щоб повідомити виробника у разі виникнення проблем.

Форма випуску

Нестерильний виріб для одноразового використання, 6 штук в упаковці.

Умови зберігання:

- Продукт необхідно зберігати у провітрюваному, сухому та захищеному від світла місці. Дотримання цих умов є обов'язковим для збереження фізико-хімічних властивостей, цілісності виробу та безпечного транспортування.
- До початку використання зберігайте продукт в оригінальній упаковці. Перед використанням перевірте цілісність упаковки.
- Перевізник повинен бути проінформований про вміст упаковки. Заходи обережності, яких слід дотримуватися під час транспортування, вказані на упаковці, що забезпечує захист продукту до моменту доставки замовнику. Упаковка з продуктом не повинна зазнавати впливу погодних умов.

Утилізація:

Утилізація повинна здійснюватися відповідно до правил, встановлених місцевим законодавством.

Термін придатності:

Не застосовується. Продукт виготовлено з матеріалів стійких до псування, і він постачається нестерильним. За умови дотримання належних умов зберігання він не має кінцевого терміну придатності до першого використання.

Термін використання:

Не застосовується. Продукт призначений лише для одноразового використання та має бути утилізований після використання.

Склад: Нержавіюча сталь і алмазне покриття.

Символи

Позначення	Назва позначення	Опис
	Використати до	Обмеження часу "використати до" відноситься до періоду до першого використання медичного виробу.
	Див. інструкцію з використання	Вказує на необхідність ознайомлення користувача з інструкцією з використання.
	Дата виробництва	Вказує дату виробництва медичного виробу.
	Не використовувати повторно	Повторно використовувати заборонено.
	Виробник	Позначає виробника медичного виробу
	Код партії	Позначає код партії виробника для того, щоб можна було визначити код партії або номер упаковки.
	Код виробника	Вказує контрольний номер виробника, щоб медичний виріб можна було ідентифікувати.
	Нестерильний	Позначає нестерильний медичний виріб.
	Медичний виріб	Позначає медичний виріб.
	Унікальний ідентифікатор виробу (код UDI)	Вказує на приналежність до Системи Унікальної ідентифікації медичних виробів
	Уповноважений представник в Європейському Співтоваристві	Позначає Уповноваженого представника в Європейському Співтоваристві.
	Маркування ЄС	Виріб відповідає основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам Європейського Союзу.
	Знак відповідності в Україні	Виріб відповідає основним вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів в Україні.
	Тільки для професійного використання	Медичний виріб повинен використовуватися виключно кваліфікованим медичним працівником

Дата останнього перегляду інструкції: листопад 2025 року



3R – Industria e Comercio Ltda
Rua Ptolomeu, 290 – Socorro
Sao Paulo - SP - CEP: 04762-040 - Brasil

«3Р – Індустрія е Комерсіо Лтда»
Руа Птоломеу, 290 – Сокорро
Сан-Паулу – СР - СЕР: 04762-040 - Бразилія



Cinterqual, Soluções De Comércio Internacional, Lda
Avenida defensores de chaves, nº 4 – 1000 – 117
Lisboa - Portugal

«Сінтерквал, Солюсоіс Джі Комерсіо Інтернасьонал, Лімітада»
Авеніда дефенсоріс джі Шавіс, № 4 – 1000 – 117 Лісабон -
Португалія



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю «КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua