

GC Fuji® II LC CAPSULE

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

ДжіСі Фуджі ІІ ЕлСі КАПСУЛИ

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПІДСИЛЕНИЙ СКЛОІОНОМЕРНИЙ
РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕМЕНТ СВІТЛОВОГО ТВЕРДІННЯ В КАПСУЛАХ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

1. Реставрація порожнин III, V класу та обмежено порожнин I класу.
2. Реставрація молочних зубів.
3. Побудова кукси.
4. Випадки, коли використання рентгеноконтрастного матеріалу є необхідним.
5. Пацієнти похилого віку.
6. Підкладка або база під реставрацію.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. Пряме перекриття пульпи.
2. Не використовувати для пацієнтів з підтвердженою алергією на склоіономерні цементу.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Співвідношення порошок / рідина (г/г)	0,33 / 0,10
Час замішування (сек.)	10"
Робочий час (хв., сек.) (при температурі 23°C) (від початку замішування)	3'15"
Час світлової полімерізації (сек.)	20"
Глибина полімерізації (відтінок A2) (мм)	1,8

Умови тестування : Температура (23 +/- 1°C)
Відносна вологість (50+/- 10%)

1. ПІДГОТОВКА ПОРОЖНИНИ

а) Відпрепаруйте зуб, застосовуючи традиційну методику. Створення умов для макромеханічної ретенції не є необхідним. Для перекриття пульпи використовуйте матеріали на основі гідроксиду кальцію.

б) Промийте водою та просушіть, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Для видалення змазаного шару рекомендовано застосовувати GC CAVITY CONDITIONER (ДжіСі Кавіті Кондиціонер) або GC DENTIN CONDITIONER (ДжіСі Дентин Кондиціонер) (Рис.1).

2. АКТИВАЦІЯ КАПСУЛИ ТА ЗАМІШУВАННЯ

а) Для того, щоб розпушити порошок всередині капсули перед активацією струсність її або легенько постукайте її боковою стінкою по жорсткій поверхні (Рис. 2).

б) Для активації капсули вдавть плунжер так, щоб він повністю занурився в тіло капсули та задержіть плунжер в цьому положенні протягом 3 секунд (Рис. 3).

Примітка:

1) Переконайтеся, що плунжер повністю занурився у капсулу, щоб уникнути неправильного замішування порошку та рідини.

2) Капсула повинна бути активована безпосередньо перед замішуванням та одразу використана.

в) Відразу вставте капсулу у міксер (або амальгамозамішувач) та замішуйте протягом 10 секунд (+/- 4,000 циклів/хв) (Рис. 4).










Примітка:

Якщо використовується замішувач із функцією центрифугування, цю функцію потрібно вимкнути.

3. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ

а) Відразу вийміть замішану капсулу з міксера і вставте її в пістолет для капсули GC CAPSULE APPLIER (ДжіСі ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КАПСУЛ).

б) Натисніть два рази, щоб заповнити носик

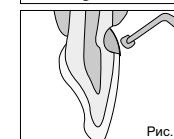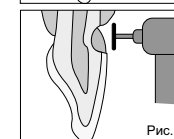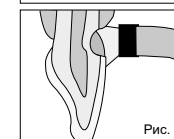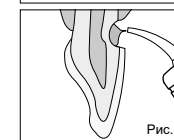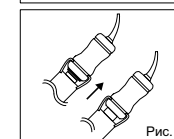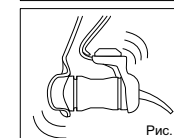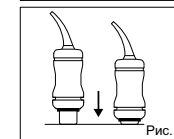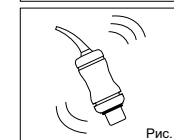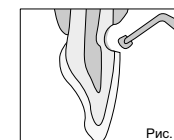

капсули (Рис. 5). Робочий час складає 3 хвилини 15 секунд від початку замішування (при температурі 23 °С (73,4 °F). Більш висока температура призведе до скорочення робочого часу.

Примітка:

1) Для того, щоб встановити носик капсули в потрібному напрямку, тримайте GC CAPSULE APPLIER (ДжіСі ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КАПСУЛ) у напрямку до себе та повертайте капсулу.

2) Для видалення використаної капсули натисніть звільняючу кнопку. Прокручуючи капсулу за та проти годинникової стрілки, витягніть її догори.

3) Видаліть вологу з поверхні порожнини, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.

г) Видавіть цемент в порожнину (Рис. 6). Не допускайте утворення повітряних бульбашок.

д) Відконтуруйте реставрацію та, якщо потрібно, встановіть матрицю.

е) Фотополімеризуйте цемент протягом 20 секунд за допомогою звичайного полімеризатора (довжина хвилі 470 нм) (Рис. 7). Встановлюйте джерело світла якомога ближче до поверхні цементу.

Примітка :

Для порожнин глибиною більше, ніж 1,8 мм, застосовуйте техніку пошарового нанесення.

4. ФІНІШНА ОБРОБКА.

Проведіть фінішну обробку за допомогою алмазного бору дрібнозернистості, силіконової головки та полірувальних штрипсів (Рис. 8).

Примітка :

Якщо поверхня цементу контактувала з повітрям під час твердіння, її потрібно вкрити GC Fuji VARNISH (ДжіСі Фуджі Варніш) або GC Fuji COAT LC (ДжіСі Фуджі Коат ЕлСі) (Рис. 9).

ЗБЕРІГАННЯ

Для оптимальних робочих характеристик зберігати у прохолодному та темному місці при температурі (4-25°C / 39,2-77,0°F).

КОЛІР

A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

(11 відтінків на основі розколірки Vita® (Віта))

Vita® (Віта) - це зареєстрована торгова марка компанії Zahnfabrik, Bad Säckingen, (Занфаabrik, Бад-Зеккінген), Німеччина.

РОЗФАСОВКА

1. Упаковка одного відтинку: 50 капсул.

2. Упаковка асорті: 50 капсул (по 10 відтінків A4, B2, B3, C2; по 5 відтінків B4, D2)

*Усереднений вміст матеріалу в капсулі: 0,33 г порошку та 0,10 г (0,085 мл) рідини.

*Мінімальний загальний об'єм замішаного цементу в капсулі: 0,10 мл.

Окремо: пістолет для капсул GC CAPSULE APPLIER (ДжіСі ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КАПСУЛ) (1шт).

УВАГА

1. У випадку контакту з тканинами порожнини рота або зі шкірою, негайно видаліть матеріал тампоном або бавовняною серветкою, змоченими у спирті. Промийте водою.

2. При потраплянні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.

3. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

4. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій, припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні відповідно до Узгодженої Системи Класифікації. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням:

<http://www.gceurope.com>

Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

НЕБАЖАНІ ЕФЕКТИ - ЗВІТНІСТЬ

Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним посиланням:

info@kristar.ua

а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 08/2019



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

CE 2797

GC

ВИРОБНИК

ДжіСі КОРПОРЕЙШН

76-1 Хасунума-Чо, Ітабаші-Ку, Токіо 174-8585, Японія

ПОШИРЮЄТЬСЯ



EU: ДжіСі ЄУРОП Ен.Ві.

Рісьорч Парк, Інтерлевенлаан 33, В-3001 Левен, Бельгія

ТЕЛ: +32 16 74 10 00