

Prestige Universal Adhesive

Універсальний адгезив, що гарантує найкращу адгезію між відбитковими матеріалами **PROTESIL - PRESTIGE** та різними типами відбиткових ложок.

Інструкції з використання

- Поверхня відбиткової ложки має бути чистою та сухою;
- Нанесіть на внутрішню поверхню відбиткової ложки тонкий шар **PRESTIGE UNIVERSAL ADHESIVE**;
- Висушіть протягом 2 хвилин, щоб досягти найкращої адгезії відбиткового матеріалу;
- нанесіть силікон.

Попередження

- Ні в якому разі не допускайте потрапляння **Prestige Universal Adhesive** в очі або на шкіру. У випадку контакту ретельно промийте уражену ділянку великою кількістю проточної води.
- Уникайте вдихання парів та тримайте подалі від джерел високої температури, іскор та відкритого вогню.
- Після використання щільно закривайте упаковку.
- Продукт хімічно стійкий. Тому уникайте будь-якого контакту з пластиковими поверхнями або одягом.
- Зберігайте в прохолодному сухому місці при максимальній температурі 25°C / 80°F.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності. Для використання лише лікарями-стоматологами.

Застереження

R11: легкозаймистий

R20/21: небезпечний при вдиханні та контакті із шкірою

R38: викликає подразнення шкіри

S2: зберігати у недоступному для дітей місці

S9: зберігати у добре вентильованих приміщеннях

S13: Зберігати подалі від їжі, напоїв та корму для тварин

S16: Зберігати подалі від джерел полум'я та іскор. Не палити

S46: У випадку проковтування, негайно звернутися за медичною допомогою та показати лікарю цю упаковку або етикетку

S36-37: Надягати відповідний захисний одяг та рукавички

| Код продукту | Упаковка |
|---------------------|-----------------|
| 058005 | Пляшка 10 мл |