

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання



## GC TISSUE CONDITIONER

МАТЕРІАЛ ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ ТКАНИН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ДЛЯ ПЕРЕБАЗУВАННЯ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

### ПОКАЗАННЯ

1. Кондиціювання тканин ротової порожнини.
2. Тимчасове перебазування.
3. Зняття функціональних відбитків.

### ПРОТИПОКАЗАННЯ

В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

### ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

#### 1. ПІДГОТОВКА

Перевірте стан ротової порожнини пацієнта та протезної конструкції, яку використовує пацієнт. Підгоніть твердосплавним бором поверхні, що не припасовані, почистіть їх та просушіть. Забезпечте утворення достатнього місця для нанесення шару GC TISSUE CONDITIONER товщиною мінімум 1 мм для отримання необхідної еластичності. Нанесіть кокосове масло або вазелін на поверхні, що не призначені для перебазування.

#### 2. ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ/РІДИНИ

Стандартне співвідношення порошку / рідини -2,4 г/ 2 мл (одна порція порошку до 2 порцій рідини). Відміряйте потрібну кількість порошку та рідини у гумову чашку для змішування.

Примітка:

- а) Використання меншої кількості рідини призведе до скорочення гелеподібної фази та утворення суміші більшої в'язкості. Більша кількість рідини призведе до подовження гелеподібної фази та утворення суміші меншої в'язкості.
- б) За певних умов зберігання порошок в пляшечці може частково злипатися. Це не впливає на робочі властивості матеріалу.
- в) Щільно закривайте пляшечки з порошком, рідиною та покривним лаком одразу після використання.

#### 3. ЗАМІШУВАННЯ

Змішуйте порошок з рідиною протягом 30-60 секунд доки суміш не набуде кремоподібної консистенції.

#### 4. НАНЕСЕННЯ

- 1) Покривний лак може бути використаний у якості бондингового агенту для покращення зв'язування та уникнення можливого відшарування. За допомогою пензлика нанесіть покривний лак лише на місця, де необхідне посилення адгезії. У цьому випадку GC TISSUE CONDITIONER буде неможливо видалити руками.
- 2) Рівномірно нанесіть суміш на поверхні підготовленого протезу, що підлягають перебазуванню.

Примітка:

- а) Для запобігання налипанню матеріалу зволожите пальці або інструмент водою. Не використовуйте крем або вазелін.
  - б) Уникайте потрапляння надлишків матеріалу у горло пацієнта.
- 3) Встановіть протез у роті. Попросіть пацієнта злегка прикусити його у положенні центральної оклюзії і поворушити губами та нижньою щелепою для надання матеріалу потрібної форми. Через 5 хвилин вийміть протез та перевірте наявність надлишків матеріалу та місць, куди він не потрапив.
  - 4) Видаліть надлишки гострим інструментом.

#### 5. ФІНІШНА ОБРОБКА

- 1) Промийте протез від слини під проточною водою. Висушіть повітрям.
- 2) Нанесіть покривний лак на поверхні протезу, які були перебазовані. Ретельно висушіть його повітрям або просто залиште на 4-5 хвилин.

Примітка:

Для покращення крайового прилягання покривний лак можна також нанести на стику GC TISSUE CONDITIONER та протеза.

- 3) Повторно встановіть протез у ротову порожнину.

Примітка:

- а) Для зменшення неприємного запаху перед встановленням занурте протез у воду.
- б) Проінструкуйте пацієнта, що очищення перебазованих ділянок протеза потрібно здійснювати пальцями під проточною водою. Використання щітки може пошкодити перебазовані ділянки. Наскільки це можливо, слід утримуватись від застосування спеціальних речовин для чистки протезів протягом тривалого часу.

#### 6. ВИДАЛЕННЯ

Рекомендується видалити або замінити матеріал через кілька днів або тижнів, в залежності від клінічного випадку. GC TISSUE CONDITIONER можна зчистити руками. Використовуйте гострий інструмент або бор для видалення матеріалу з ділянок, де застосовувався бондинговий агент.

## **ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати у прохолодному та темному місці при температурі 4-25°C (39,2-77,0°F) подалі від прямих сонячних променів та високої температури.

Термін придатності:

Порошок, Покривний лак –2 роки від дати виробництва

Рідина –3 роки від дати виробництва

## **КОЛЬОРИ**

Рожевий, Білий

## **УПАКОВКА**

### 1. 1-1 Упаковка

Набір містить: Порошок 90г (1), Рідина 90г (101мл) (1), Покривний лак 12г (15мл) (1), Мірна ємність для порошку (1), Пластиковий шприц для рідини №1 (1). Пензлик №7 (1), Пластиковий шпатель (1), Гумова чашка (Велика) (1)

### 2. Додатково

- a. GC TISSUE CONDITIONER порошок 90г (кожного відтінку)
- b. GC TISSUE CONDITIONER рідина 90г (101мл)
- v. GC TISSUE CONDITIONER покривний лак 12г (15мл)

## **УВАГА**

1. Рідина є легкозаймистою. Не тримайте поблизу джерел займання. Не зберігайте та не використовуйте біля відкритого вогню та за умов високої температури.
2. Використовуйте у приміщеннях, що добре провітрюються. Після використання негайно закривайте кришечкою.
3. Уникайте контакту з очима. При потраплянні у очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
4. Уникайте прямого контакту рідини, суміші та покривного лаку зі шкірою. У випадку такого контакту видаліть матеріал ватною кулькою або губкою, змоченими у спирті та промийте водою.
5. Покривний лак може пожовтіти з часом, але це не вплине на його робочі властивості.
6. Не змішуйте з іншими матеріалами.

Останні зміни внесено : 09/2008

CE 0086

**'GC'**

MANUFACTURED by  
GC DENTAL PRODUCTS CORP.  
2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by  
GC CORPORATION  
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan



EU: GC EUROPE N.V.  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,  
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

13006134  
201081DK