

# FOTOPLUS

Інструмент для зменшення ризику виникнення мікропідтікань при реставраціях II класу.



## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### ОПИС

В науковому одонтологічному світі було докладено значних зусиль для зменшення впливу основних чинників, які призводять до невдач при композитних реставраціях II класу – маргінальної інфільтрації, мікропідтікань.

Доведено, що при утриманні першої порції композиту під тиском у проксимальній ділянці під час полімеризації досягаються статистично вагомі результати зниження ризику мікропідтікань (CALIXTO, A.L.; CANDIDO, M.C.M.; MAZUR, R.F.JBC, v.5, p.30, p.491-7, грудень / січень 2002 р.).

Прозорі інструменти FOTOPLUS із чотирма різними робочими частинами розроблені спеціально для цієї техніки.

### ПОКАЗАННЯ

Інструмент FOTOPLUS призначений для моделювання композитів при реставраціях II класу.

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Виберіть інструмент з робочою частиною, яка найкраще адаптується до проксимальної ділянки порожнини, враховуючи, що інструмент буде знаходитися в порожнині під тиском.
- Внесіть першу порцію композиту в порожнину, притисніть його інструментом, полімеризуйте композит через інструмент.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на полісульфон.
- Стерилізуйте лише відповідно до інструкції. Стерилізація іншими засобами може призвести до пошкодження інструмента.

### СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Інструмент можна автоклавувати (126°C, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією необхідно очистити інструменти водою та ензимним очисним засобом.

### ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте в сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів.

### СКЛАД

Інструмент виготовлений з полісульфону.

Інструмент дозволяється стерилізувати.

Дата внесення змін в інструкцію: 01-2015.

TDV Dental Ltd.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944| CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp. Técn. Taís Cúgola Coelho Pereira. CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220051

0800 47 1020 | +55 47 3395-6115

info@tdv.com.br [www.tdv.com.br](http://www.tdv.com.br)



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна  
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua  
kristar.ua