

BITE COMPOUND

ТЕРМОПЛАСТИЧНА ВІДБИТКОВА МАСА
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИКУСУ

Перед застосуванням уважно
прочитайте інструкцію з
використання.

UA

Для застосування лише лікарями-стоматологами та зубними техніками у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

Реєстрація прикусу.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

У поодиноких випадках даний продукт може викликати чутливість у деяких людей. У разі виявлення подібних реакцій припиніть застосування продукту і зверніться до лікаря.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Розм'якшіть матеріал над вогнем або у ванні з теплою водою та у цьому пластичному стані використовуйте його. Найбільш слушний момент для зняття відбитку настає тоді, коли BITE COMPOUND при розриві більше не тягнеться у вигляді ниток, але йому все ще легко можна надати форму.

ПРИМІТКА:

Не використовуйте матеріал на пацієнтах, коли матеріал є занадто гарячим (вище 45°C).

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при кімнатній температурі (23°C / 74°F). (Термін придатності: 3 роки)

УПАКОВКА

Стандартна упаковка: 120 г (15 паличок)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

У випадку контакту з очима одразу видаліть матеріал та промийте очі водою.



DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.
Research-Park, 13 Interleuvenlaan, B-3001 Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

MANUFACTURED by
NIMI CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
4-13 Yokoyama-cho, Kiryu, Gunma 376-0055, Japan