

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

АЛЮМІНІЄВИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БОРІВ

Показання:

Алюмінієвий контейнер для ефективної організації зберігання стоматологічних борів та насадок різних розмірів та їх стерилізації.

Функціональне призначення та використання:

Призначений для ефективної організації зберігання стоматологічних борів різних розмірів та дозволяє проводити їх стерилізацію.

Інструкція із застосування:

- Виберіть правильний розмір бора/насадки.
- Після визначення розміру бора/насадки встановіть його/її у відповідний отвір.
- Закрийте контейнер.
- Проведіть стерилізацію.
- СТЕРИЛІЗАЦІЯ: Необхідно стерилізувати в автоклаві при температурі від 121°C до 135°C.

Процедура очищення:

- Перед використанням продукт необхідно простерилізувати в автоклаві при температурі до 135°C.
- Контейнер можна очистити за допомогою щітки, води та нейтрального мила (ензимного мийного засобу). Чистий і сухий контейнер слід стерилізувати в автоклаві.
- Продукт має бути упакований в пакет для стерилізації в автоклаві.

Протипоказання:

Немає.

Застереження та запобіжні заходи:

- Продукт необхідно стерилізувати в автоклаві при температурі до 135°C.
- Контейнер можна очистити за допомогою щітки для чищення, води та нейтрального мила (ензимного мийного засобу). Чистий сухий контейнер слід стерилізувати в автоклаві.
- Продукт має бути упакований в пакет для стерилізації в автоклаві.
- Ніколи не торкайтеся контейнером до стінок автоклава, оскільки вони можуть пошкодитися.
- НОМЕР ПАРТІЇ: важливо зберегти номер партії, вказаний на етикетці продукту, щоб повідомити виробника у разі виникнення проблем.

Зберігання:

- Зберігайте у чистому сухому приміщенні.
- Продукт слід транспортувати в чистій сухій упаковці при кімнатній температурі.

Утилізація:

Утилізуйте продукт дотримуючись правил безпеки, встановлених відповідним місцевим законодавством.

Склад:

Склад контейнера: Алюміній

Контейнер з алюмінію – FG (05, 10, 15, 21, 24, 30, 60 отворів)

Контейнер з алюмінію – RA (05, 10, 15, 21, 24, 30, 60 отворів)

Контейнер з алюмінію – HP (01, 05, 15, 21, 24, 30 отворів)

Символи

Позначення	Назва позначення	Опис
	Термін дії	Вказує дату, після якої медичний виріб не можна використовувати.
	Дата виробництва	Вказує дату виробництва медичного виробу.
	Виробник	Позначає виробника медичного виробу.
	Код партії	Позначає код партії виробника для того, щоб можна було визначити код партії або номер упаковки.
	Код виробника	Вказує контрольний номер виробника, щоб медичний виріб можна було ідентифікувати.
	Медичний виріб	Позначає медичний виріб.
	Унікальний ідентифікатор виробу (код UDI)	Вказує на приналежність до Системи Унікальної ідентифікації медичних виробів

	Уповноважений представник в Європейському Співтоваристві	Позначає Уповноваженого представника в Європейському Співтоваристві.
	Маркування ЄС	Виріб відповідає основним вимогам директив ЄС і гармонізованим стандартам Європейського Союзу.
	Знак відповідності в Україні	Виріб відповідає основним вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів в Україні

Дата останнього перегляду інструкції: ред. 00 від 03.05.2023



3R Industria e Comercio Ltda
Rua Ptolomeu, 290 – Socorro
Sao Paulo – SP –
CEP: 04762-040 - Brasil



«3Р Індустрія е Комерсіо Лтда»
Руа Птоломеу, 290, Сокорро
Сан-Паулу, СП,
CEP: 04762-040, Бразилія



Cinterqual, Soluções De Comércio Internacional,
Lda.
Avenida Defensores de Chaves, nº 4 –
1000 – 117 Lisboa - Portugal

«Сінтерквал, Солюсоіс Джі Комерсіо Інтернасьонал,
Лімітада.»
Авеніда дефенсоріс джі Шавіс, № 4,
1000 – 117 Лісабон, Португалія



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua