

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

GC MI Paste Plus

КРЕМ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ З БІОАКТИВНИМИ КАЛЬЦІЄМ, ФОСФАТАМИ ТА ФТОРОМ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ОПИС

GC MI Paste Plus – крем на водній основі, що містить RECALDENT™* із додаванням фтору (CPP-ACPF: казеїн фосфопептид – аморфний фосфат кальцію - фтор). Рівень виділення фтору складає 0,2% в ваговому співвідношенні (900 проміле), що є майже еквівалентним зміцнюючим зубним пастам для дорослих. Потрапляючи у ротову порожнину, CPP-ACPF міцно зв'язується з біоплівкою, нальотом, гідроксіапатитами та м'якими тканинами, при цьому доставляючи на вказані поверхні кальцій і фосфат.

ВАЖЛИВО:

Слина підвищує ефективність CPP-ACPF, а смакова добавка допомагає стимулювати виділення слюни. Чим довше слина та CPP-ACPF знаходяться у ротовій порожнині, тим кращим буде результат.

Крем для поверхневого застосування, що містить біоактивний кальцій фосфат та фтор

1. Забезпечує додатковий захист зубів.
2. Допомагає нейтралізувати вплив кислоти, яку виділяють бактерій, що знаходяться в зубному нальоті.
3. Допомагає нейтралізувати вплив інших внутрішніх та зовнішніх джерел надходження кислот до ротової порожнини.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Казеїн-фосфопептид отримують з молочного казеїну. Не застосовуйте даний матеріал для пацієнтів, що мають алергію або підозру на алергію на молочні протеїни та/або чутливість чи алергію на консерванти на основі солей бензойної кислоти.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗАННЯ

- а. Перед та після професійного відбілювання.
 - б. Після ультразвукової, профілактичної механічної чистки або кюретажу поверхні кореня.
 - в. Після професійної чистки зубів.
 - г. Запобігання та контроль надчутливості.
- Після процедури поверхневого фторування.
- д. Як альтернативний засіб поверхневого фторування для дітей у віці 6 років і більше.
 - е. Під час ортодонтичного лікування.
 - є. Для пацієнтів зі схильністю до захворювання на карієс.
 - ж. Для створення захисного шару поверхні тканин зубів у пацієнтів, у яких спостерігається ерозія, ксеростомія або синдром Шегрена.
 - з. Для пацієнтів у віці з обмеженими можливостями.

Застосування у клініці:

I. Застосування з індивідуальною ложкою

1. Перед застосуванням ретельно промийте індивідуальну ложку проточною водою.
2. Видавіть товстий шар GC MI Paste Plus в ложку та встановіть її на зуби верхньої та нижньої щелепи.

3. Залиште ложку в роті мінімум на 3 хвилини.
4. Вийміть ложку.
5. Проінструкуйте пацієнта язиком розповсюдити залишки GC MI Paste Plus по ротовій порожнині. Попросіть пацієнта якнайдовше (1-2 хвилини) утриматися від спльовування і ковтання. Чим довше слина та GC MI Paste Plus знаходиться у ротовій порожнині, тим кращий буде результат.
6. Попросіть пацієнта сплюнути та, якщо можливо, утриматися від полоскання ротової порожнини. Залишки GC MI Paste Plus можна не видаляти, вони з часом зникнуть самі. По-рекомендуйте пацієнту не їсти та не пити протягом ще 30 хвилин.
7. Будь-які залишки GC MI Paste Plus в ложці потрібно змити або зчистити щіткою під проточною водою одразу після використання.

II . Застосування без ложки:

1. Якщо необхідно, видаліть надлишки слюни з поверхні зубів за допомогою ватного валика або тампону. НЕ потрібно висушувати зуби повітрям.
 2. Нанесіть достатньо товстий шар GC MI Paste Plus на поверхню зубів ватною паличкою або пальцем у латексних рукавичках.
- Для важкодоступних ділянок (між зубами) використовуйте зубну щітку для чистки інтерпроксимальних поверхонь.
3. Залишіть GC MI Paste Plus на зубах мінімум на 3 хвилини.
 4. Потім попросіть пацієнта язиком розповсюдити залишки GC MI Paste Plus по ротовій порожнині. Попросіть пацієнта якнайдовше (1-2 хвилини) утриматися від спльовування і ковтання. Чим довше слина та GC MI Paste Plus знаходяться у ротовій порожнині, тим кращий буде результат.
 5. Попросіть пацієнта сплюнути та, якщо можливо, утриматися від полоскання ротової порожнини. Залишки GC MI Paste Plus можна не видаляти, вони з часом зникнуть самі. По-рекомендуйте пацієнту не їсти та не пити протягом ще 30 хвилин.

Домашнє застосування:

III . Денне нанесення після чистки зубів відповідно до порад стоматолога

1. Нанесіть достатню кількість GC MI Paste Plus на верхні та нижні зуби. Порція розміром з горошину є мінімально необхідною для кожної дуги. Матеріал потрібно наносити чистим сухим пальцем або бавовняним тампоном. Для важкодоступних ділянок (між зубами) використовуйте спеціальну інтерпроксимальну щіточку або зубну нитку, вкриту GC MI Paste Plus.
2. Залиште GC MI Paste Plus на зубах мінімум на 3 хвилини.
3. Язиком розповсюдьте залишки GC MI Paste Plus по ротовій порожнині. Якнайдовше (1-2 хвилини) утримайтеся від спльовування та ковтання. Чим довше слина та GC MI Paste Plus знаходяться у ротовій порожнині, тим кращий буде результат.
4. Сплюньте та, якщо можливо, утримайтеся від полоскання. Залишки GC MI Paste Plus можна не видаляти, вони з часом зникнуть самі. Не їжте і не пийте протягом 30 хвилин після аплікації.

IV. Нанесення на ніч після чистки зубів у відповідності до порад лікаря

Примітка:

Застосування на ніч особливо рекомендоване дорослим з високим ризиком розвитку карієсу, але не рекомендується дітям до 12 років.

1. Нанесіть достатню кількість GC MI Paste Plus на верхні та нижні зуби. Порція розміром з горошину є мінімально необхідною для кожної дуги. Матеріал потрібно наносити чистим сухим пальцем або ватною паличкою. Для важкодоступних ділянок (між зубами) використовуйте спеціальну інтерпроксимальну щіточку або зубну нитку, покриту GC MI Paste Plus.

2. Залиште GC MI Paste Plus на зубах мінімум на 3 хвилини.
3. Язиком розповсюдьте залишки GC MI Paste Plus по ротовій порожнині. Якнайдовше (1-2 хвилини) утримайтеся від спльовування та ковтання. Чим довше слина та GC MI Paste Plus знаходяться у ротовій порожнині, тим ефективнішим буде результат.
4. Сплюньте та, якщо можливо, утримайтеся від полоскання. Залишки GC MI Paste Plus можна не видаляти, вони з часом зникнуть самі. Не їжте і не пийте протягом ще 30 хвилин.

СМАКИ

Полуниця (S), Диня (M), Ваніль (V), М'ята (I), Фруктовий (T)

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у прохолодному сухому та темному місці (8-25°C) (46,4-77,0°F).
(Термін придатності: 2 роки від дати виробництва).

УПАКОВКА

Тюбик 40 г (35мл)

1. Упаковка Асорті
10x40 г (по 2 тюбика кожного зі смаків: Полуниця, Диня, Ваніль, М'ята, Фруктовий)
2. Упаковка з одного смаку
10x40 г будь-якого зі смаків: Ваніль, Полуниця, Диня, Фруктовий, М'ята
3. Окремо
1 тюбик (40 г) будь-якого зі смаків

ПРИМІТКА

GC MI Paste Plus, у складі якого міститься унікальна речовина CPP-ACPF, був розроблений на Кафедрі Стоматологічних Наук Університету Мельбурну, штат Вікторія, Австралія.

*RECALDENT є торговою маркою, що використовується за ліцензією.

Технологія CPP-ACPF захищена патентами або патентами на стадії отримання на території Австралії, Нової Зеландії, Європи, Канади та США.

УВАГА

1. Завжди закривайте тюбик одразу після використання та видаляйте будь-які залишки крему або вологи з шийки тюбика та всередині ковпачка.
2. Не рекомендується використовувати GC MI Paste Plus дітям до 6 років.
3. Домашнє використання GC MI Paste Plus на ніч не рекомендується дітям до 12 років.
4. При потрапленні крему в очі, промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря.
5. У випадку потраплення матеріалу на одяг, змийте його водою.
6. Якщо спостерігаються симптоми набряку Квінке, це може вказувати на чутливість або алергію на консерванти на основі солей бензойної кислоти або на інші компоненти продукту, такі як, наприклад, ароматизатор. В такому випадку, припиніть використання продукту та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

Останні зміни внесено : 02/2011

MANUFACTURED
by GC CORPORATION
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585,
Japan
DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan

CE 0086

GC

GC EUROPE N.V.
ResearchDPark, Interleuvenlaan 13, BD3001 Leuven,
Belgium
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alpis, IL 60803 U.S.A.
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06D27 Singapore 508724