

Диски полірувальні FELT WHEELS, повстяні непросочені

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Полірувальні диски з натуральної вовни призначені для використовувати з усіма видами стоматологічних полірувальних паст.

ВИКОРИСТАННЯ

Встановіть мандрелу в кутовий наконечник. Закріпіть диск на мандрелі. Нанесіть пасту на диск. Полірування виконуйте переривчастими круговими рухами з незначним тиском на низьких обертах мотора.

РОЗМІРИ

8 мм і 12 мм

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Лише для професійного використання.
- Диски призначені для одноразового використання. Повторне застосування може стати причиною перехресного інфікування.
- Не використовуйте диски при швидкості вище 4000 об/хв.
- З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання диска, перед початком реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область.
- Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з компонентів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Завдяки тертю абразивної сторони диска по поверхні зуба відбувається шліфування та полірування поверхні реставрації.

СКЛАД

Натуральна повсть.



Диски полірувальні FELT WHEELS, повстяні непросочені – призначені лише для одноразового використання.

Дата внесення змін в інструкцію: 03-2015.

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil. Resp.Técн. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220044

+55 47 3395-6115

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна

тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua

kristar.ua