

*initial*TM Lustre Pastes ONE та Spectrum Stains

Рішення для розфарбування

Мистецтво
розфарбування
кераміки

Створюйте вашу естетику за допомогою Initial™ від GC

GC пропонує користувачам Initial найсучасніші та високоестетичні фарби для кераміки. Залежно від випадку та бажаних властивостей дві продуктивні лінії, Initial Lustre Pastes та Initial Spectrum Stains, забезпечать очікуваний результат. Вони підходять для широкого спектра КТР, що дозволяє працювати з усією лінійкою кераміки GC Initial та майже з усіма типами інших керамік.

Initial Lustre Pastes ONE – унікальна 3D-кераміка від GC, яка надає флюоресценції, глибини та автентичності усім вашим дорогоцінним виробам... шляхом простого фарбування. Вам більше не потрібні складне нашарування або додаткові цикли спікання, щоб отримати неперевершену естетичність та природний блиск для всіх ваших реставрацій.

Initial Lustre Pastes GUM Shades засновані на ретельному підборі нефлюоресцентних рожевих керамічних часток для ідеальної імітації натуральних ясен. Завдяки цьому можна легко досягти реалістичного переходу від краю коронки до ясен.



Initial Spectrum Stains забезпечує ефект двовимірного фарбування і може використовуватися як для внутрішнього, так і для зовнішнього фарбування. Ці барвники забезпечать дуже вишуканий кінцевий результат із глянцевою поверхнею, зберігаючи текстуру.

Обидва продукти доповнюють один одного. У деяких випадках вони використовуються разом, наприклад, Spectrum Stains можна додавати до Lustre Pastes ONE чи до керамічних порошків.

Сумісність Lustre Pastes Family та Spectrum Stains
з лінійкою кераміки Initial

КТР

$10^{-6} \times K^{-1}$

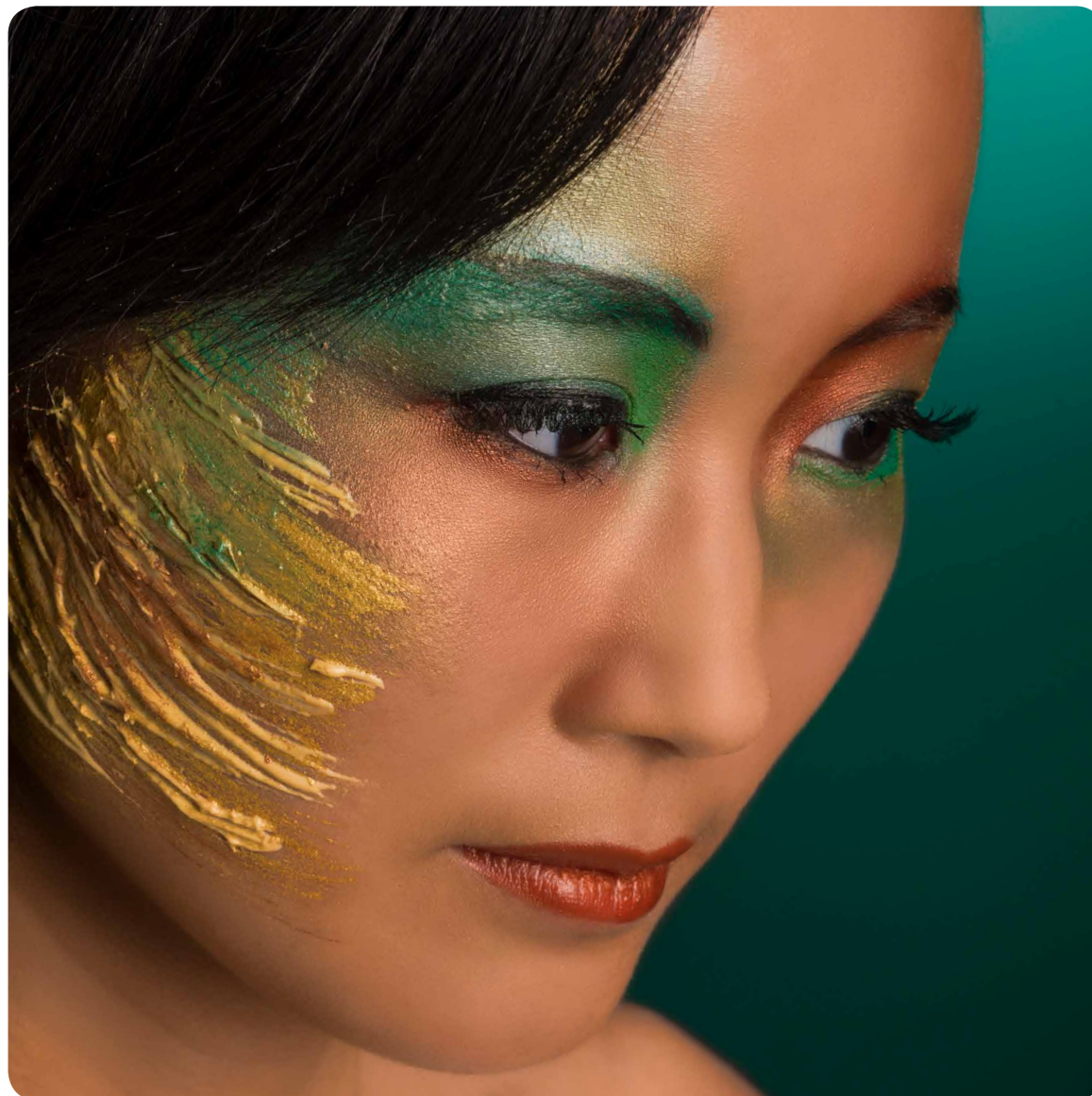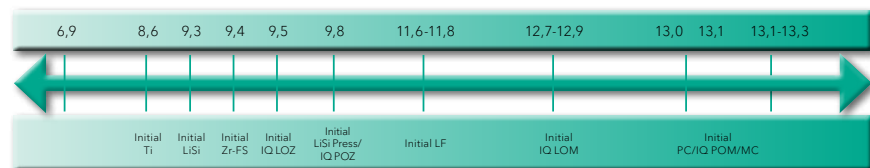

Lustre Pastes ONE V-Відтінки

За допомогою відтінків "Body A-D" дуже легко та швидко можна отримати необхідні V-відтінки. З іншими доступними кольорами ви можете додатково характеризувати реставрації для ідеально асимільованого кінцевого результату.

Fluo



Оптимальний рівень флюоресценції.
Забезпечує природний вигляд зубів за будь-яких умов освітлення.



Lustre Pastes NF GUM

5 унікальних паст Lustre Pastes відтінку ясен забезпечують індивідуальну адаптацію до природних відтінків ясен і гармонійне поєднання з ними. Ви можете використовувати 4 пастоподібні барвники Gum Modifiers та змішувати їх, що надає необмежену можливість для творчості та безпроблемного відтворення найделікатніших ділянок ясен.



Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains – це порошкові фарби, доступні у 20 кольорах, що покращують естетику ваших реставрацій.

Незалежно від способу нанесення ви отримаєте дуже гарний кінцевий результат зі збереженням текстури поверхні та забезпеченням оптимального рівня блиску.



Глибока краса, нанесена зовні з Initial Lustre Pastes ONE

Ідеальне завершення ваших реставрацій

Вам більше не потрібне складне нашарування чи додаткові цикли спікання, щоб ваші реставрації набули неперевершеної вітальності та природного блиску.

З Initial Lustre Pastes ONE ви можете отримати глибокий колір і природну прозорість... лише завдяки розфарбуванню.

Initial Lustre Pastes ONE базується на спеціальній суміші дрібних керамічних часточок. Незалежно від використаної техніки та типу конструкції етапи завершення ваших робіт залишаються незмінними. Завдяки використанню рідини для розведення (Diluting liquid) оптимальна консистенція зберігатиметься до кінця.

Необхідні V-відтінки створюються нанесенням Lustre Pastes ONE "Body A-D". Цей процес включає все необхідне для миттєвого створення V-відтінків.

Для подальшої характеристики просто використовуйте інші доступні кольори, щоб отримувати високоестетичні результати.



База



Нанесення LP ONE Neutral Fluo



Нанесення Body Shades



Фінальна реставрація з відновленням кольору та блиску

Легка модифікація

З Initial Lustre Pastes ONE ви можете легко змінювати ваші роботи.

Відкоригувати колір, яскравість, відтінок сірого або додати поверхні блиску ще ніколи не було так просто!



Яскравість




Колір



Рівень сірого

Фарбування кераміки дозволяє точно відтворити найтонші емоції

Пасти Lustre Pastes ONE з покращеною флюоресценцією спеціально розроблені для посилення флюоресценції ваших повноанатомічних реставрацій та забезпечення природного вигляду зубів за будь-якого освітлення.

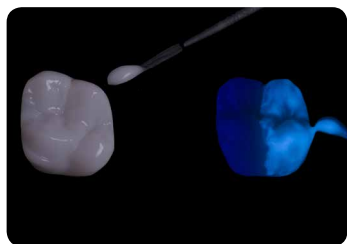


Lustre Enamel Effect - Opal
Базова високоопалесцентна паста для використання в ділянці різців.




Характеризуйте ваші повноанатомічні реставрації...

Унікальна консистенція забезпечує однорідність нанесення та вигляду. Бажану текстуру/гладкість поверхні Lustre Pastes ONE можна отримати за допомогою м'якої вібрації чи конденсування реставрації. Не потрібні складне нашарування чи додаткові цикли спікання; це швидко, легко та безпечно. Пасти готові до використання, а їхня відмінна тиксотропність забезпечить легке й точне нанесення.

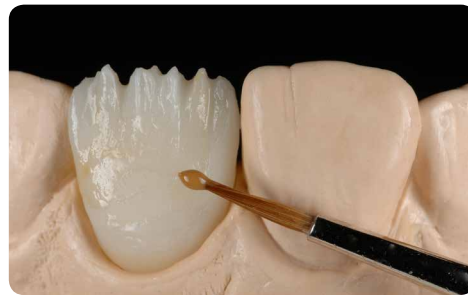


Повноанатомічні каркаси з дисилікату літію, такого як LiSi Press, можна індивідуалізувати за допомогою Lustre Pastes ONE.

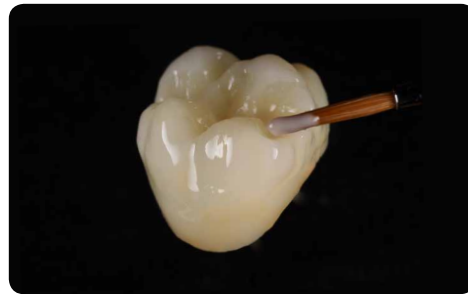

Шукаєте спосіб покращити вітальність ваших CAD/CAM реставрацій з циркону, такого як Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes ONE – рішення на будь-який випадок.



...або вбудовуйте їх у шари для поглиблених ефектів

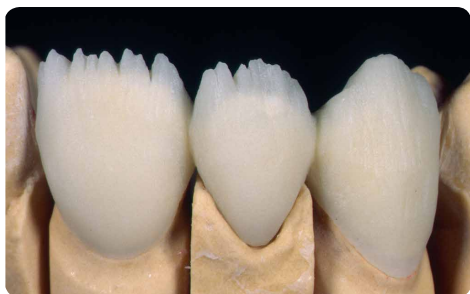

Cut back



Нанесення Lustre Pastes ONE (+спікання)



Нанесення Опалових/Емалевих мас (+спікання)



Кінцевий результат

Досягніть найвидатніших естетичних результатів, використовуючи Initial Lustre Pastes ONE із cut-back-технікою з вашими відпресованими чи змодельованими роботами. Після розфарбування за допомогою Lustre Pastes ONE фінальні штрихи зроблені за допомогою порошків GC Initial: CL-F – для високої прозорості, опал та емаль – для створення ефекту ріжучого краю.



Створіть вашу червону та білу естетику...

Два набори, один підхід



Початкова ситуація




Нанесення різних ясенних відтінків Initial Lustre Pastes NF



Характеризація з використанням LP ONE
V-відтінки



Кінцевий результат

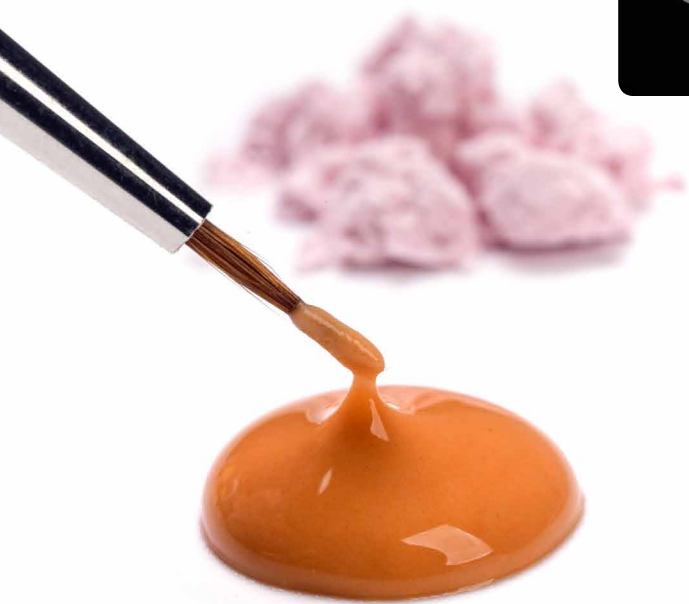

... з природною прозорістю, навіть на цирконієвих каркасах



Оптимальний рівень флюоресценції Lustre Pastes ONE забезпечує природний зовнішній вигляд зубів за будь-яких умов освітлення та використовується як кольоровий та індивідуальний шар у поєднанні з Initial SQIN у техніці мікронанесення.

Зі зростанням популярності цирконієвих і CAD/CAM реставрацій, GC пропонує рішення для підтримки високих естетичних стандартів. Ваші монолітні роботи виглядатимуть природно та яскраво з Initial Lustre Paste ONE та NF GUM. Їх унікальний склад забезпечує кращу взаємодію з керамічним каркасом, і оптично діє як керамічні порошки для моделювання, посилюючи 3D-ефект вашої реставрації. Простота може бути гарною!



Розширюйте ваші можливості у фарбуванні з Initial Spectrum Stains


Initial Spectrum Stains містять пігменти, що спечені всередині польовошпатової матриці, для стабільності та для відтворення послідовних результатів. Ви можете експериментувати з Initial Spectrum Stains. Використовуйте їх як для внутрішнього, так і зовнішнього розфарбування. Їх також можна додавати до керамічних порошків чи до Initial Lustre Pastes NF для збільшення можливостей матеріалу!

Дві консистенції, які зберігають текстуру


Initial Spectrum Stains можна наносити у бажаній консистенції: пастоподібну чи більш рідку. Незалежно від обраної консистенції кінцевий результат буде однаковим: відтінок та рівень блиску точно визначені, зберігається текстура поверхні реставрації; Initial Spectrum Stains – це 2D-двійник Initial Lustre Pastes ONE.




Коронка з мікротекстурою,
готова до глазурування

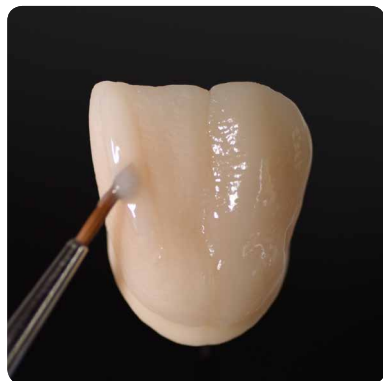

Глазурування з рідкою чи
пастоподібною консистенцією

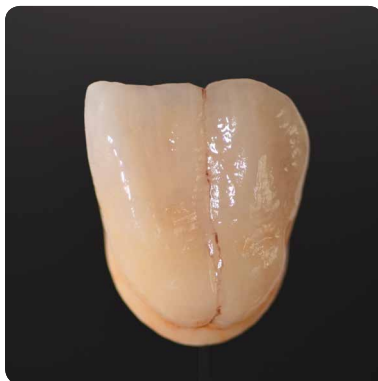

Після спікання: розфарбована та глазурована
поверхня зі збереженням текстури

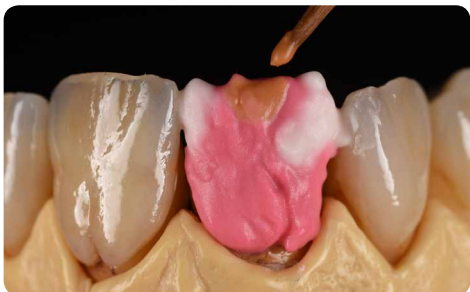

Фарбування внутрішнє...



...чи зовнішнє



2D та 3D керамічні фарби... від GC

GC Initial Lustre Pastes ONE Set – V-відтінки

- 4 відтінки Body та 1 відтінок Neutral для отримання V-відтінкової реставрації у найлегший спосіб.
- 9 ефект-відтінків для вивільнення вашого естетичного потенціалу та створення білих плям, декальцинації, тонких ліній та тріщин.

Склад набору:

1x Нейтральний (Neutral) (4 г)
1x Яскравість (Value) (4 г)
4x Body відтінків (4x 4 г)
8x Відтінки з ефектом емалі (8x 4 г)
1x Рідина для розведення (8 мл)
1x Рідина для відновлення (8 мл)
1 Палітра
2 Пензлики
Розколірка
Інструкція з використання



GC Initial Lustre Pastes Set NF – Ясенні Відтінки

- 5 готових до використання пастоподібних ясенних відтінків з ідеальною тиксотропністю для легкого та точного нанесення.
- 4 ясенних модифікатори для змішування, що забезпечують необмежену креативність для відтворення природної ясенної гармонії.

Склад набору:

5x Ясенних відтінків (5x 4 г)
4x Модифікатора для LP NF (4x 3 г)
Рідина для розведення (8 мл)
Рідина для відновлення (8 мл)
1 Палітра
2 Пензлики
Розколірка
Інструкція з використання



GC Initial Spectrum Stains

- 20 порошкових барвників для отримання естетично досконалого результату.
- Дві консистенції, що забезпечують збереження текстури, оптимальний блиск та досконалий завершальний результат.

Склад набору:

16x Initial Spectrum Stains SPS (16x 3 г)
1x Initial Spectrum Глазурний порошок GL (10 г)
1x Initial Spectrum Глазурна рідина (25 мл)
Initial Spectrum Глазурна пастоподібна рідина (8 г)
Initial Spectrum Stain Розколірка

Доступно окремо:

GC Initial Spectrum Глазурний Порошок
GL-FLUO (10 г)
GC Initial Spectrum Stains
SPS-17 - SPS-20 (3 г)



*initial*TM Lustre Pastes ONE та Spectrum Stains

Рішення для розфарбування

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<http://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/uk-UA>

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел./факс (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua