



Ідеальна текучість

G-CEM™ Veneer від GC

Високоестетичний
композитний цемент
світлової полімеризації з
легким внесенням

Ефект вражає!




З люб'язного дозволу лікаря J Mattiussi, Італія

Природна естетика

G-CEM Veneer адаптується до будь-яких пре-
цизійних естетичних випадків, забезпечуючи
природний результат.

Флюоресценція G-CEM Veneer подібна до
природних зубів. Реставрація виглядатиме
непомітно при будь-якому освітленні.

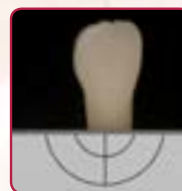

A2



Прозорий



Опак



Відбілений

Чудовий результат

G-CEM Veneer є високонаповненим та **має
неймовірну зносостійкість.**

Разом із G-Premio BOND та G-Multi PRIMER
він забезпечує **високу міцність адгезії для
довготривалого та естетичного результату.**
Його механічні властивості схожі до
пастоподібних композитів, але моделювання
значно полегшене завдяки нижчій в'язкості.



Флюоресценція 0.5 мм дисків. A: G-CEM Veneer; B: Variolink
Esthetic; C: Panavia V5; D: NX3 Nexus; E: Calibre; F: RelyX Unicem

Чотири відтінки для всіх випадків

Чотири відтінки ретельно підібрані для
ідеальної інтеграції кольору в будь-якому
випадку. Завдяки try-in пасті ви можете
переконатися, що вибраний відтінок
забезпечить вам бажаний естетичний результат.

G-CEM Veneer від GC

Унікальне моделювання, неперевершена міцність



A2

Стандартний для
фіксації більшості
ваших ортопедичних
конструкцій



Прозорий

Ідеальний для дуже
тонких конструкцій,
щоб зберегти
натуральний відтінок



Опак

Використовується
для маскування
дисколюрованих
поверхонь там, де це
необхідно



Відбілений

Використовується для
підвищення опакості
та яскравості, коли
потрібно отримати
білосніжний результат

G-CEM Veneer	
G-CEM Veneer Starter Kit	
012383	2 x G-CEM Veneer (шприци) A2 & TR, 2 x Try-in Paste (шприци) A2 & TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio BOND, 45x насадки голкові
G-CEM Veneer шприц 1 мл (1.7 г) + 10 насадок	
012389	G-CEM Veneer A2 EEP
012390	G-CEM Veneer Translucent (TR) EEP
012391	G-CEM Veneer Opaque (OP) EEP
012392	G-CEM Veneer Bleach (BL) EEP
G-CEM Try-in paste 1.2 мл (1.5 г)	
012803	G-CEM Try-in Paste A2
012804	G-CEM Try-in Paste Translucent
012805	G-CEM Try-in Paste Opaque
012806	G-CEM Try-in Paste Bleach
Супутні товари	
901503	GC голкові насадки (подовжені) (30 шт)
009553	GC G-Multi PRIMER 5 мл
012695	GC G-Premio BOND, пляшечка 5 мл EEP

G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER та G-Premio BOND
є торговими марками GC.
Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem та Variolink Esthetic DC
не є торговими марками GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

GCEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
<https://europe.gc.dental/uk-UA>



Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

GC

GC

G-CEM Veneer від GC

Ідеальна текучість

Естетичний цемент із відмінними механічними властивостями та легким внесенням.

G-CEM Veneer забезпечує незрівнянний естетичний результат для впевненої усмішки. Секрет полягає в оптимально збалансованій формулі з технологією Повноконтурного Силанування Часток наповнювача. Ця інноваційна обробка дозволяє досягти високого рівня наповнення за допомогою однорідного розподілу наповнювачів у матриці. Результат: **полегшене моделювання та відмінні фізичні властивості.**

Повноконтурне Силанування Часток

G-CEM Veneer створений із **використанням найновішої інноваційної технології (Повноконтурне Силанування Часток).**

Поверхня часток майже повністю покрита силановим з'єднувальним агентом, що забезпечує ідеальний зв'язок між наповнювачем та матрицею. Ця нова технологія дозволяє ефективно розподілити **більшу кількість часток (наповнення 69%)**, що призводить до **тиксотропної консистенції.**



Переваги тиксотропності

Завдяки новій технології Повноконтурного Силанування Часток, G-CEM Veneer **надзвичайно тиксотропний**. Він не змінює форму та тече лише під дією зовнішнього тиску. Таким чином, уся поверхня реставрації рівномірно покрита без пустот, а товщина плівки мінімальна. **Результат - ідеальна адаптованість!** Інша перевага технології Повноконтурного Силанування Часток: **G-CEM Veneer не липкий**. Тому його легко вносити з високою точністю та **легко видаляти надлишки**. Оптимально зрівноважена текучість робить цемент особливо зручним та ефективним у порівнянні зі звичайними високотекучими композитами або композитами з попереднім нагріванням. Унікальна консистенція робить G-CEM Veneer **ідеальним партнером для ваших естетичних реставрацій.**

Конкурент

G-CEM Veneer



Спростіть складні кроки

Завдяки універсальному праймеру G-Multi PRIMER та універсальному адгезиву G-Premio BOND, G-CEM Veneer забезпечує стабільну та довготривалу адгезію до будь-яких типів поверхонь та кукси, виготовленої з будь-якого матеріалу. **Фіксація стає по-справжньому стандартизованою.**

G-Premio BOND

G-Premio BOND – це **дійсно універсальний адгезив** із перевіреною формулою, що з'єднується з **куксою, виготовленою з будь-якого матеріалу**. G-Premio BOND містить три функціональні мономерні, щоб з'єднуватися з куксою, виготовленою з дентину, емалі, металу чи композиту.

G-Premio BOND можна **використовувати з усіма** техніками травління, що рекомендовані для тонких реставрацій, таких як вініри: вибіркове травління емалі чи тотальне. Після полімеризації світлом шар адгезиву стає тонким і рівномірним, що дозволяє **досконало адаптувати** реставрацію в будь-який час.

G-Multi PRIMER

G-Multi PRIMER – універсальний праймер, що використовує три різні хімічні агенти, аби забезпечити ідеальну адгезію за будь-яких умов. Завдяки додаванню силану до праймеру, а не до бонду, забезпечується стабільність адгезії.



СТАНДАРТИЗОВАНІ КРОКИ ВНЕСЕННЯ

0. Початкова ситуація



Чотири естетичні відтинки

G-CEM Veneer представлений у чотирьох різних відтинках. Вони були дбайливо відібрані відповідно до всіх естетичних вимог.

1. Примірка реставрації



Прогнозований кінцевий результат

Із Try-in пастою ви легко можете спрогнозувати кінцевий результат. Він допомагає обрати необхідний відтінок та опаковість.

2. Протравлення



Оберіть метод протравлення

Протравіть краї емалі чи застосуйте підхід тотального травління для мінімального препарування, що здебільшого локалізовано в емалі.

3. Нанесення G-Premio BOND



Адгезія до всіх поверхонь

Перевірена формула G-Premio BOND забезпечує адгезію до будь-яких матеріалів кукси. Він полімеризується окремо та настільки тонкий, що не заважає встановленню реставрації.

4. Нанесення G-Multi PRIMER



Адгезія до будь-яких каркасів

Після необхідної попередньої обробки (травління чи піско-струменевої обробки) G-Multi PRIMER забезпечує стабільну адгезію до будь-яких каркасів естетичних реставрацій..

5. Фіксація



Точне внесення

Тиксотропність та довгий робочий час забезпечують точне внесення

6. Видалення надлишків



Легке очищення

Оптимально полімеризувати світлом протягом 1-2 секунд перед видаленням. Після фінальної полімеризації краї можна легко фінірувати та полірувати до яскравого блиску, щоб мінімізувати утворення зубного нальоту.

7. Кінцевий результат



Довговічний результат
Висока стабільність кольору та відмінні механічні властивості забезпечують довготривалий та якісний кінцевий результат.

G-CEM Veneer

Відмінна полімеризація

G-CEM Veneer можна ефективно полімеризувати крізь реставрацію <2 мм із достатньою прозорістю. Рекомендований для композитів та **керамічних вінірів, вкладок та накладок.**

Надзвичайна зносостійкість



Гладка та блискуча поверхня зберігається з часом завдяки високій зносостійкості, **запобігає утворенню крайових сколів та протидіє дисколоруванню**. Технологія Повноконтурного Силанування Часток та покращена матриця запобігає втраті часток та забезпечує рівномірне розподілення наповнювачів.

Мінімальна товщина плівки

Переваги міцності в поєднанні з ідеальною текучістю... Відмінне припасовування **без необхідності попереднього нагріву!**

G-CEM Try-in Paste

Відтинки G-CEM Try-in Paste **ідеально відповідають** чотирьом відтинкам G-CEM Veneer. Вони створені на основі води для легкого видалення після нанесення.

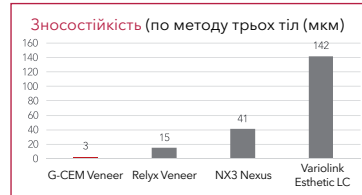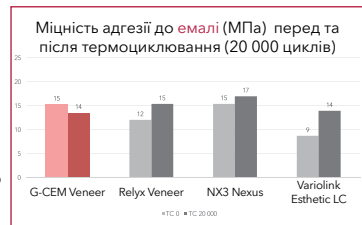

Джерело: GC R&D, Японія. Файл даних.